

ケーブのエアマットレス アーカイブ

日本の床ずれ対策の進化とともに。

1987年、国産で初の圧切替型エアマットレスを開発して以来、ケーブは「床ずれのない快適ケアの実現」という原点を見つめながら、オリジナルのエアマットレスを開発してまいりました。優れた体圧分散性能を実現する日本初の「三連順次圧切替システム」をはじめ、「骨突出」や「頭側挙上」に対応する機能など、ケーブは常に日本の創傷看護・ケアの進化を見つめ、それを支えてきました。そしてこれからも、幅広いリスクへの対応や安全性の強化といった新たな課題に取り組み、時代の要請に応える技術を生み出しながら、日本の療養環境の改善に寄与してまいります。



- >>>> 1987 国産初-圧切替型エアマットレス「スタンダードマット」発売
一体成型型「バルセア」発売
- >>>> 1992 三連圧切替-トリプルシステム搭載「コスモエア」発売
- >>>> 1994 マイコン制御圧力センサー搭載「エアドクター」発売
- >>>> 1997 日本人の骨突出への対応 完全独立二層式「ビッグセル」発売
- >>>> 1999 日本での療養環境に対応 背上げモード機能付「トライセル」発売
- >>>> 2001 QOLと体圧分散を両立 自立支援対応 超薄型「アクティ」発売
- >>>> 2002 体位変換アシスト機能の開発 自動体位変換機能付「ネオ」発売
- >>>> 2003 あらゆる個別リスクへの対応 超低圧保持型「ビッグセル-エキスパート」発売
- >>>> 2007 幅広いリスクへの対応 高機能マルチエアマットレス「ネクサス」発売
- >>>> 2012 安全性・個別性の追求 超高機能エアマットレス「ビッグセルインフィニティ」発売
- >>>> 2014 オート機能でより使いやすく 進化系高機能マルチエアマットレス「ネクサスR」発売
- >>>> 2016 安心・安楽な自動体位変換を実現 自動体位変換エアマットレス「ラグーナ」発売
- >>>> 2018 看護にやさしい商品設計 上敷きタイプのエアマットレス「トライセルE」発売

Evidence-Based Development ケーブのエアマットレス オリジナル技術


ケーブの技術は、臨床現場との共同研究によって開発されています。



個別圧力管理のために

圧力センサーによる電子制御


オート機能

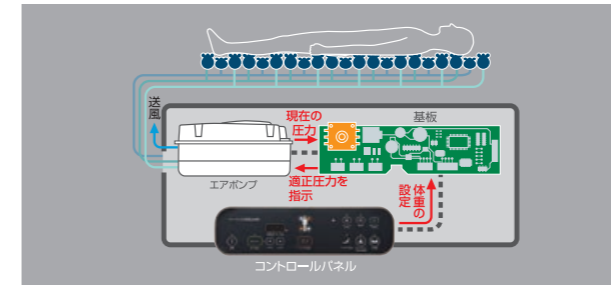

エアセル内の内圧をエアポンプ内蔵の圧力センサーが電子制御。療養者の体重に合わせた理想的な体圧分散環境を作り出します。

体圧分散のために

三連圧切替-トリプルシステム

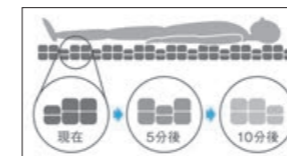

エアセルが膨張収縮を繰り返すことで、床ずれの原因である局所への継続的な圧力集中を軽減します。常に2/3の広い面積で身体を保持することで、高い安定感と体圧分散性能を実現します。
(交互膨縮の従来型と比べ、保持面積が約133%に拡大)


完全独立二層式エアセル



底づきを回避し、圧力集中にきめ細かく対応します。一本一本独立したエアセルは、エアセル間の空気移動を滑らかにして、ベッド上の動きを妨げません。

快適性と介護負担軽減のために

ムレ対策/ひえ対策機能

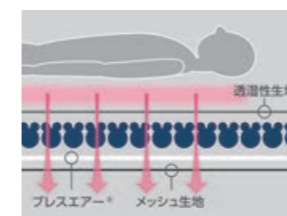

空気を循環させてマット内にこもった湿気や熱を排出します。マット内のひえ対策にはプラス専用パッド。

クイックハードモード



エアセルの圧切替を停止し、短時間で内圧を高めて、しっかりとした床面にします。


安全のために

CPR対応機能



約25秒で心肺蘇生運動開始が可能になります。

キーロック

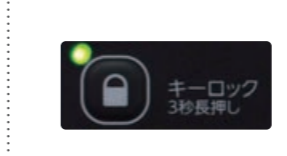

ボタン操作をロックし、誤操作を防止します。

体重設定機能



5kg刻みに体重設定ができるため、パーソナルな内圧管理を実現します。過少体重から過体重の方まで安心サポート。

かんたんモード



エアマットレス利用者のボリュームゾーンである「40~60kg」の体重範囲を広くカバーする自動内圧調整機能です。

デュアルフィットセル®



身体の高さに合わせてフィットし、ずれを吸収するエアセルのデザイン。過度な沈み込みがなく、きめ細かな体圧分散と安定感を両立を可能にしました。

トリプルフィットセル®



デュアルフィットセル®の進化形エアセル。過度な沈み込みがなく、さらに安定感も増し、効率的に体圧分散を行います。

自動ヘッドアップ対応機能



搭載された角度センサーがヘッドアップの角度を検知して自動で内圧と動きを調整します。

スモールチェンジ®



15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返します。

停電対策/メモリ機能



停電と同時に電磁弁がエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。内圧を約14日間保持。メモリ機能により電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。

光サイン/警告音




エアマットレスの異常時には赤ランプと警告音でお知らせします。照度センサーが、お部屋の明るさに応じて光サインの明るさを自動で調節します。

エアマットレス
ウレタンフォームマットレス
専門分野
ウレタンフォームマットレス
体位変換器/体圧分散式マットレス
マットレス用
シート
携帯型
接触圧力測定器
補助用具
車いす用
クッション
電動式
生体用洗浄器
(医療従事者向け)

SMALL CHANGE LAGUNA

スモールチェンジ® ラグーナ®

臨床研究から生まれた新しい自動体位変換機能「スモールチェンジ®」。
時間を問わずサポートを求められる介護者の負担を軽減します。

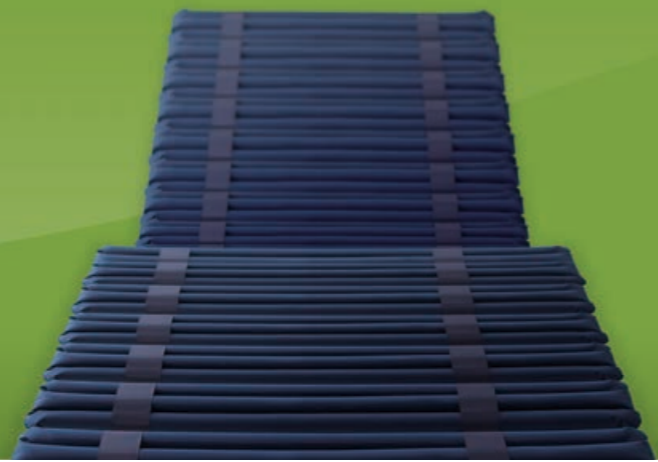


■ 操作パネル



対角線上で支える小さな体位変換



1 スモールチェンジ機能 オート機能

上半身と下半身を大きく、左右いずれかの方向に傾け、長い時間保持する従来の方法とは異なり、ラグーナのスモールチェンジは、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を約15分間隔で行うシステムです。

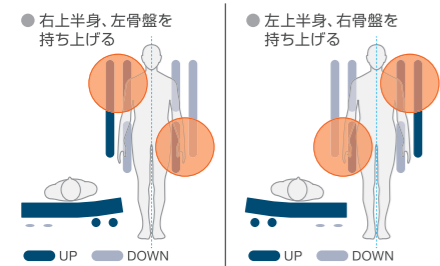

■ スモールチェンジの体圧分布変化

小さな体位変換を頻回に行い、床ずれを防ぎます。

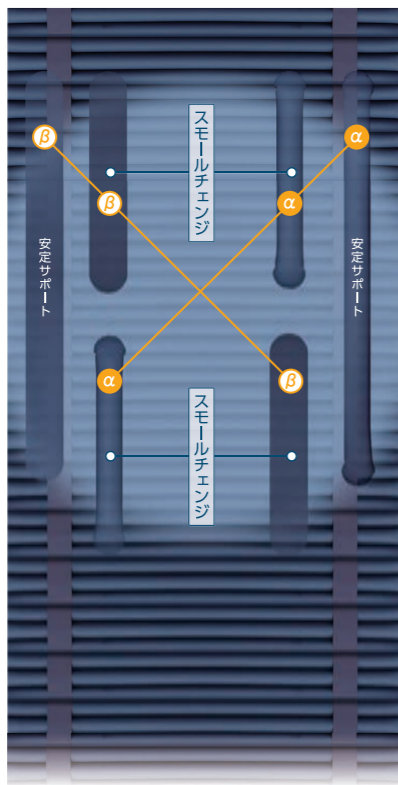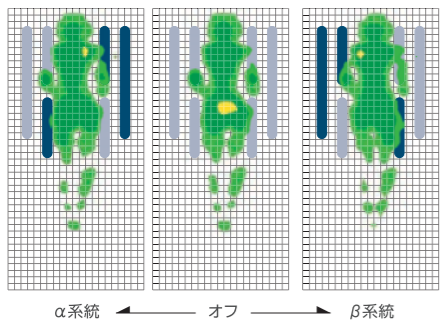


ラグーナのスモールチェンジ機能は、看護研究により安楽性と有効な体圧分散効果が明らかにされています。

Tsuchiya S, Sugama J, et al: The effectiveness of small changes for pressure redistribution: using the air mattress for small changes. J Tissue Viability. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtv.2015.12.001. 2016

呼吸管理や経管栄養など
頭側挙上を(継続)される方に

2 自動ヘッドアップ対応機能 オート機能

マットレスに内蔵した角度センサがベッドの背上げ角度を検知。角度に応じて、マットレスの柔らかさと動きを最適な状態に自動調整します。

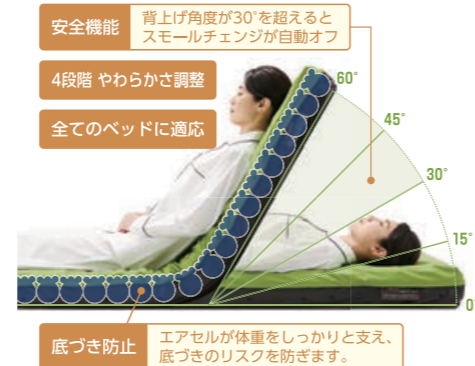

コンセントにつないでスグに使える
新しい自動内圧調整機能

3 かんたんモード オート機能

「かんたんモード」は、エアマットレス利用の半数以上を占める40～60kgの方に対応。体重が40～60kgであれば、エアマットレスの柔らかさが自動的に調整されます。

■ 体重設定機能
20～120kg以上の方に対応
療養者の体重に応じて細かく設定
できます。

スモールチェンジ® ラグーナ®

840 (CR-700) サイズ:幅84×長192×厚13.5cm
900 (CR-703) サイズ:幅90×長192×厚13.5cm
840 / SHORT (CR-705) サイズ:幅84×長180×厚13.5cm
900 / SHORT (CR-707) サイズ:幅90×長180×厚13.5cm
エアマットレス・エアポンプ・
専用カバーセット **208,000円** [非課税]

1000 (CR-711) サイズ:幅100×長192×厚13.5cm
エアマットレス・エアポンプ・
専用カバーセット **228,000円** [非課税]

3年間保証 マットレス、エアポンプ

介護保険／福祉用具貸与対象品目
TAISコード: (CR-700)00206-000102
(サイズ別のTAISコードはP.45を
ご覧ください)



スモールチェンジ® ラグーナ® プラス

840 (CR-721) サイズ:幅84×長192×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
900 (CR-723) サイズ:幅90×長192×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
840 / SHORT (CR-725) サイズ:幅84×長180×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
900 / SHORT (CR-727) サイズ:幅90×長180×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
エアマットレス・エアポンプ・
プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット **228,000円** [非課税]

1000 (CR-731) サイズ:幅100×長192×厚13.5cm (足元のみ厚14.5cm)
エアマットレス・エアポンプ・
プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット **248,000円** [非課税]

3年間保証 マットレス、エアポンプ

1年間保証 プラス専用パッド Aタイプ

介護保険／福祉用具貸与対象品目
TAISコード: (CR-721)00206-000107
(サイズ別のTAISコードはP.45を
ご覧ください)



■ マットレスの構造

トリプルフィットセル®
上層63本の小さなエアセルが柔らかく身体にフィット。下層21本のエアセルでしっかり身体を支えることで、過度な沈み込みがなく、柔らかさと安定感を両立します。

高性能な専用カバー
防水 透湿 制菌 伸縮 防災 機能
SEK赤ラベル相当
防水
対応菌種 MRSA、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌、黄色ブドウ球菌

13.5cmのスリム設計

メッシュカバー

スモールチェンジ
「スモールチェンジ」が15分毎に対角線上に膨脹収縮し、小さい体位変換を行います。

安定した床面で動作介助やリハビリをサポート

4 クイックハードモード

約4分でエアマットレス全体をかたくします。安定面が必要なシーンに迅速に対応します。



安静が必要な方、圧切替が気になる方に

5 圧切替

安静が必要な方、エアセルの圧切替が気になる方は、圧切替ボタンOFFを選択いただけます。

6 停電対策／メモリ機能 オート機能

停電時も、万一コンセントが外れた時も安心
特殊なバルブ（電磁弁）がエアセル内の空気漏れを自動で遮断。（約14日間エアマットレス内圧保持）

メモリ機能により電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。（体重設定などの再設定が不要）

ムレ対策機能

「圧切替」×「スモールチェンジ」×「ムレ対策素材」が、エアマットレス内の熱・湿気を排気

エアセルの圧切替
エアセルが5分毎に膨脹収縮

底面通気構造
身体の熱と湿気をマットレス内に透過して下面から排気します。

ムレ対策素材
透湿・防水カバー
Ag+ ※銀複合系抗菌剤を使用しています。
優れた防水性を保ちながら、熱と湿気のみを透過。

スモールチェンジ機能
スモールチェンジの動きが熱・湿気を逃がす

背部の体温変化
被験者: 40代男性
測定環境: 室温約22℃
通気性抜群のプレスエアー®を採用。
メッシュカバー
上部からの熱・湿気をスムーズに下に排気。

■ 37
■ 36
■ 35
■ 34
■ 33
■ 32
■ 31
■ 30

■ 0 30 60 90 120 150 180 210 240
時間(分)

充実した安全機能

7 光サイン／警告音 オート機能

動作状況が一目で分かり、異常時には光サインが赤く点灯し、警告音でお知らせします。

寝床内環境の「ひえ」に対応する


プラス専用パッド

専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。（ラグーナプラスに搭載）

Air Master NEXUS R

エアマスター ネクサスR

ワンタッチで使用できる「かんたんモード」を搭載。
幅広い療養者や状態の変化に対応できる
高機能マルチタイプエアマットレス。

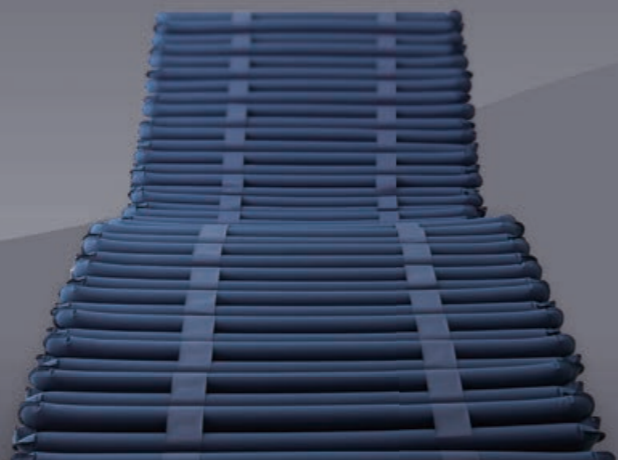

■ 操作パネル




コンセントにつないでスグに使える
新しい自動内圧調整機能

1 かんたんモード オート機能

「かんたんモード」は、エアマットレス利用者の半数以上を占める40～60kgの方に対応。体重が40～60kgであれば、エアマットレスのやわらかさが自動的に調整されます。

●エアマットレス利用者の体重分布

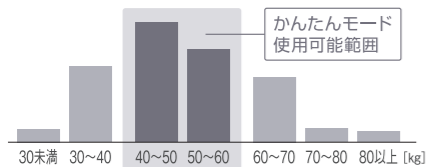

■ 体重設定機能

20～120kg以上の方に対応

療養者の体重に応じて細かく設定できます。



呼吸管理や経管栄養など
頭側挙上を(継続)される方に

2 自動ヘッドアップ対応機能 オート機能

マットレスに内蔵した角度センサがベッドの背上げ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。

4段階 やわらかさ調整 全てのベッドに適用




底づき防止 エアセルが体重をしっかりと支え、底づきのリスクを防ぎます。

安定した床面で
動作介助やリハビリをサポート

3 クイックハードモード

約3分でエアマットレス全体をかたくします。安定面が必要なシーンに迅速に対応します。

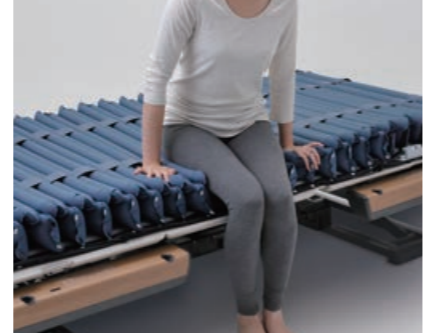

離床、端座位、リハビリ時などに安定した床面を確保できます。

安静管理が必要な方に

4 微波動モード

通常モードより膨張収縮の動作を小さくし、圧切替え時の違和感を軽減。ターミナルケアの方にも、安心してお使いいただけます。



寝心地のよさと体圧分散を両立できます。

エアマスター ネクサスR

840 (CR-660) サイズ: 幅84×長191×厚12cm
900 (CR-663) サイズ: 幅90×長191×厚12cm
840 / SHORT (CR-665) サイズ: 幅84×長180×厚12cm
900 / SHORT (CR-667) サイズ: 幅90×長180×厚12cm
エアマットレス・エアポンプ・専用カバーセット **172,000円(＋税)**

900 / LONG (CR-669) サイズ: 幅 90×長205×厚12cm
1000 (CR-685) サイズ: 幅100×長191×厚12cm
エアマットレス・エアポンプ・専用カバーセット **192,000円(＋税)**

3年間保証 マットレス、エアポンプ

介護保険／福祉用具貸与対象品目
TAISコード: (CR-660) 00206-000082
(サイズ別のTAISコードはP.46をご覧ください)



エアマスター ネクサスR プラス

840 (CR-671) サイズ: 幅84×長191×厚12cm(足元のみ厚13cm)
900 (CR-673) サイズ: 幅90×長191×厚12cm(足元のみ厚13cm)
840 / SHORT (CR-675) サイズ: 幅84×長180×厚12cm(足元のみ厚13cm)
900 / SHORT (CR-677) サイズ: 幅90×長180×厚12cm(足元のみ厚13cm)
エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッド・専用カバーセット **192,000円(＋税)**

900 / LONG (CR-679) サイズ: 幅 90×長205×厚12cm(足元のみ厚13cm)
1000 (CR-687) サイズ: 幅100×長191×厚12cm(足元のみ厚13cm)
エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッド・専用カバーセット **212,000円(＋税)**


3年間保証 マットレス、エアポンプ

1年間保証 プラス専用パッド

介護保険／福祉用具貸与対象品目
TAISコード: (CR-671) 00206-000088
(サイズ別のTAISコードはP.46をご覧ください)



■ マットレスの構造

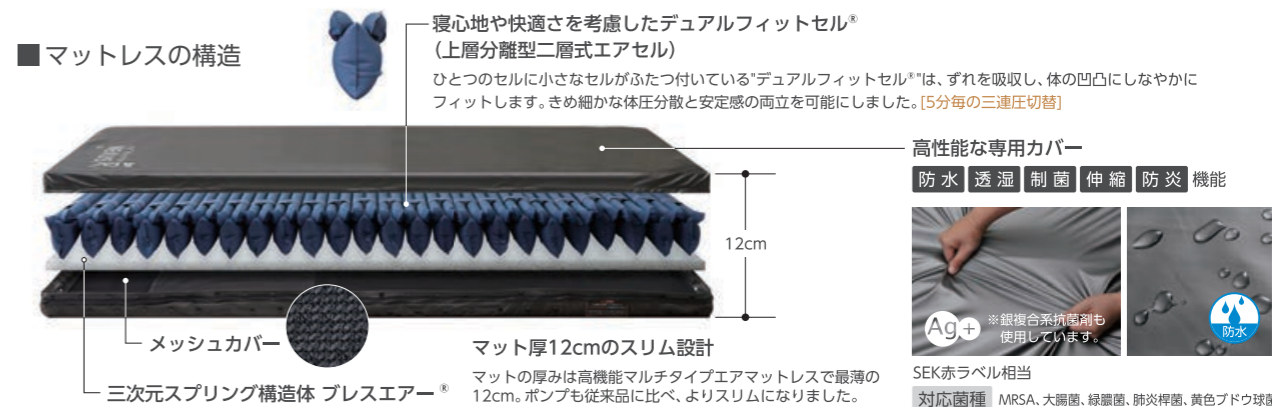


独自の換気システムで快適な寝床内環境に

5 ムレ対策機能

療養者の状態や室温に合わせて、強・弱の2段階切替えが可能。
マット内にエアを循環させ、熱と湿気をマットの外に排出。ムレやすい寝床内を快適に保ちます。

透湿性カバー&底面通気構造
身体の熱と湿気をマットレス内に透過して下面から排気。ベースマットの「プレスエアー®」が換気効率を向上。

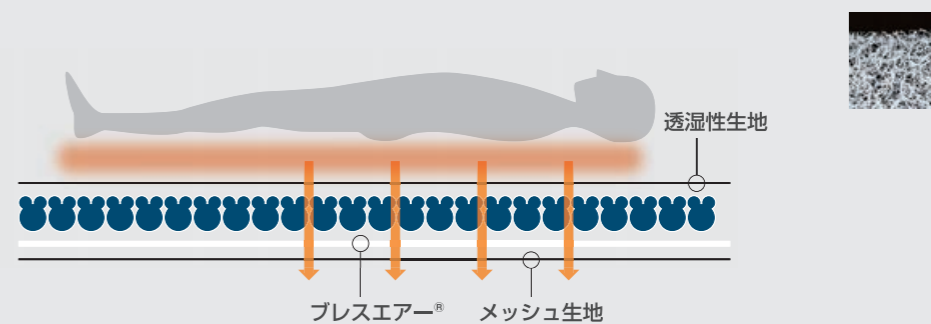

停電時も、万ーコンセントが外れた時も安心

6 停電対策／メモリ機能 オート機能

特殊なバルブ(電磁弁)がエアセル内の空気漏れを自動で遮断。(約14日間エアマットレス内圧保持)

メモリ機能により電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。(体重設定などの再設定が不要)

充実した安全機能

7 光サイン／警告音 オート機能

動作状況が一目で分かり、異常時には光サインが赤く点灯し、警告音でお知らせします。

寝床内環境の「ひえ」に対応する

プラス専用パッド

専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。(ネクサスRプラスに搭載)

Air Master BIGCELL Infinity

エアマスター ビッグセル インフィニティ

頭側挙上時の自動対応、停電対策などの安全性を強化した
リスクの高い療養者に対応する超高機能型エアマットレス。

■ 操作パネル



呼吸管理や経管栄養など
頭側挙上を(継続)される方に

特許取得済

1 自動ヘッドアップ対応機能 オート機能

マットレスに内蔵した角度センサがベッドの背
上げ角度を検知。角度に応じて、マットレスのや
わらかさと動きを最適な状態に自動調整します。

3段階 やわらかさ調整 全てのベッドに対応




底づき防止 エアセルが体重をしっかり支え、
底づきのリスクを防ぎます。

関節屈曲拘縮のある方に

2 拘縮対応モード

膨張収縮の動きを保ちながらエ
アセルの内圧を上げ、腰・臀部の
過度な沈み込みを抑制。
下肢拘縮の方の寝姿勢保持と体
圧分散を行います。

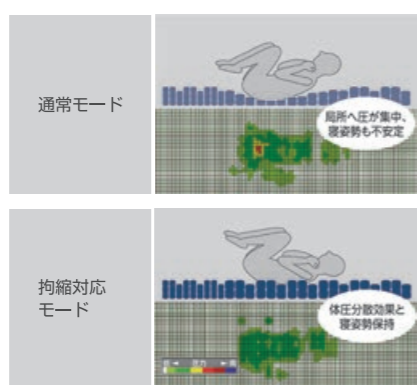

安定した床面で
動作介助やリハビリをサポート

3 クイックハードモード

約3分でエアマットレス全体をか
たくします。
安定面が必要なシーンに迅速に
対応します。



安静管理が必要な方に

4 微波動モード

通常モードより膨張収縮の動作を
小さくし、圧切替え時の違和感を
軽減。ターミナルケアの方にも、
安心してお使いいただけます。






■ 頭側挙上の方への対応

ベッドマットレス／仰臥位

ベッドマットレス／頭側挙上70°

ビッグセル インフィニティ／頭側挙上70°

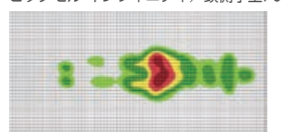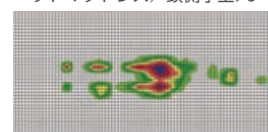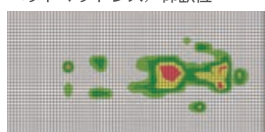

身体全体で支えていた体重が、頭側挙上により臀部に集中し、
高い接触圧力を示します。

自動ヘッドアップ対応機能により圧切替を静
止し、角度に応じた内圧に自動調整します。

エアマスター ビッグセル インフィニティ

840 (CR-550) サイズ:幅84×長191×厚17cm
900 (CR-555) サイズ:幅90×長191×厚17cm
840 / SHORT (CR-553) サイズ:幅84×長180×厚17cm
900 / SHORT (CR-557) サイズ:幅90×長180×厚17cm
エアマットレス・エアポンプ・
専用カバーセット 194,000円(+税)

1000 (CR-559) サイズ:幅100×長191×厚17cm
エアマットレス・エアポンプ・
専用カバーセット 214,000円(+税)

3年間保証 マットレス、エアポンプ

介護保険／福祉用具貸与対象品目
TAISコード:00206-000074
サイズ別のTAISコードはP.47を
ご覧ください。



エアマスター ビッグセル インフィニティ プラス

840 (CR-561) サイズ:幅84×長191×厚17cm(足元のみ厚18cm)
900 (CR-565) サイズ:幅90×長191×厚17cm(足元のみ厚18cm)
840 / SHORT (CR-563) サイズ:幅84×長180×厚17cm(足元のみ厚18cm)
900 / SHORT (CR-567) サイズ:幅90×長180×厚17cm(足元のみ厚18cm)
エアマットレス・エアポンプ・
プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット 214,000円(+税)

1000 (CR-569) サイズ:幅100×長191×厚17cm(足元のみ厚18cm)
エアマットレス・エアポンプ・
プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット 234,000円(+税)

3年間保証 マットレス、エアポンプ

1年間保証 プラス専用パッド Aタイプ

介護保険／福祉用具貸与対象品目
TAISコード:00206-000076
サイズ別のTAISコードはP.47を
ご覧ください。



■ マットレスの構造



リスクの高い踵部への対策
3層式縦長エアセル
足元部分には高齢者の踵サイズを考慮し、幅
の狭い5.3cmの3層式縦長エアセルを採用。
使用位置や身長の影響を受けない新構造で、
膝下をきめ細かくやわらかく支えることで踵
部に加わる圧力を解放します。

高度な骨突出部位やずれに対応
2層式エアセル
頭部や腰部には厚み15cmの2層式エアセルを
採用。骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、
ずれや摩擦の軽減に優れた性能を発揮します。

高性能な専用カバー

防水 透湿 制菌 伸縮 防災 機能



三次元
スプリング構造体
プレスエア[®]
メッシュカバー

独自の換気システムで快適な寝床内環境に


5 ムレ対策機能

マット内にエアを循環させ、熱と湿気をマットの外に排出。
ムレやすい寝床内を快適に保ちます。



透湿性カバー&底面通気構造

身体の熱と湿気をマットレス内に透過して下面から排気。
ベースマットの「プレスエア[®]」が換気効率を向上。

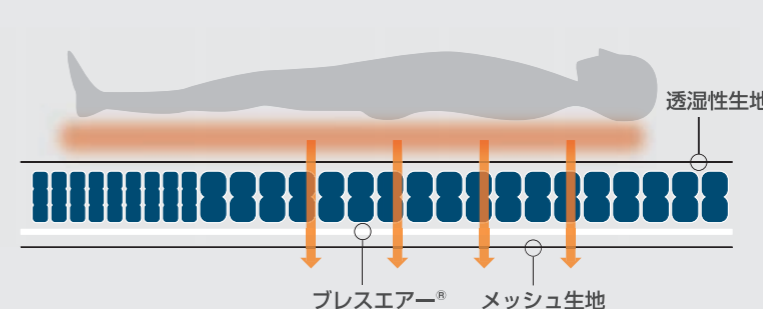

停電時も、万ーコンセントが外れた時も安心

6 停電対策／メモリ機能 オート機能

特殊なバルブ(電磁弁)がエアセ
ル内の空気漏れを自動で遮断。
(約14日間エアマットレス内圧保持)

メモリ機能により電源復旧後は
直前の設定に自動復帰します。
(体重設定などの再設定が不要)



充実した安全機能

7 光サイン／警告音 オート機能

動作状況が一目で分かり、異常時には光サイン
が赤く点灯し、警告音でお知らせします。



寝床内環境の「ひえ」に対応する

プラス専用パッド

専用マットレスの足元部分に組み込まれたプ
ラス専用パッドがエア
マットレス内の「ひえ」を
防ぎます。
(インフィニティプラスに
搭載)



Air Master TRICELL.E

エアマスター トライセルE


看護現場の負担を軽減するディテール設計。
スタイリッシュなデザインの高機能型エアマットレス。

上敷840 (CR-330) サイズ:幅84×長192×厚10cm
上敷900 (CR-333) サイズ:幅90×長192×厚10cm

エアマットレス・エアポンプ・専用カバーセット **128,000円(+税)**

3年間保証 マットレス、エアポンプ

介護保険/福祉用具貸与対象品目
上敷840 TAISコード:00206-000129 上敷900 TAISコード:00206-000130

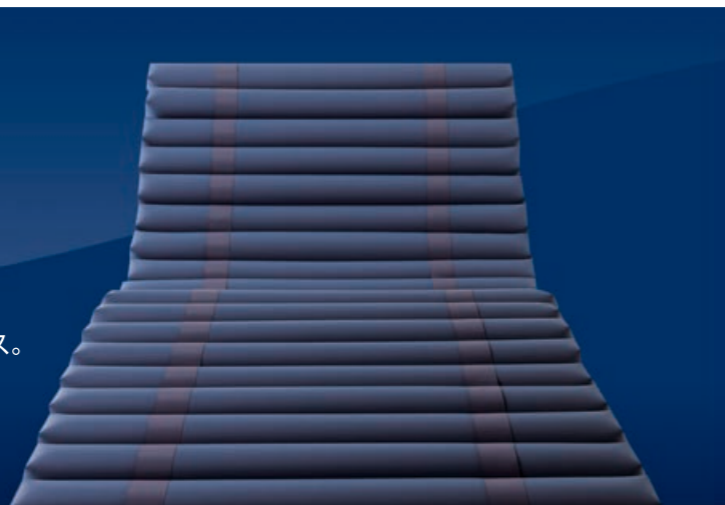

*下のベッドマットレスは別売です。


ベッド背上げ時のエアマットレスのずり落ちを防ぐ

アジャスト付き固定フード

ベッドマットレスにかぶせるだけの簡単設計。
エアマットレスがずり落ちないから、
療養者も快適。




厚さ3~10cmの
ベッドマットレスに
対応

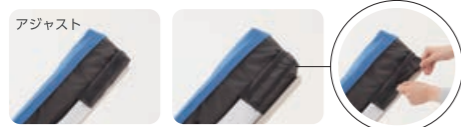


快適性がさらにアップしたエアマットレス

マットレスの構造

凸凹感の少ないエアマットレス/ヒートビルドアップ現象を
抑える換気機能。

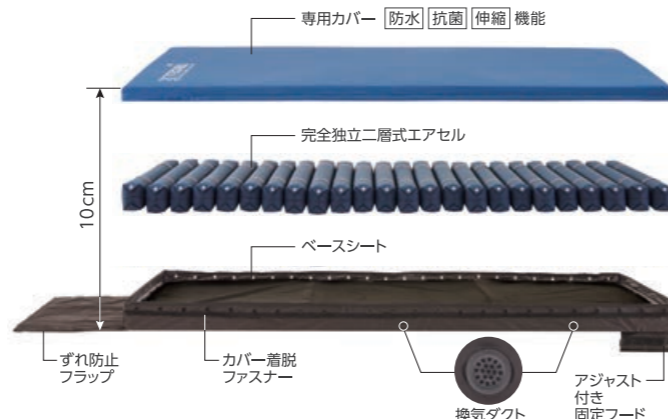

簡単操作の高性能小型ポンプ

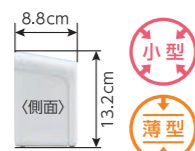

体重設定
体重設定の範囲が、20 kg~90 kgに広がりました。小柄な方にも安心してお使いいただけます。



カバーフリー
落下などでカバーを壊す心配がなく、取り扱いやすくなりました。

背上げモード
呼吸管理、経管栄養やお食事などで、長時間背上げをして過ごされる方に、背上げモードのボタンを押すと自動でやわらかさを調整します

使用開始目安 約1分30秒
背上げモードオートオフ 2時間

停電対策機能/メモリ機能

ベッド移動など電源コンセントを抜いた時や停電の時、エアマットレスの空気漏れを自動で防ぎます。





停電対策機能付き
約14日間エアマットレスの内圧を保持。

電源コンセントを差し戻した時は、直前の体重設定に自動復帰します。



光って知らせる安全対策機能

光サインで動作状況が一目でわかります。

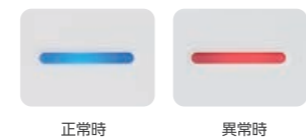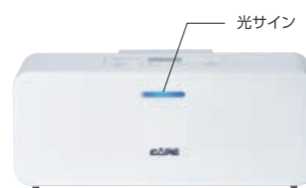

AIR DOCTOR

エアドクター

2018
RENEWAL

シンプルな操作で適正な圧力管理。
床ずれ防止エアマットレスのベーシックモデル。

840 (CR-238) サイズ:幅84×長192×厚9cm
900 (CR-268) サイズ:幅90×長192×厚9cm

エアマットレス・エアポンプ・専用カバーセット **97,000円(+税)**

3年間保証 エアポンプ

介護保険/福祉用具貸与対象品目
TAISコード:00206-000014



*下のベッドマットレスは別売です。

簡単操作で最適な
床ずれ防止環境をつくる

圧力センサーによる内圧自動制御システム


体重設定ダイヤルを療養者の体重に合わせるだけの簡単操作。エアセルの内圧をエアポンプ内蔵の圧力センサーが電子制御し、療養者の体重に合わせた理想的な体圧分散環境を作り出します。



身体を支えるポイントを変えながら
圧を開放する

交互膨縮システム

20本のエアセル(空気の筒)が交互に膨張・収縮を繰り返し、体圧が特定箇所に加わり続けることを防ぎます。

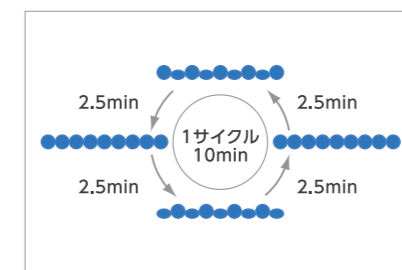

省スペースデザイン

薄型ポンプ

居住空間を意識した薄型設計。
フットボードにかけやすいポンプフック仕様。



小型 **薄型**

停電時など、いざという時の

安全対策


停電などの時、マットレス内の空気漏れを防ぐ「送風チューブ栓」を装備。
マットレスのパンクや内圧低下を電源ランプの点滅でお知らせする内圧警告機能を搭載。



防水機能と優れた伸縮性

防水、抗菌、防臭、伸縮カバー

カバーは、お手入れが簡単な清拭タイプ。
体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。

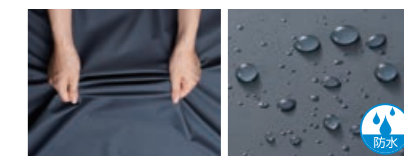

防水 **抗菌** **防臭** **伸縮** 機能

急速ポンプKURO®
エアマットレス専用急速ポンプ

約30秒でエアマットレスの充填が完了。
送風・吸引の両方の機能を保有。
この1台でエアマットレスの設置・撤収に
対応できます。

[対応機種]

- ① ラグーナ ネクサスR ビッグセルインフィニティ
- ② ネクサス
- ③ トライセルE エアドクター



タイプ/品番: CH-320
価格 : オープン価格
サイズ : 幅22.0×高18.1×奥行9.6cm
(アタッチメント装着時/幅25.7×高18.1×奥行9.6cm)
付属品 : アタッチメント丸型・角型・専用フィルター(2枚)

- ① アタッチメント丸型(CH-320付属品)
- ② アタッチメント角型(CH-320付属品)
- ③ アタッチメント3連型(別売) ※シリコンキャップ1個付き




トライセルEには③のシリコンキャップを外してお使いください。

風量計セット

エアポンプの風量が適正に供給できているか
測定できます。

全てのエアマットレスにご使用いただけます。

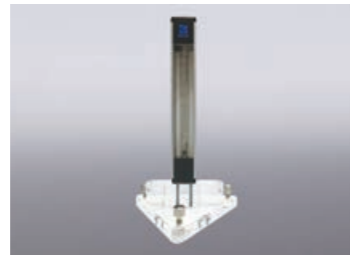

タイプ/品番: CH-317
価格 : オープン価格

風圧計セット

エアポンプの風圧が適正に供給できているか
測定できます。

全てのエアマットレスにご使用いただけます。



タイプ/品番: CH-318
価格 : オープン価格

キャリーバッグ

マットレスとポンプがコンパクトに収納でき、
持ち運びが楽に行える肩掛けバッグです。

[対応機種]

- ラグーナ ネクサス ネクサス1000 ネクサスR
- ビッグセルインフィニティ ビッグセルEx
- アクティ トライセル トライセルE
- フローラ/S



※写真はCH-235

タイプ/品番: アクティ、トライセル、トライセルE、ビッグセルEx上敷、
ネクサス用/CH-235
価格 : 5,000円(+税)
サイズ : 幅100×高60cm
カラー : 紺


タイプ/品番: ラグーナ、ビッグセルインフィニティ、ネクサスR、
ビッグセルEx交換、フローラ/S、ネクサス1000用/CH-243
価格 : 10,000円(+税)
サイズ : 幅110×高75×奥行35cm
カラー : グレー

洗濯栓

エアマットレスを洗濯する際、
送風チューブからの水の侵入を防ぎます。

[対応機種]

- ラグーナ
- ネクサス ネクサスR
- ビッグセルインフィニティ
- アクティ トライセル

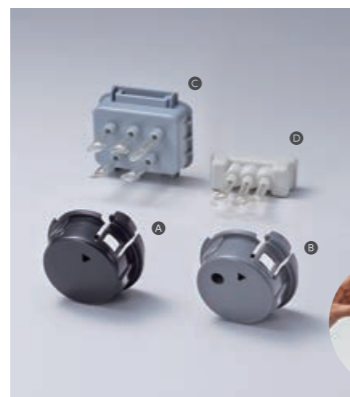

- A タイプ/品番: ラグーナ用/CH-258
価格 : 1,800円(+税)
- B タイプ/品番: ビッグセルインフィニティ、ネクサスR用/CH-244
価格 : 1,800円(+税)
- C タイプ/品番: ネクサス用/CH-245
価格 : 1,800円(+税)
- D タイプ/品番: アクティ、トライセル用/CH-247
価格 : 各種960円(+税)

使用例(ラグーナ用/CH-258)

送風チューブ栓

エアマットレス(上敷きタイプ)を
標準サイズからショートサイズにできます。

[対応機種]

- アクティ トライセル エアドクター
- ビッグセルEx上敷



タイプ/品番: CH-316
価格 : 100円(+税)



ロングベッド用スペーサー

ロングベッドとエアマットレスの足元の
隙間を埋めるスペーサーです。

[対応機種]

- ビッグセルインフィニティ



タイプ/品番: ビッグセルインフィニティ用/CH-359
価格 : 10,500円(+税)
サイズ : 幅90×奥行13×厚17cm




交換マットレス

上敷マットレスのベースにぴったり
の薄型ウレタンマットレスです。

[対応機種]

- アクティ トライセル トライセルE エアドクター
- ビッグセルEx

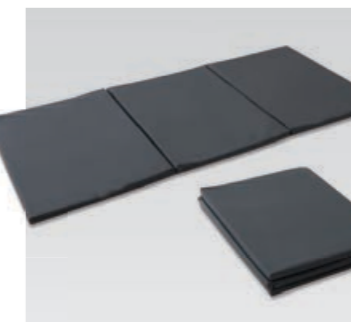

タイプ/品番: 標準840/CH-313
価格 : 22,000円(+税)
サイズ : 幅84×長192×厚3cm
TAISコード : 00206-000049

タイプ/品番: ワイド900/CH-314
価格 : 22,000円(+税)
サイズ : 幅90×長192×厚3cm
TAISコード : 00206-000049

※本マットレス単体でのご使用は避けて下さい。

プラス専用パッド

エアマットレス内部のひえを防ぎます。
3段階の調整ができるコントローラーが
付いています。

[対応機種]

- ネクサスR プラス
- ビッグセルインフィニティ プラス
- ラグーナ プラス



タイプ/品番: ネクサスRプラス用/CR-659
価格 : 20,000円(+税)
サイズ : 幅60×長60×厚1cm

タイプ/品番: プラス専用パッド Aタイプ/CR-549
価格 : 20,000円(+税)
サイズ : 幅60×長60×厚1cm

タイプ/品番: ビッグセルインフィニティ用/CR-549
価格 : 20,000円(+税)
サイズ : 幅60×長60×厚1cm

ネクサスRポンプ専用スタンド

ネクサスRのポンプを床に立てて設置する際は
専用スタンドをご使用ください。

[対応機種]

- ネクサスR



タイプ/品番: CH-661
価格 : 1,000円(+税)
サイズ : 幅9.3×奥行15×高さ7.4cm

使用例