

ケープ介助グローブを使った看護ケア

使い方の動画を公開中



ベッド背上げ後の背抜きケアに



ベッドの背上げ後に、療養者の背部を中心に「ずれ力」を取り除き、療養者の不快感や床ずれ発生の外的要因である「ずれ」を軽減します。

ポジショニング後のケアに



体位変換やポジショニングを行った後に、身体にかかった「ずれ力」や姿勢バランスを整えます。

ポジショニングピロー・クッションを使った看護ケア

使い方の動画を公開中



専用のピローやクッションを使って、療養者の姿勢サポートや体位変換を行い、床ずれの防止や拘縮などへの対策を行います。ポジショニングを行うことは、身体面だけではなく、快適性の向上、車いす上での座位など療養生活のサポートにも役立ちます。



滑りやすい素材でスムーズに身体の下に手を差し込むことができます。

ケープ介助グローブ



p.37



衛生的な使い捨てタイプの介助グローブです。

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ



p.37



豊富な形状とサイズ、様々な体位のポジショニングでお使いいただけます。

ロンボポジショニングピロー&クッション



p.38




固形のウレタンフォームより柔らかく、身体に沿ってサポートします。

サポタイト



p.42

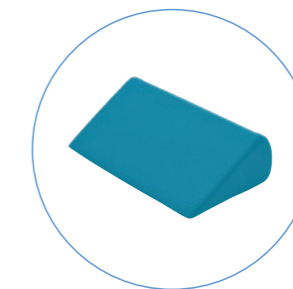

固形のウレタンフォームで側臥位の体位をしっかりサポートします。

フィットサポート



p.42

ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。
滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にもやさしい介助を実現。

滑りやすい素材を使用


滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。
装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。

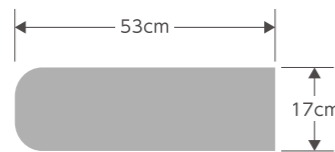

背上げ(頭側挙上)時のずれ解消ケアに



ベッド上のポジショニング時に

ケープ介助グローブ

品番/CK-388
サイズ/フリーサイズ(幅17×長53cm)
材質/ナイロン100%

1セット2枚入り 価格 2,000円(+税)
10セットパック 価格 19,000円(+税)

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

使いやすく衛生的な使い捨てタイプ

2020
NEW

感染対策に

安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ




フラップ構造

身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

手が抜けにくいポケット構造

ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。

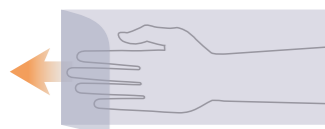

背上げ(頭側挙上)時や
ポジショニング時のずれ解消ケアに

二つ折りパッケージ

場所を取らないコンパクトなパッケージ。片手で一枚ずつ取り出せます。



ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

品番/CK-498
サイズ/フリーサイズ(幅18×長58cm)
材質/ポリエチレン

枚数/1箱50枚入り
価格 2,000円(+税)

姿勢体位管理補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション




ドイツのテクノロジーを凝縮した、
豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」。
2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。

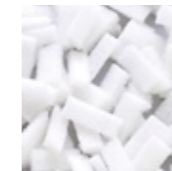

RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっとり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。




さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ

洗濯可能でいつも清潔



下肢屈曲拘縮などにも、クッションを組み合わせるとサポート。

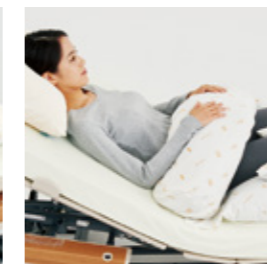


素材が軽いので、身体にクッションを乗せても安心です。



車いす座位のサポートにも対応。



素材の特性を活かした使用方法

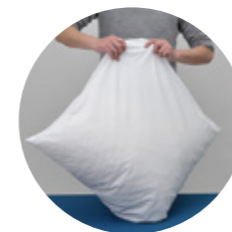

[振る]

ピローを振ることで、中身の厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。



[入れる]

大きなピロー(RF5)に小さなピロー(RF3)を入れることでボリュームがアップ。より安定感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。

RHOMBO FILL ロンボフィル

RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm) 枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm) 沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。





RF5 (80×80cm) サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。



POINT! RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。


RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H (クッション本体：65×75cm、ハンドル部：4×12cm) 平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。

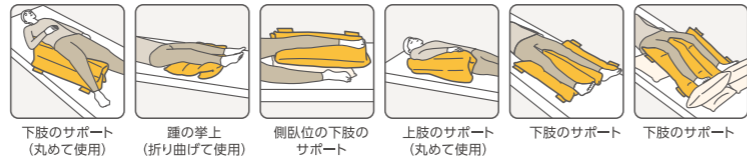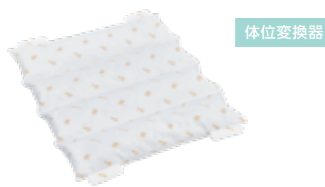


POINT! スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H (クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm) フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。

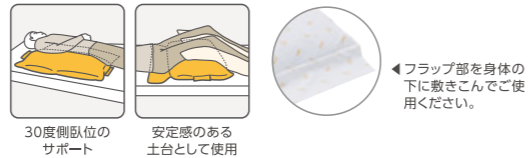

RM3 (15×30cm) 小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ (小さな体位変換) にも使用できる小型クッション。

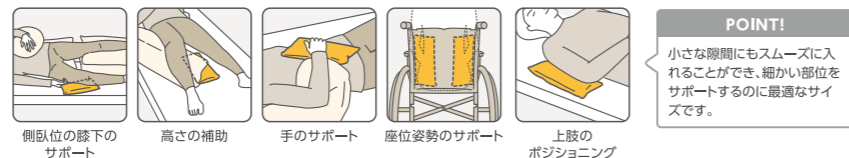

POINT! 小さな隙間にもスムーズに入れることができ、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

RM4-H (クッション本体：30×65cm、ハンドル部：4×12cm) 関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



RM5 (Φ12×250cm) 1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



スネーククッション (Φ20×220cm) 1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



POINT! 側臥位に使用すると、頭から胸部・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入れると、それがさびとなり、背中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。

スネークミニクッション (Φ20×100cm) さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



RM6-H (クッション本体：62×65×15cm、ハンドル部：4×12cm) 高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。 NEW



RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション (40×45cm) 背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



POINT! 両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体になじみ、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

QRコードからバックサポートクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。
https://www.cape.co.jp/products/pdt019



ポジショニング用具



本体				オプションカバー		
タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材質	品番	価格(+税)
RF1	00245-000193	5,000円	40×60	表側地／ 綿50%、 ポリエステル50%	通気 RF1/RF4C	4,000円
RF2	00245-000194	6,500円	40×80		防水 RF1/RF4CB	4,600円
RF3	00245-000195	5,500円	23×40		通気 RF2C	4,000円
RF4	00245-000196	11,000円	40×60		防水 RF2CB	4,600円
RF5	00245-000197	13,000円	80×80		通気 RF3C	2,000円
RM1-H	00245-000232	14,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	中身(充填物)／ ロンボフィル(ポリウレタ ンスニペット)	防水 RF3CB	2,300円
RM2-H	00245-000233	14,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12		通気 RM1/RF4C	4,000円
RM3	00245-000200	2,700円	15×30		防水 RM1/RF4CB	4,600円
RM4-H	00245-000234	7,500円	本体 30×65 ハンドル部 4×12		通気 RF5C	5,500円
RM5	00245-000154	15,000円	Φ12×250		防水 RF5CB	6,300円
スネーククッション	00245-000102	25,000円	Φ20×220	表側地／ 綿50%、 ポリエステル50%	通気 RM1C	5,000円
スネークミニクッション	00245-000152	16,000円	Φ20×100		防水 RM1-HCB	5,700円
RM6-H	00245-000245	18,800円	62×65×15 ハンドル部 4×12		通気 RM2C	5,000円
バックサポートクッション	00245-000168	14,500円	40×45		防水 RM2-HCB	5,700円
初期導入セット	00245-000103	53,000円	[セット内容] RF1, RF3(×2), RF5, RM1-H, RM2-H		通気 RM3C	1,500円
				中身(充填物)／ ロンボメッド(ポリウレタ ンスニペット50%、ポリ プロピレンビーズ50%) ※RM6-Hのみ ロンボメッドの下層に 内部ウレタンフォーム (ウレタンフォーム)	防水 RM3CB	1,700円
				表側地／ 綿50%、 ポリエステル50%	通気 RM4C	4,500円
				中身(充填物)／ ロンボフィル、ロンボメッド	防水 RM4-HCB	5,100円
					通気 RM5C	5,000円
					防水 RM5-HCB	5,700円
					通気 SNC	6,000円
					防水 SN-HCB	6,900円
					通気 SNC mini	4,000円
					防水 SN-HCB mini	4,600円
					通気 RM6C	5,800円
					防水 RM6-HCB	6,600円
					通気 BSC	4,500円
					防水 BSCB	5,100円

※サイズについて：本体サイズは、製造元のドイツ・リューク社の基準に従って、中身を充填する前の生地寸法にて記載しています。そのため実商品で寸法計測した場合には、大きさが表記サイズと異なります。



防水カバーにハンドルが付きました。
(対象商品) RM1-HCB, RM2-HCB, RM4-HCB,
RM5-HCB, RM6-HCB, SN-HCB,
SN-HCB mini

体位変換器 介護保険/福祉用具貸与対象品目

本体の持ち手を使い、介助者が楽に体位変換できる便利なアイテム

●本体(クッション)のみ	TAISコード
RM1-H	00245-000232
RM2-H	00245-000233
RM4-H	00245-000234
RM5	00245-000154
RM6-H	00245-000245
スネーククッション	00245-000102
スネークミニクッション	00245-000152

●本体(クッション)と防水カバーのセット	TAISコード
ロンボ RM1-H 防水カバーセット	00206-000133
ロンボ RM2-H 防水カバーセット	00206-000134
ロンボ RM4-H 防水カバーセット	00206-000135
ロンボ RM5 防水カバーセット	00206-000139
ロンボ スネーククッション 防水カバーセット	00206-000137
ロンボ スネークミニクッション 防水カバーセット	00206-000138
ロンボRM6-H防水カバーセット	00206-000145

サポタイト

大小種類の違うウレタンフォームチップで固形のウレタンフォームより柔らかく、滑らかに身体の形に沿ってサポートします。




丸洗い OK
乾燥機 80℃
80℃の丸洗い洗濯と乾燥が可能



	枕として、局所のサポートに	側臥位のサポートに	上肢のサポートに	側臥位の背部・下肢のサポートに				
タイプ	標準枕	三角枕	ブーメラン	側臥位セット 三角枕×1、 標準枕×2				
品番	CK-430	CK-431	CK-432	CK-433				
サイズ	約23×34cm	約60×24cm	約54×83cm	標準枕：約23×34cm/三角枕：約60×24cm				
価格	5,600円(+税)	9,800円(+税)	13,000円(+税)	21,000円(+税)				
TAISコード	00206-000098	00206-000099	00206-000100	00206-000101				
材質	<table border="1"> <tr> <td>カバー</td> <td>ポリエステル65%、綿35%</td> </tr> <tr> <td>中身</td> <td>ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)</td> </tr> </table>				カバー	ポリエステル65%、綿35%	中身	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)
カバー	ポリエステル65%、綿35%							
中身	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)							

肌触りのよいオプションカバー(別売) 洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでご用意しています。

	品番	標準枕用/CH-440	三角枕用/CH-441	ブーメラン用/CH-442
通気	価格	2,500円(+税)	4,600円(+税)	5,000円(+税)
	材質	ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)		
防水	品番	標準枕用/CH-450	三角枕用/CH-451	ブーメラン用/CH-452
	価格	2,900円(+税)	5,200円(+税)	5,700円(+税)
	材質	表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)		

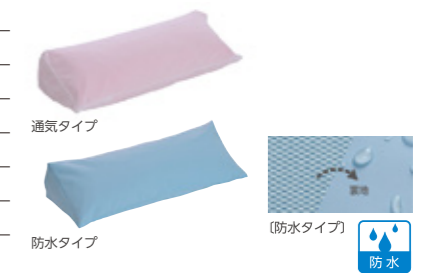

フィットサポート


30度側臥位のポジショニングをサポートする

通気性に優れた特殊ウレタンフォーム
超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。
丸洗いでできます。



丸洗い OK

超通気 ウォッシュابل

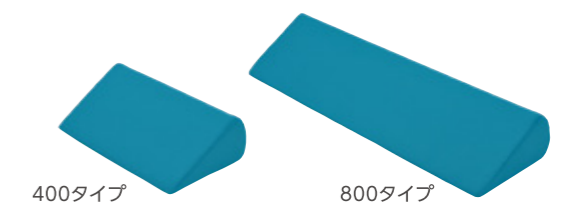

専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地
(洗濯できます)



タイプ	400タイプ	800タイプ				
品番	CK-396	CK-397				
サイズ	幅40×奥行24×厚12cm	幅80×奥行24×厚12cm				
価格	5,400円(+税)	8,800円(+税)				
TAISコード	00206-000059	00206-000060				
材質	<table border="1"> <tr> <td>カバー</td> <td>ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)</td> </tr> <tr> <td>中身</td> <td>超通気高弾性ウレタンフォーム</td> </tr> </table>		カバー	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)	中身	超通気高弾性ウレタンフォーム
カバー	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)					
中身	超通気高弾性ウレタンフォーム					
専用カバーのみ購入価格	2,600円(+税)	3,400円(+税)				

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シーツ

専門分野

ウレタンフォームマットレス

車いす用
クッション

ポジショニング用具

携帯型
接触圧力測定器