


特殊寝台付属品／体圧分散式ベッドマットレス

ミルフィ

取扱説明書

交換タイプ

ベッドの上に
そのまま敷いて
ご使用ください。

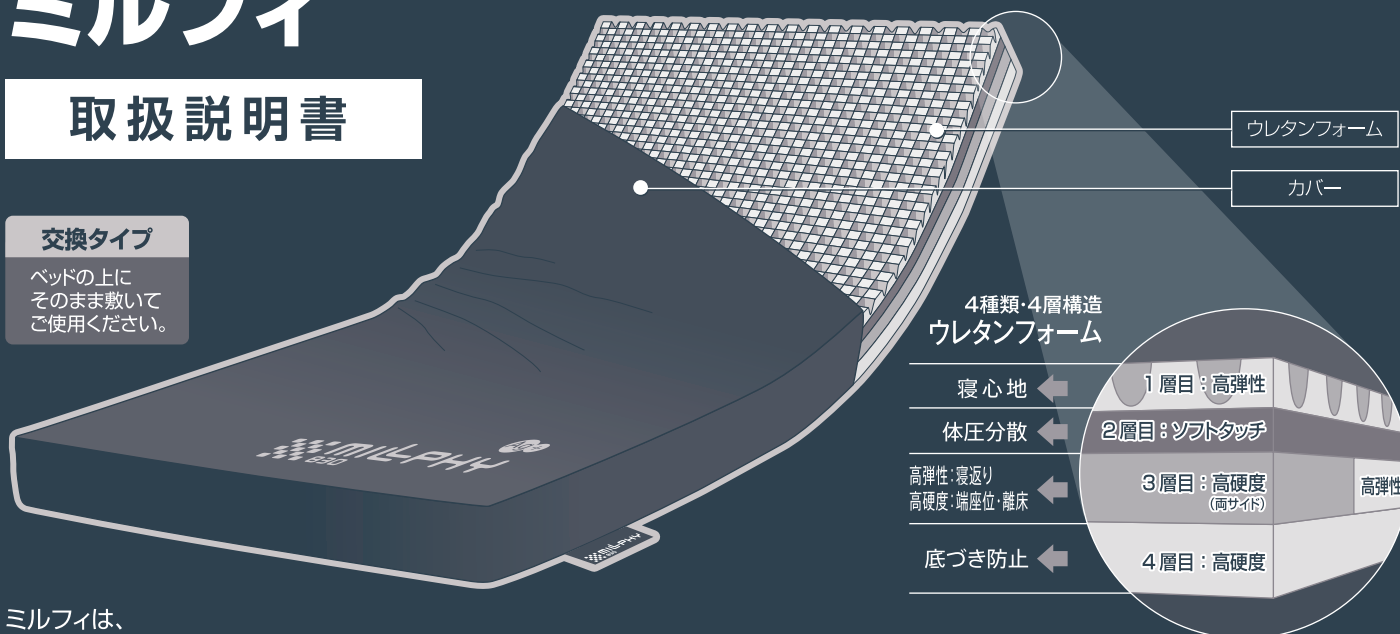

ミルフィは、
しっかりとした安定感があり、寝心地がよく、動きやすいウレタンフォームマットレスです。
独自の4層構造による体圧分散性能とケアのしやすさで、療養者のQOLを向上させます。

※カバー取り付け時は、凹凸面が
上にくるようにセットしてください。

安全にお使いいただくために

ウレタンフォームマットレスの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

ウレタンフォームマットレスのご使用中に生じる可能性のある事故を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを
予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。
従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



警告：このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。
特に重要なため、下記「警告1」、「警告2」にまとめて記載します。



1 ウレタンフォームマットレスは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。
心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。



2 ウレタンフォームマットレスのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。
またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。
病状悪化や事故の恐れがあります。

使用上のご注意

- ご使用になる前に、マットレス上面に異物がないかご確認ください。
異物があるままで使用するとケガをしたり、事故の原因になる恐れがあります。
- ご使用の際は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。
サイドレールを取り付けずにマットレスを使用すると、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- 突起物がある場所にマットレスを敷いて使用しないでください。
- ロゴプリントがある面を上にして、ベッド（または床・畳など）にそのまま敷いて使用してください。
- 専用カバーを被せた状態で使用してください。
- マットレス上面に厚手のパッド等を敷かないでください。体圧分散効果を妨げる場合があります。
- マットレスの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できないばかりか、破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位で使用してください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- ストーブなどの火に近づけたり、マットレスの上での喫煙はお止めください。火災の原因になります。
- 新品でおいがする場合、構成している材料のにおいであり異常ではありませんが、気になる場合は、
カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、においが軽減します。
- ウレタンフォームに「永久歪み（ヘタリ）」や「破れ」などの破損が見られた場合は、交換をおすすめします。

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

カバー

洗濯 (カバーは取り外して洗濯してください)

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル (洗濯ラベル) をご参照ください。

- 汚物 (汚れ、便、血液等) を取り除いてください。
- 洗濯機で弱水流洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- 低い温度でのタンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。



防水カバーを洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まることにより、洗濯機に負荷が掛かり故障や異常振動による転倒事故を招く危険があります。お客様の都合により洗濯機を使用される場合は、防水部分に溜まった水を大きめに取り除いた上で、脱水を行ってください。



- カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- 乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ドライクリーニング (石油系は除く)、オートクレープは表面のポリウレタン樹脂を傷めますので使用しないでください。
- アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。

清拭

- 汚物 (汚れ、便、血液等) を取り除いて、水または、中性洗剤を水で薄めたものでマットレスの表面を拭いてください。
- 消毒用エタノールを使用する場合は濃度 70%以上 83%以下、次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は濃度 1,000ppm (0.1%) 以下での清拭が可能です。



●次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、使用する次亜塩素酸ナトリウム液の使用法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。

●消毒液を利用した空間噴霧は、目や皮膚などへの刺激、および吸入により人体へ影響を及ぼす可能性があります。取扱いには十分ご注意ください。

※使用可能な消毒薬一覧 (カバー)

- 塩化ベンザルコニウム 0.5%以下
- 塩化ベンゼトニウム 0.5%以下
- グルコン酸クロロヘキシジン 5%以下
- IGB 液 (イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒド、緩衝剤)
- MR ガス
- オゾンガス 0.5ppm 以下
- ホルムアルデヒドガス
- 過酸化水素水 3% 以下

使用不可

- クロロホルム
- クレゾール
- シンナー
- ベンジン
- トルエン
- メチルエーテル

ウレタンフォーム

洗浄・消毒に対応しておりません。

療養者の発汗などにより、マットレス内部には徐々に湿気が溜まります。

カビ等の原因になるため、定期的にカバーを取り外して半日程度の日陰干しを推奨致します。

※ウレタンが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。

運搬方法

ベルトに腕を通し、ハンドル部を握ってください。



保管方法について

- 圧縮された状態や曲げた状態での保管は避けてください。「亀裂」や「永久歪み (ヘタリ)」の原因となります。
- 上に重いものを置かないでください。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。
- 高温・多湿の場所は避けてください。

マットレスサイズの識別方法

- カバー上面プリント・タグに表記しています。
- カバーのファスナー色でも確認できます。

830 タイプ : 濃紺色
900 タイプ : 緑色
830/SHORT タイプ : 灰色
900/SHORT タイプ : 赤色

仕様

セット	タイプ/品番	830/CR-362	900/CR-363	830/SHORT/CR-364	900/SHORT/CR-365
	サイズ	幅83×長191×厚10cm	幅90×長191×厚10cm	幅83×長180×厚10cm	幅90×長180×厚10cm
	重量	5.7Kg	6.1Kg	5.4Kg	5.7Kg
	マットレス材質	1層目: 高弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工) 2層目: ソフトタッチウレタンフォーム 3層目: 高弾性ウレタンフォーム 3層目サイド: 高硬度ウレタンフォーム 4層目: 高硬度ウレタンフォーム			
専用カバー	品番	CH-366	CH-367	CH-368	CH-369
	カバー材質	<上面・側面> ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・伸縮) <下面> ナイロンオックス			