

サポタイト専用カバー（通気／防水）

洗浄・消毒方法について

《材質》

【通気タイプ】 ポリエステル 100%（吸汗速乾・静電防止）

【防水タイプ】 表地/ポリエステル 100%（吸汗速乾・制菌・消臭）

裏地/ポリウレタンフィルム（防水）

《お手入れ方法》

- ・ 40度までの水温で、弱水流による洗濯機洗いが可能です。
- ・ 洗濯ネットをご使用ください。
- ・ 軽く脱水した後、陰干ししてください。
- ・（防水タイプ）アイロン掛けはできません。
- ・（通気タイプ）アイロンは低温にて当て布を使用してください。
- ・ 乾燥機を使用する場合は上限温度 80℃以下に設定してください。
- ・ 洗剤は中性洗剤をおすすめします。

※乾燥機使用時の注意事項

- ・ タンブル内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・ 最後に自然乾燥を行ってください。

※その他

- ・（通気）生地 특성上、洗濯により多少の縮みが生じます。
- ・（防水）洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まり、異常振動が発生する場合があります。防水部分に溜まった水を取り除いたうえで軽く脱水を行ってください。
- ・ お客様の都合により『業務用』で塩素系漂白剤を使用する場合は 400ppm 以下でご使用ください。
※塩素系漂白後は十分なすすぎを行ってください。

※塩素系漂白を行う場合は、使用する漂白剤の使用法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。

《消毒について》

[推奨する消毒薬品]

オゾンガス (0.5ppm 以下)、ホルムアルデヒドガス、MR ガス、消毒用エタノール、過酸化水素水 (3%以下)、次亜塩素酸ナトリウム (400ppm 以下)、5%グルコン酸クロルヘキシジン、0.5%塩化ベンゼトニウム、0.5%塩化ベンザルコニウム、IGB 液

[使用できない消毒薬品]

メチルエーテル、クロロホルム、クレゾール、ベンジン、トルエン、酸化エチレンガス

以上