

【 業務用 】

ロンボポジショニングクッション専用カバー（通気／防水）および

エニモ専用カバー（通気／防水）のお手入れ方法について

《材質》

- 【 通気タイプ 】 ポリエステル 100%（吸汗速乾・静電防止）
- 【 防水タイプ 】 表地/ポリエステル 100%（吸汗速乾・制菌・消臭）
裏地/ポリウレタンフィルム（防水）

《お手入れ方法》

- ・40℃までの水温で、弱水流による洗濯機洗いが可能です。
- ・洗濯ネットをご使用ください。
- ・軽く脱水した後、陰干ししてください。
- ・【 通気タイプ 】 アイロンは低温で当て布を使用してください。
- ・【 防水タイプ 】 アイロン掛けはできません。
- ・乾燥機を使用する場合は上限温度 80℃以下に設定してください。
- ・洗剤は中性洗剤を推奨します。

※乾燥機使用時の注意事項

- ・タンブル内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・最後に自然乾燥を行ってください。

※その他

- ・【 通気タイプ 】 生地特性上、洗濯により多少の縮みが生じます。
- ・【 防水タイプ 】 洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まり、異常振動が発生する場合があります。
防水部分に溜まった水を取り除いたうえで軽く脱水を行ってください。
- ・お客様の都合により、洗浄処理時に塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）を使用する場合は濃度 0.04%／400ppm 以下でご使用ください。（色落ち防止・防水性維持など材質保護のため）

※塩素系漂白剤使用後は十分なすすぎを行ってください。

※塩素系漂白剤を使用する場合は、使用する塩素系漂白剤の使用法、注意書きをよく確認したうえで
行ってください。

《消毒について》

【 消毒可能な消毒薬品（例） 】

消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、MR ガス、過酸化水素水、
グルコン酸クロロヘキシジン、塩化ベンゼトニウム、塩化ベンザルコニウム、IGB 液

【 使用できない消毒薬品 】

メチルエーテル、クロロホルム、クレゾール、ベンジン、トルエン、酸化エチレンガス

以上

【 業務用 】

ポジショニングクッション専用 清拭防水カバーのお手入れ方法について

対象商品： ●ロンボポジショニングピロー&クッションシリーズ
●エニモ Rモデル

《材質》 表地/ポリウレタンフィルム（防水）、裏地/ポリエステル 100%

《洗濯・乾燥方法》

- ・水温 80℃10分以下で弱水流による洗濯機洗いが可能です。
- ・洗濯ネットをご使用ください。
- ・洗剤は中性洗剤を推奨します。
- ・柔軟剤は使用できません。柔軟剤入りの洗剤は使用しないでください。
- ・軽く脱水した後、陰干ししてください。
- ・アイロン掛けはできません。

※乾燥機使用時の注意事項

- ・乾燥機を使用する場合は上限温度 100℃以下に設定してください。(推奨 80℃)
- ・タンブル内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・最後に冷却乾燥/自然乾燥を行ってください。
- ・ファスナーの開閉状態によって、乾燥に時間がかかる場合があります。その場合、ファスナーを開いた状態で乾燥して下さい。

※その他

- ・洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まり、異常振動が発生する場合があります。
防水部分に溜まった水を取り除いたうえで軽く脱水を行ってください。
- ・お客様の都合により、洗浄処理時に塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）を使用する場合は濃度 0.05% / 500ppm 以下でご使用ください。浸漬の場合は処理時間を 30 分以内にして下さい。
(色落ち防止・防水性維持など材質保護のため)

※塩素系漂白剤使用後は十分なすすぎを行ってください。

※塩素系漂白剤を使用する場合は、使用する塩素系漂白剤の使用法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。

※シミ汚れや色移りの影響を受けた場合、完全には落とすきれない場合があります。

《消毒方法》

*消毒用エタノール（濃度 70%以上 83%以下）での清拭が可能。

*次亜塩素酸ナトリウム液（濃度 0.1%/1,000ppm 以下）での清拭が可能。
（濃度 0.05%/500ppm 以下・30 分以内）での洗濯または浸漬が可能。

《清拭処理(例)》

- ・濃度 1,000ppm (0.1%) までに希釈した次亜塩素酸ナトリウム液を清拭用ワイプや柔らかい布に染み込ませてから清拭を行ってください。染み込ませたワイプ等はしっかりと絞ってください。
- *専用カバーに直接液体をかけないでください。
- ・清拭後は、5 分程経った後に水拭きを行い拭き上げてください。
水拭きは、消毒液を浸したワイプ等以外の物を使用し、水をしっかりと絞ってから行ってください。
- ・拭き上げ後は十分に自然乾燥を行ってください。
- ・次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、使用する次亜塩素酸ナトリウム液の使用方法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。

【 消毒可能な消毒薬品（例） 】

オゾンガス、ホルムアルデヒドガス、MR ガス、過酸化水素水、グルコン酸クロルヘキシジン、塩化ベンゼトニウム、塩化ベンザルコニウム、IGB 液

※各消毒剤は、消毒剤（商品）の取扱い方法・注意書きをよく確認したうえでご使用ください。

希釈濃度につきましては、消毒剤（商品）取扱い方法などに記載の用法・用量をご参考ください。

※消毒液を利用した空間噴霧は、目や皮膚などへの刺激、および吸入により人体へ影響を及ぼす可能性があるとしてされています。取扱いには十分ご注意ください。

※消毒液の種類によって、液シミや色移りの影響を受けることがあり、シミなどは完全に落とすきれない場合があります。

【 使用できない消毒薬品 】

メチルエーテル、クロロホルム、クレゾール、ベンジン、トルエン、酸化エチレンガス

以上