


ロンボポジショニングクッションシリーズ

取扱説明書


ご使用になる前に本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。




RF1/RF2

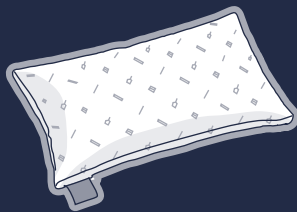

RF3/RF4

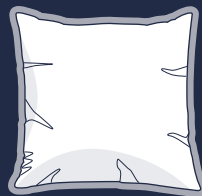

RF5

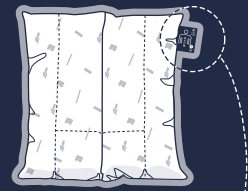

バックサポートクッション

ロンボポジショニングクッションは、
体位変換や姿勢保持に活用できる豊富な形とサイズのピロー & クッションです。
使用部位や用途に合わせてお選びいただけます。

車いすへの設置方法



このタグの面に
背中が当たるよ
うに設置してく
ださい。

安全にお使いいただくために

ロンボポジショニングクッションの取り扱いにあたっては本書をよく読んで
ご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

ロンボポジショニングクッションのご使用中に生じる可能性のある事故を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



このマークに従わずに使用された場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告します。

- 1 ロンボポジショニングクッションをご使用の際は、必ず専門家とご相談の上ご使用ください。使用中、身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止めてください。
- 2 ベッド上でロンボポジショニングクッションをお使いの場合は、ベッドからの落下、転落を防ぐために必ずサイドレールを取り付けてご使用ください。

使用上のご注意

- さまざまな大きさや形がありますので、体格や目的に合わせて適切に選択してください。相応しくない選択をすると十分な効果が得られないことがあります。
- 呼吸を妨げないよう配慮して設置してください。特に、うつ伏せや横向きの場合の顔付近の設置には注意してください。
- バックサポートクッションには、上・下、表・裏があります。車いす（背もたれ部）へ設置する際は、クッション側面にあるタグの表示通りに行ってください。クッションが正しく設置されないと十分な効果が得られないことがあります。
- 衣類やシーツにシワが寄らないようにクッションを設置してください。シワがあると床ずれの原因になる場合があります。
- 鋭利なものでキズや穴を開けないでください。万が一内容物が飛び出した場合はすぐに使用を中止し、内容物が口や鼻などに入らないよう注意してください。
- 火、または高熱になるものを商品の近くで使用しないでください。商品を破損させたり、火災の原因になる恐れがあります。
- 洗浄や保管をする場合は、本書や品質他表示タグの説明に従ってください。不適切な管理をすると、破損やカビの発生原因になるほか、耐久性が落ちることがあります。

お手入れ方法

洗浄方法

- ・ 水温 95℃ 以下で洗濯してください。
 - ・ 本品の損傷を軽減するため、洗濯ネットをご使用ください。
 - ・ 洗剤は中性洗剤をご使用ください。
 - ・ 洗濯槽にクッションが入らない場合は、やさしく手押し洗いを行ってください。
 - ・ 漂白剤、柔軟剤は使用できません。漂白剤や柔軟剤入りの洗剤にはご注意ください。使用する洗剤の注意書きをよくお読みください。
 - ・ 洗濯後十分に水気を取り除いてから形を整え、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
 - ・ 乾燥機を使用する場合は、100℃ 以下で乾燥してください。
 - ・ 乾燥機による乾燥後は形を整え、日陰の風通しの良い場所で自然乾燥を行ってください。
 - ・ タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
 - ・ ダニやカビ発生を防ぐため十分に乾燥させてください。
 - ・ 使用する前には本体が十分に乾燥しているか確認してください。
 - ・ オートクレープ滅菌は 105℃ まで可能です。
- ※リネン(洗濯)業者様へ依頼される場合は、上記条件でご相談ください。

保管方法

- ・ 圧縮された状態での保管は避けてください。破損や永久歪み(へたりの原因となります。
- ・ 上に重たいものを置かないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所は避けてください。

仕様

■RF シリーズ

	RF1	RF2	RF3	RF4	RF5
品番	RF21118	RF21119	RF32804	RF32818	RF21145
JAN	4939810005188	4939810005195	4939810005201	4939810005218	4939810005225
寸法 (cm)	40×60	40×80	23×40	40×60	80×80
材質	表側地：綿50%、ポリエステル50% 中身：ポリウレタンスニペット				

■RM シリーズ

	バックサポートクッション
品番	RM82663
JAN	4939810006697
寸法 (cm)	40×45
材質	表側地：綿50%、ポリエステル50% 中身：ポリウレタンスニペット・ポリプロピレンビーズの混合