



ロンボポジショニングクッションシリーズ

取扱説明書


ご使用になる前に本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

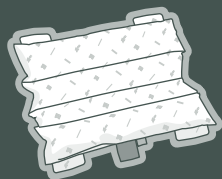


RM1-H 体位変換器

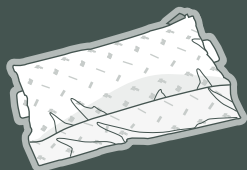

RM2-H 体位変換器

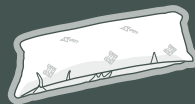


RM3

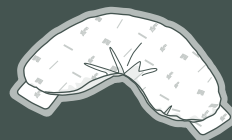

RM4-H 体位変換器




RM5 体位変換器

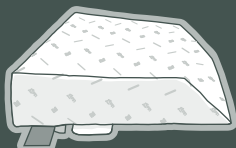

RM6-H 体位変換器



スネーククッション 体位変換器

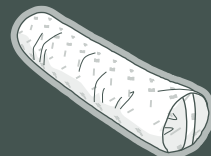

スネークミニクッション 体位変換器

ロンボポジショニングクッションは、体位変換や姿勢保持に活用できる豊富な形とサイズのピロー & クッションです。使用部位や用途に合わせてお選びいただけます。

安全にお使いいただくために

ロンボポジショニングクッションの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

ロンボポジショニングクッションのご使用中に生じる可能性のある事故を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



このマークに従わずに使用された場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告します。

- 1 ロンボポジショニングクッションをご使用の際は、必ず専門家とご相談の上ご使用ください。使用中、身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止めてください。
- 2 ベッド上でロンボポジショニングクッションをお使いの場合は、ベッドからの落下、転落を防ぐために必ずサイドレールを取り付けてご使用ください。

使用上のご注意

- さまざまな大きさや形がありますので、体格や目的に合わせて適切に選択してください。相応しくない選択をすると十分な効果が得られないことがあります。
- 呼吸を妨げないよう配慮して設置してください。特に、うつ伏せや横向きの場合の顔付近の設置には注意してください。
- 「RM6-H」はご使用時の設置方向があらかじめ決められています。上・下、前・後の向きにご注意ください。
- 衣類やシーツにシワが寄らないようにクッションを設置してください。シワがあると床ずれの原因になる場合があります。
- 鋭利なものでキズや穴を開けないでください。万が一内容物が飛び出した場合はすぐに使用を中止し、内容物が口や鼻などに入らないよう注意してください。
- 火、または高熱になるものを商品の近くで使用しないでください。商品を破損させたり、火災の原因になる恐れがあります。
- 洗淨や保管をする場合は、本書や品質表示タグの説明に従ってください。不適切な管理をすると、破損やカビの発生原因になるほか、耐久性が落ちることがあります。

注意事項（体位変換時）


- 必ず専門家とご相談の上、本商品をお使いください。
- あらかじめハンドルに解れ（ほつれ）などないか確認し、解れがある場合は使用しないでください。
※ハンドルに解れなどありましたら、お買い求めになった販売店にお問い合わせください。
- 「使用手順」をよくお読みになってお使いください。
- 「使用手順」にある「体位変換例」以外の体位変換での使用は避けてください。
- 無理に引っ張ったり、曲げたりして使用しないでください。
- 体位変換による転落を防止するために、あらかじめベッド柵（サイドレール）を設置してください。
- 体位変換を行う場合、まわりに危険物などがいないかをご確認ください。
- うつぶせ時や、頭部、顔の周囲に使用する場合は、呼吸の妨げにならないよう、ご使用ください。
- RM1-H、RM2-H、RM4-H、RM5、RM6-H、スネーククッション、スネークミニクッションの専用防水カバーには、ハンドルが付いています。防水カバーを装着後は、防水カバーのハンドルをご使用ください。
※付属品の専用カバーは別売りです。

使用手順


※はじめに体位変換がしやすいようにベッドを介護者の膝の高さまで上げておきます。
安全にお使いいただくためにベッドにサイドレールを取り付けてください。

RM1-H（65×75cm、ハンドル部：4×12cm）


体位変換例：（仰臥位から側臥位へ）下半身の回転を利用した体位変換

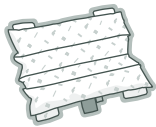

RM1-Hを下肢から臀部へ入れておきます。

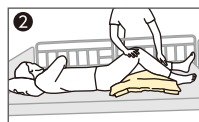


顔は寝返りをさせたい方向に向け、腕は寝返りをする方向と反対側を胸の上におきます。足は寝返りをする方向と反対側の膝を少し曲げておきます。

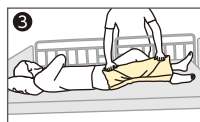

ハンドルをつかみ、ゆっくりと手前に引きまします。




ハンドルをつかみ、ゆっくりと手前に引き、下半身の回転を促します。

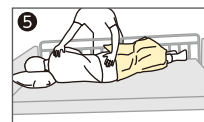

下半身の回転を促し、腰・肩の順番に体位変換を行います。

RM2-H（クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm）

体位変換例：（仰臥位から側臥位へ）膝の回転を利用した体位変換

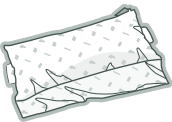

膝を立てて体位変換の準備をします。



準備したクッションの持ち手を持って立てた膝の下に入れ寝返りの準備をします。



ハンドルを持ってゆっくりと膝の回転を促します。



そのまま腰・肩の順番に回転を促して体位変換を行います。



クッションを外せば体位変換の終了です。

RM4-H（30×65cm、ハンドル部：4×12cm）

体位変換例：（仰臥位から側臥位へ）肩の回転を利用した体位変換



RM4-Hを頭と肩の下へ入れておきます。




顔は寝返りをさせたい方向に向け、腕は寝返りをする方向と反対側を胸の上におきます。左右のハンドルをつかみます。



ハンドルをつかみ、ゆっくりと手前に引き、肩の回転を促します。




ゆっくりと肩から腰への回転を促し寝返りを行います。

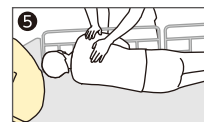

クッションを外せば体位変換の終了です。

RM5 (φ12×250cm)

体位変換例：(仰臥位から側臥位へ) 膝の回転を利用した体位変換

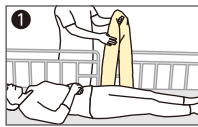


RM5 を 2 つに折って準備しておきます。



膝を立てて体位変換の準備をします。



準備したクッションのハンドルを持って立てた膝の下に入れ寝返りの準備をします。

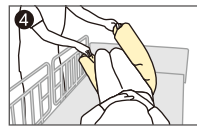



ハンドルを持ってゆっくりと膝の回転を促します。




そのまま腰・肩の順番に回転を促して体位変換を行います。

RM6-H (62×65×15cm、ハンドル部 4×12cm)


体位変換例：(仰臥位から側臥位へ) 肩・背中・腰の回転を利用した体位変換

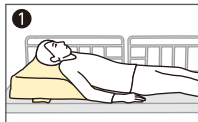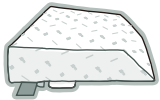


RM6-H を頭・肩・背中の下へ入れておきます。

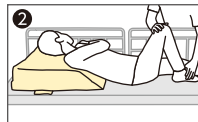


顔は寝返りさせたい方向に向け、腕は寝返りをする方向と反対側を胸の上におきます。足は寝返りをする方向と反対側の膝を立て、寝返りの準備をします。

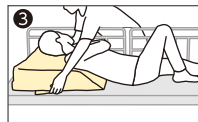

ハンドルを握み、ゆっくりと手前に引き寄せます。

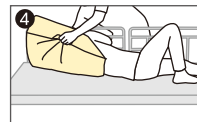

ゆっくりと肩から腰への回転を促し、寝返りを行います。

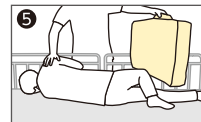

クッションを外せば体位変換の終了です。

スネーククッション (φ20×220cm)


体位変換例：(仰臥位から側臥位へ) 膝・腰・肩の回転を利用した体位変換



スネーククッションを頭から肩の下と、腰の下に入れておきます。




膝を立てて体位変換の準備をします。

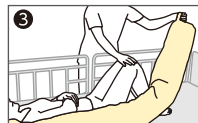

ハンドルをつかみ、身体に沿って膝までクッションを当てます。



ハンドルをゆっくりと手前に引いて膝の回転を促します。

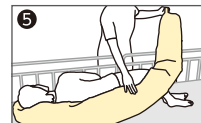

そのまま腰・肩の順番に回転を促して寝返りを行います。

スネークミニクッション (φ20×100cm)

体位変換例：(仰臥位から側臥位へ) 膝の回転を利用した体位変換




膝を立てて体位変換の準備をします。




準備したクッションのハンドルを持って立てた膝の下に入れ寝返りの準備をします。



ハンドルを持ってゆっくりと膝の回転を促します。

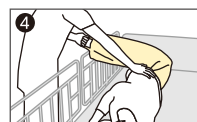

そのまま腰・肩の順番に回転を促して体位変換を行います。

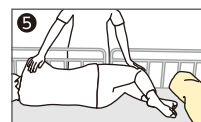

クッションを外せば体位変換の終了です。

お手入れ方法

対象：RM1-H、RM2-H、RM3、RM4-H、RM5、スネーククッション、スネークミニクッション

洗浄方法

- ・水温 95℃ 以下で洗濯してください。
 - ・本品の損傷を軽減するため、洗濯ネットをご使用ください。
 - ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。
 - ・洗濯槽にクッションが入らない場合は、やさしく手押し洗いを行ってください。
 - ・漂白剤、柔軟剤は使用できません。漂白剤や柔軟剤入りの洗剤にはご注意ください。使用する洗剤の注意書きをよくお読みください。
 - ・洗濯後十分に水気を取り除いてから形を整え、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
 - ・乾燥機を使用する場合は、100℃ 以下で乾燥してください。
 - ・乾燥機による乾燥後は形を整え、日陰の風通しの良い場所で自然乾燥を行ってください。
 - ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
 - ・ダニやカビ発生を防ぐため十分に乾燥させてください。
 - ・使用する前には本体が十分に乾燥しているか確認してください。
 - ・オートクレーブ滅菌は 105℃ まで可能です。
- ※リネン（洗濯）業者様へ依頼される場合は、上記条件でご相談ください。

お手入れ方法

対象：RM6-H

洗浄方法

- 本体（内部ウレタンフォーム）
 - ・本体内部のウレタンフォームは洗浄・消毒に対応しておりません。
 - ・利用者の発汗などにより、クッションの内部には徐々に湿気が溜まります。カビ等の原因になるため、定期的に内部ウレタンフォームを取り外して半日程度の日陰干しを推奨します。ウレタンフォームが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。
 - ・お手入れの際は本体ファスナーを開き、内部ウレタンフォームを取り外してください。
 - ・内部ウレタンフォームに取り付けられている内部ウレタンフォームカバーは取り外さないでください。
- 本体（側地メッド部分）
 - ・洗浄を行う場合は、必ず内部ウレタンフォームを取り外してください。
 - ・ファスナーを必ず閉じてから洗浄を行ってください。
 - ・洗浄方法は、他機種ロンボシリーズの方法をご参考ください。



保管方法
(共通)

- ・圧縮された状態での保管は避けてください。破損や永久歪み（へた）の原因となります。
- ・上に重たいものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。

仕様

■RM シリーズ

	RM1-H	RM2-H	RM3	RM4-H	RM5
品番	RM41498	RM41500	RM46900	RM41502	RM46600
JAN	4939810008806	4939810008813	4939810005270	4939810008820	4939810005973
寸法 (cm)	65×75 (ハンドル部：4×12)	クッション本体：40×80 フラップ部：20×80 (ハンドル部：4×12)	15×30	30×65 (ハンドル部：4×12)	Φ12×250
材質	表側地：綿50%、ポリエステル50% 中身：ロンボメッド(ポリウレタンスニペット 50%・ポリプロピレンビーズ 50%)				

	RM6-H	スネーククッション	スネークミニクッション
品番	RM44140	RM46200	RM46100
JAN	4939810009254	4939810005249	4939810005485
寸法 (cm)	62×65×15 (ハンドル部：4×12)	Φ20×220	Φ20×100
材質	表側地：綿 50%、ポリエステル 50% 中身：内部ウレタンフォーム(ポリウレタンフォーム)、内部ウレタンフォームカバー(ポリエステル 100%)、側地メッド部分(ポリウレタンスニペット・ポリプロピレンビーズの混合)	表側地：綿 50%、ポリエステル 50% 中身：ポリウレタンスニペット・ポリプロピレンビーズの混合	