

背抜きやポジショニング時に。滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にも負担の少ない介助を実現。



ケープ介助グローブ

滑りやすいグローブでストレス無く、ずれを解消。




滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

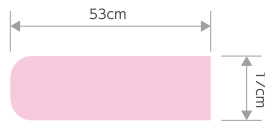

丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。家庭用洗濯機(弱洗いモード)による丸洗いが可能です。※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

品番	CK-388(1セット2枚入り)
価格	2,000円(税抜)
サイズ(cm)	フリーサイズ(幅17×長53)
材質	ナイロン100%
10セットパック	19,000円(税抜)

ケープ介助グローブ ディスポタイプ

使用時に気になる音の発生を抑えた、使い捨てタイプの介助グローブ。



衛生的なディスポタイプ


医療現場での使用を考えた、衛生的なディスポタイプです。

しなやかで音が小さい静音素材

しなやかで滑りやすい素材を採用しているため、使用時に気になる音の発生を軽減します。



スムーズに抜き差しできるフラップ構造

身体とマットレスの間に手を挿入する際に、先端のフラップが折れ曲がることで、よりスムーズに抜き差しすることができます。

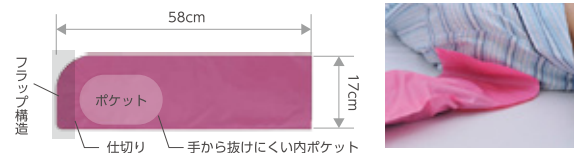

品番	CK-488(1箱50枚入り)
価格	4,500円(税抜)
サイズ(cm)	フリーサイズ(幅17×長58)
材質	ポリエチレン


使用例

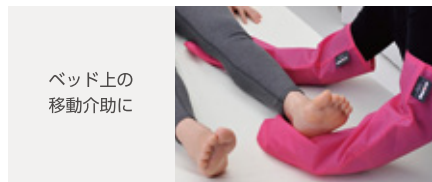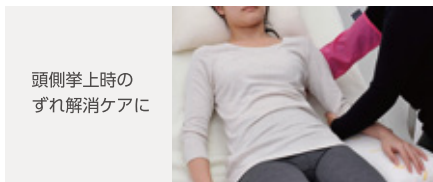

やさしい、ずれ介助のポイント

背抜き


真横から手を入れ、身体をなぞると緊張が助長しますので注意してください。

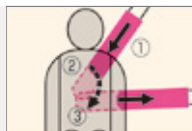

- ① 首筋から手を入れる
- ② 背部の重さのかかっている部位を確認
- ③ 手を旋回させ、腰の上から横に抜く

腰抜き


重い部分にもスムーズにアプローチできます。

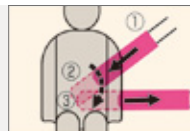

- ① ウエストのくびれから斜めに手を入れる
- ② 臀部の重さのかかっている部位を確認
- ③ 手を旋回させ、横に抜く

足抜き

足を持ち上げられる不快感がありません。

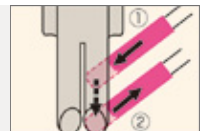

- ① 体側に沿って膝下から手を入れる
- ② ふくらはぎから踵までなぞり、横に抜く



安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<http://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■ 販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先