

# 急速ポンプ

# KURO<sup>®</sup>

エアマットレス専用急速ポンプ

小型・軽量

簡単操作

効率アップ



ク  
KURO, 小さいけれど大きな働き!

強力モーターを採用。エアマットレスを約30秒で膨らますことが可能になりました。

# エアマットレスを今すぐセットアップ!

①

エアマットレス  
納品作業の  
時間短縮に!

②

メンテナンス  
作業の効率  
アップに!



送風・吸引が1台で行える!

ハンドルを握るだけの簡単操作! 小型・軽量・ハイコストパフォーマンス!




KUROにアタッチメントを取り付けます

エアマットレスのカプラーと接続します

ハンドルを握ると作動\*します

※空気を充填する際、大きめの動作音がしますので、周囲の状況にご配慮頂きながらご使用ください。  
※作動中に専用アタッチメントからカプラーが抜けないように、カプラーを手で押さえながらご使用ください。


## アタッチメント・専用フィルター (同梱品)

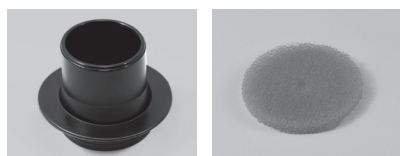

アタッチメント丸型  
(ビッグセルアイズ/  
ビッグセルインフィニティ/  
ネクサスアイビー/  
ネクサスR/ラグーナ用)  
単品価格 610円(+税)

KURO専用フィルター  
単品価格 130円(+税)

## アタッチメント (別売)

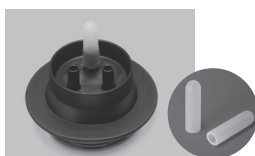

アタッチメント3連型  
(エアマスターES/トライセルE/  
エアドクター用)  
単品価格 610円(+税)

\*エアマスターES、  
トライセルEは  
シリコンキャップ  
を外してください。

## 商品の主な仕様 本体:6か月間保証

急速ポンプKURO			
品番	CH-320	価格	オープン価格
サイズ	幅22.0×高18.1×奥行9.6cm (アタッチメント装着時/ 幅25.7×高18.1×奥行9.6cm)		
重量	1kg		
材質	本体ケース/ABS樹脂、アタッチメント/PP樹脂		
定格	定格/AC100V、300W、50/60Hz ACコード4m		
対応機種	ビッグセルアイズ/ビッグセルインフィニティ/ ネクサスアイビー/ネクサスR/ラグーナ/ エアマスターES/トライセルE/エアドクター *エアマスターES、トライセルE、エアドクターは別売りの アタッチメントが必要です。		
同梱品	アタッチメント丸型、専用フィルター(2枚)		

\*急速ポンプKUROの取り扱いにあたっては、付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。  
\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。  
\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。\*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

商品に関する詳しい情報は  
ケープのホームページをご覧ください <https://www.cape.co.jp/>

お問い合わせ先