


Altone^{Ag+} アルトネ

取扱説明書

体圧分散式クッションのアルトネは、低反発ウレタンフォームの特性を利用して、身体の温度に馴染みながら接触面積を広げ、体圧を分散する仕組みのクッションです。

専用カバー

低反発ウレタンフォーム

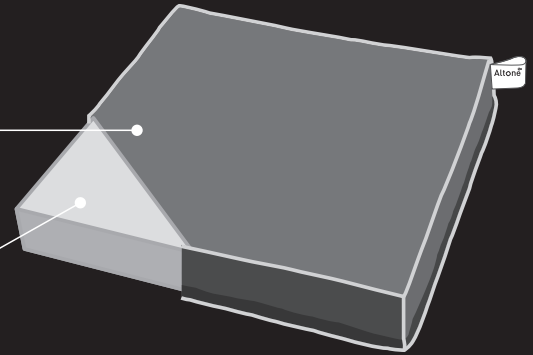

安全にお使いいただくために

アルトネの取り扱いにあたっては、本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

体圧分散式クッションのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予測することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を記載してあります。

なお、下記の警告に従わなかった場合には、物的損害や負傷、死亡につながる危険性があります。



1

体圧分散式クッションは身体を柔らかく支え、保持するのが特徴です。ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち合いのもとご使用ください。車いすからの落下、転落を招く恐れがあります。



2

体圧分散式クッションのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体の異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。



3

クッションに着座する際、または移乗する際はクッションから滑り落ちないように身体を支えてください。転倒・転落など思わぬ事故の恐れがあります。



4

クッションの端には座らないようにしてください。転倒・転落など思わぬ事故の恐れがあります。



5


クッションに飛び乗ったり過度の荷重を掛けたりしないでください。転倒・転落を招く恐れや商品の破損につながる可能性があります。

ご使用上の注意

- 無理な方向に力を加えないでください。破損の原因になります。
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。
- 高温多湿や長時間直接日光が当たる場所でのご使用は避けてください。商品の劣化につながる恐れがあります。
- 低温環境で保管した場合は、室温環境で30分以上馴染ませた後にご使用ください。
- ストーブなどの火に近づけたり、高温のものに近づけないでください。
- 専用カバーおよび中身が汚れた場合には、裏面のお手入れ方法に従ってください。
- 専用カバーの表面は防水加工を施しておりますが、液体の侵入を完全に防ぐものではありません。縫い目部分等から液体が染み込む場合があります。
- お使いの車いすによっては、商品タグがサイドガードの隙間から出る場合があります。その場合はクッションの向きを変えてご使用ください。
- 本商品に異常や疑問を感じた場合は、お買い上げの販売店、もしくは㈱ケープまでお問い合わせください。

ご使用方法

- アルトネを車いすの上に設置する際は、車いすの座面シートの上奥までしっかり差し込んでください。
- アルトネは、前後左右の向きはありませんが、必ず、滑り止めの面（ざらついた黒い面）を、車いすの座面に設置してください。上面・下面を誤って使用しますと、商品本来の性能を発揮しないばかりか、思わぬ事故の原因になる場合があります。

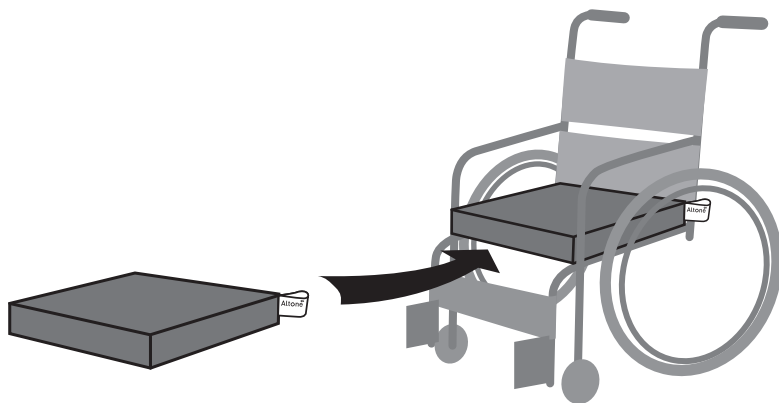

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥については(株)ケーブまでお問い合わせください。

■本体

- 本体の低反発ウレタンフォームは洗浄・消毒に対応していません。
- 利用者の発汗などにより、クッションの内部には徐々に湿気が溜まります。カビ等の原因になるため、定期的にかバーを取り外して半日程度の日陰干しを推奨します。ウレタンフォームが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。
- 本体の低反発ウレタンフォーム自体は、前後左右、裏表の向きはありません。

■専用カバー

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

- 水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布等で、洗濯する前に表面の汚れを予め取り除いてください。
- 洗濯ネットに入れ、洗濯機で弱い洗いが出来ます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
洗濯機をお使いの場合は、必ず洗濯ネットをご使用ください。
- 十分にすすぎを行い、軽く脱水後、陰干しを行ってください。
- 乾燥機でのタンブル乾燥は出来ません。
- 漂白剤、柔軟剤の使用不可、アイロン、ドライクリーニング不可。

保管方法について

- 本商品を保管する際は、上に重いものを置いたり、圧縮された状態で保管しないでください。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所は避けてください。

仕様

品番	CK-460
サイズ	幅 39.5cm × 奥行 39.5cm × 厚 5.5cm
重量	0.9kg
材質	●専用カバー：上面／ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮） 下面／PVCラミネート加工布（防水・すべり止め加工） ●中身：低反発ウレタンフォーム