

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション



ドイツのテクノロジーを凝縮した、豊富な形とサイズのピロー&クッション。洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」。2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。



RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっとり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。



さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ



下肢屈曲拘縮などにも、クッションを組み合わせてサポート。



素材が軽いので、身体にクッションを乗せても安心です。



車いす座位のサポートにも対応。

洗濯可能でいつも清潔



素材の特性を活かした使用方法



[振る]

ピローを振ることで、中身の厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。



[入れる]

大きなピロー (RF5) に小さなピロー (RF3) を入れることでボリュームがアップ。より安定感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。

エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用シート

専門分野
ウレタンフォームマットレス

車いす用クッション

ポジショニング用具

携帯型
接触圧力測定器

ポジショニング用具



RHOMBO FILL ロンボフィル

RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm)

枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm)

沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



POINT!
中身を高密度に充填。感触の良さはそのままに、沈み込みを抑えてサポートできます。

RF5 (80×80cm)

サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。




POINT! RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。



RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H (クッション本体：65×75cm、ハンドル部：4×12cm)


平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。

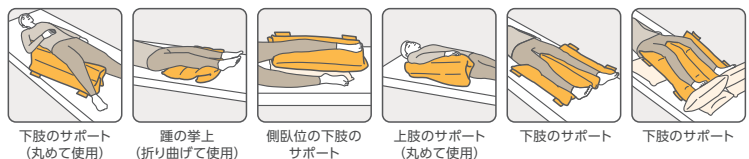

POINT! スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H (クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm)

フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。

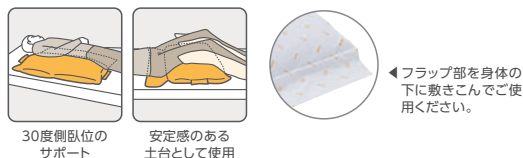

RM3 (15×30cm)

小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ (小さな体位変換) にも使用できる小型クッション。



POINT!
小さな隙間にもスムーズに入れることができ、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

RM4-H(クッション本体：30×65cm、ハンドル部：4×12cm) 関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



体位変換器



仰臥位での上肢のサポート 仰臥位での胸部・頭部のサポート 座位での上肢サポート 背上げ時の上肢サポート

RM5(φ12×250cm) 1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



体位変換器



下肢の拘縮予防のサポート 側臥位での胸部・骨盤・下肢のサポート 外旋、内旋予防と踵部の床ずれ対策 端坐位での骨盤サポート

スネーククッション(φ20×220cm) 1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



体位変換器



仰臥位・背上げ時の頭・肩・腕までのサポート 側臥位での頭部・背部・下肢のサポート 半腹臥位のサポート 下肢のサポート 端坐位での骨盤サポート



◀両端には持ち手がついています。ピローを振ることで、中身を均一に整えることができ、使用前の準備が簡単にできます。

POINT! 側臥位に使用すると、頭から胸部・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入れると、それがくさびとなり、背中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。

スネークミニクッション(φ20×100cm) さまざまな部位のサポートに使いやすい、-halfサイズのスネーククッション。




体位変換器



側臥位のサポート 下肢のサポート 背上げ時の上肢のサポート 上肢のサポート

RM6-H(クッション本体：62×65×15cm、ハンドル部：4×12cm) 高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。

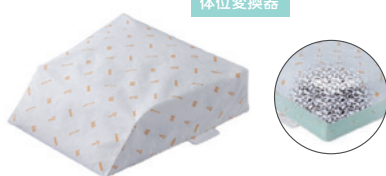

体位変換器



下肢挙上のサポート 背部のサポート 腹臥位のサポート

RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション(40×45cm) 背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



車いす付属品



ベッドでの背上げ姿勢をサポート 車いすでの座位姿勢をサポート

POINT! 両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体になじみ、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

QRコードからバックサポートクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt019>



ポジショニング用具

本 体

タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材質
 RF1	00245-000193	5,500円	40×60	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボフィル(ポリウレタンスニペット)
 RF2	00245-000194	7,500円	40×80	
 RF3	00245-000195	6,500円	23×40	
 RF4	00245-000196	12,500円	40×60	
 RF5	00245-000197	15,000円	80×80	
 RM1-H	00245-000232	17,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%) ※RM6-Hのみ、ロンボメッドの下層に内部ウレタンフォーム(ウレタンフォーム)
 RM2-H	00245-000233	17,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	
 RM3	00245-000200	3,200円	15×30	
 RM4-H	00245-000234	9,000円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	
 RM5	00245-000154	18,000円	Φ12×250	
 RM6-H	00245-000245	22,000円	62×65×15 ハンドル部 4×12	
 スネーククッション	00245-000102	29,000円	Φ20×220	
 スネークミニクッション	00245-000152	19,000円	Φ20×100	
 バックサポートクッション	00245-000168	17,500円	40×45	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボフィル、ロンボメッド
 初期導入セット	00245-000103	63,000円	【セット内容】RF1、RF3(×2)、RF5、RM1-H、RM2-H 汎用性の高いフッション5種類(計6個)をセットにしました。	

※サイズについて：本体サイズは、製造元のドイツ・リュック社の基準に従って、中身を充填する前の生地寸法にて記載しています。そのため実商品で寸法計測した場合には、大きさが表記サイズと異なります。

●本体(フッション)と オプションカバーのセット

体位変換器 介護保険／福祉用具貸与対象品目



防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H防水カバーセット	RM1-BCS	23,800円	00206-000133
ロンボRM2-H防水カバーセット	RM2-BCS	23,800円	00206-000134
ロンボRM4-H防水カバーセット	RM4-BCS	14,700円	00206-000135
ロンボRM5防水カバーセット	RM5-BCS	24,300円	00206-000139
ロンボRM6-H防水カバーセット	RM6-BCS	29,300円	00206-000145
ロンボスネーククッション防水カバーセット	SN-BCS	36,600円	00206-000137
ロンボスネークミニクッション防水カバーセット	SN-BCS mini	24,000円	00206-000138

清拭防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H清拭防水カバーセット	RM1-SBCS	24,500円	00206-000152
ロンボRM2-H清拭防水カバーセット	RM2-SBCS	24,500円	00206-000153
ロンボRM4-H清拭防水カバーセット	RM4-SBCS	15,400円	00206-000154
ロンボRM5清拭防水カバーセット	RM5-SBCS	25,000円	00206-000157
ロンボRM6-H清拭防水カバーセット	RM6-SBCS	30,000円	00206-000155
ロンボスネーククッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS	37,500円	00206-000156
ロンボスネークミニクッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS mini	24,600円	00206-000158


オプションカバー	通気タイプ		防水タイプ		清拭防水タイプ	
	品番	価格(+税)	品番	価格(+税)	品番	価格(+税)
各本体用のオプションカバーを3タイプご用意しています。洗濯もできます。	ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)		表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)		表地/ポリウレタンフィルム(防水) 裏地/ポリエステル100%	
RF1用	RF1/RF4C	4,400円	RF1/RF4CB	5,100円	RF1/RF4CS	5,700円
RF2用	RF2C	4,400円	RF2CB	5,100円	RF2CS	5,700円
RF3用	RF3C	2,200円	RF3CB	2,500円	RF3CS	2,800円
RF4用	RF1/RF4C	4,400円	RF1/RF4CB	5,100円	RF1/RF4CS	5,700円
RF5用	RF5C	6,000円	RF5CB	6,900円	RF5CS	7,600円
RM1-H用	RM1C	5,500円	RM1-HCB	6,300円	RM1-HCS	7,000円
RM2-H用	RM2C	5,500円	RM2-HCB	6,300円	RM2-HCS	7,000円
RM3用	RM3C	1,700円	RM3CB	1,900円	RM3CS	2,200円
RM4-H用	RM4C	5,000円	RM4-HCB	5,700円	RM4-HCS	6,400円
RM5用	RM5C	5,500円	RM5-HCB	6,300円	RM5-HCS	7,000円
RM6-H用	RM6C	6,400円	RM6-HCB	7,300円	RM6-HCS	8,000円
スネーククッション用	SNC	6,600円	SN-HCB	7,600円	SN-HCS	8,500円
スネークミニクッション用	SNC mini	4,300円	SN-HCB mini	5,000円	SN-HCS mini	5,600円
バックサポートクッション用	BSC	4,900円	BSCB	5,600円	BSCS	6,300円

フィットサポート

30度側臥位のポジショニングをサポートする


通気性に優れた特殊ウレタンフォーム

超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。丸洗いができます。

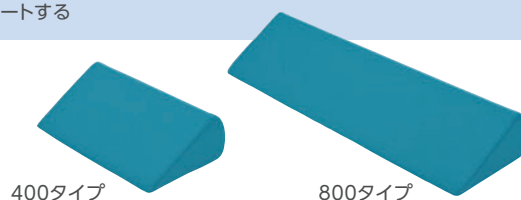

専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地
(洗濯できます)

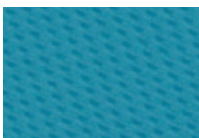

タイプ	400タイプ	800タイプ
品番	CK-396	CK-397
サイズ	幅40×奥行24×厚12cm	幅80×奥行24×厚12cm
価格	5,800円(+税)	9,500円(+税)
TAISコード	00206-000059	00206-000060
材質	カバー ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾) 中身 超通気高弾性ウレタンフォーム	
専用カバーのみ購入価格	3,300円(+税)	4,300円(+税)

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具/体位変換器

エニモ Rモデル

2022
NEW

Anymo

姿勢が崩れにくい、美しい30度側臥位をつくるためにデザインされたリバーシブル構造のポジショニングクッション。

●Rモデル 600タイプ
(CK-461)



【スリット面】

【フラット面】

●Rモデル 800タイプ
(CK-462)



下肢を支える
スリット面

背中を支える
フラット面



高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄 の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

乾燥
100℃


高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。

2時間
早い

従来品より約2時間早く乾燥。
スピーディーに現場に戻ってきます。



極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。

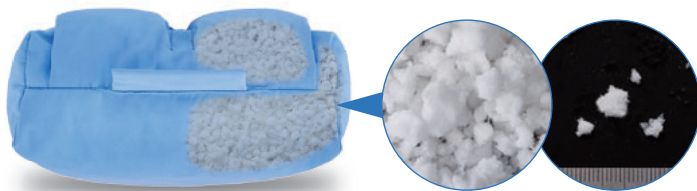

■大小のウレタンフォームを混合
極小のウレタンフォームは体積が小さく、水分の含有量が少なくなるため、乾きが早くなります。

いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります。

次亜塩素酸
ナトリウム
500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬することができます。



熱水
80℃

本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。



美しい30度側臥位をつくるためにデザインされたエニモRモデル600/800タイプ


■ 背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく『スリット構造』。
スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。



四角い形状が身体に沿うように変形することで、しっかり側臥位を保持します。

■ クッションが外れにくいから
時間が経っても姿勢が崩れにくい。

荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。

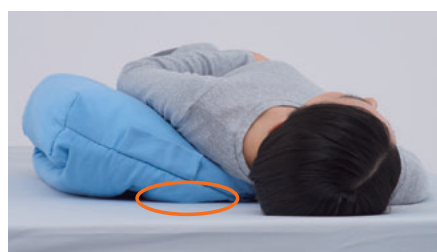

■ 肩から臀部までこの1本で支えるからキレイにキマる。
従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。



■ 下肢をのせる位置をガイドする『スリット構造』で誰でも正しくポジショニングづくり。

下肢をのせる位置をガイドするスリット構造。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。



スリットの凹凸はオプションカバーを装着しても視認できます。

高齢者のふくらはぎ幅の平均値10.8cmから割り出したスリット設計。

クッションを重ねて使わないから簡単。



高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計しました。

エニモ本体 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード
Rモデル 600タイプ	CK-461	9,800円(+税)	00206-000146
サイズ: 約30×60cm(ハンドル部は除く) 材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%			
Rモデル 800タイプ	CK-462	11,800円(+税)	00206-000147
サイズ: 約30×80cm(ハンドル部は除く) 材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%			

エニモ防水/清拭防水カバーセット(本体クッションとオプションカバーのセット) 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード
エニモ600タイプ 防水カバーセット	R600-BCS	14,400円(+税)	00206-000148
エニモ800タイプ 防水カバーセット	R800-BCS	17,200円(+税)	00206-000149
エニモ600タイプ 清拭防水カバーセット	R600-SBCS	14,900円(+税)	00206-000150
エニモ800タイプ 清拭防水カバーセット	R800-SBCS	17,800円(+税)	00206-000151

オプションカバー(別売)

通気タイプ	モデルタイプ	品番	価格
	Rモデル 600タイプ通気カバー	CH-171	4,000円(+税)
	Rモデル 800タイプ通気カバー	CH-172	4,700円(+税)
材質: ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)			
防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ防水カバー	CH-181	4,600円(+税)
	Rモデル 800タイプ防水カバー	CH-182	5,400円(+税)
材質: 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)			
清拭防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ清拭防水カバー	CH-191	5,100円(+税)
	Rモデル 800タイプ清拭防水カバー	CH-192	6,000円(+税)
	表地/ポリウレタンフィルム(防水) 裏地/ポリエステル100%		

ポジショニング用具

ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。
滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にもやさしい介助を実現。

滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。
装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返しやすい筒型タイプ。

丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。



背上げ(頭側挙上)時のずれ解消ケアに



ベッド上のポジショニング時に

ケープ介助グローブ

品番/CK-388
サイズ/フリーサイズ(幅17×長53cm)
材質/ナイロン100%

1セット2枚入り 価格 2,200円(+税)
10セットパック 価格 20,900円(+税)

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

使いやすく衛生的な使い捨てタイプ


感染対策に

安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ



フラップ構造

身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

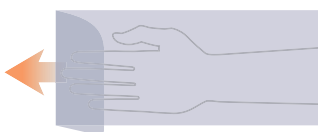

手が抜けにくいポケット構造

ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。



背上げ(頭側挙上)時や
ポジショニング時のずれ解消ケアに

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

品番/CK-498
サイズ/フリーサイズ(幅18×長58cm)
材質/ポリエチレン

枚数/1箱50枚入り
価格 2,200円(+税)

二つ折りパッケージ
場所を取らないコンパクトなパッケージ。片手で一枚ずつ取り出せます。

