

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

Anymo エニモ

- 簡単に使える
- 姿勢が崩れにくいユニーク設計
- 少ない数のクッションでポジショニングができる

Mモデル

仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート

Mモデル Bタイプ



Mモデル Wタイプ

Mモデル Vタイプ

Rモデル

30度側臥位をサポート

Rモデル 800タイプ

Rモデル 600タイプ



高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

乾燥
100℃

高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。




2時間
早い

従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。

※乾燥環境等によって乾燥時間が異なる場合があります。



大小のウレタンフォームを混合

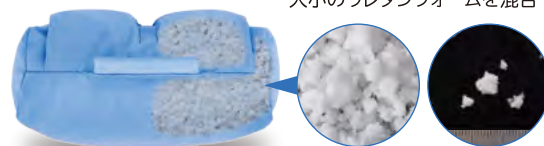

極小のウレタンフォームは体積が小さく、水分の含有量が少なくなるため、洗濯後の水分が抜けやすく乾きが早くなります。

いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります


次亜塩素酸
ナトリウム
500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム液に30分間浸漬することができます。



熱水
80℃


本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。

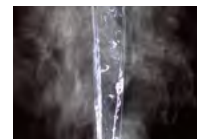

用途に合わせた3種類のオプションカバー（別売）

洗濯可能で、機能性の異なる3タイプのオプションカバーをご用意しています。

●通気タイプ

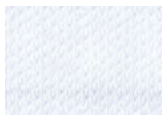

●防水タイプ（ハンドル付き）



●清拭防水タイプ（ハンドル付き）



エアマットレス

ウレタンフォームマットレス

マットレス用
シート

専門分野
ウレタンフォームマットレス

車いす用
クッション

ポジショニング用具

携帯型
接触圧力測定器

ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

エニモ Mモデル

2024
NEW

Bタイプ 広げて背部のサポート、たたんで下肢拘縮のサポートや側臥位の背部サポートに。



側臥位の
背部のサポート

仰臥位の
下肢のサポート

仰臥位の
背部のサポート

背上げ時の
背部のサポート




[単位:cm]

裏表
同仕様

■ 背部を乗せたらキュッとフィット。
左右から支えられ、姿勢が安定します。



POINT
肩から
骨盤までを
保持

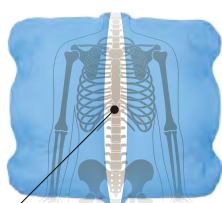

目印にもなるオーバルスリット
スリットの中央は幅が広く背骨を
逃がし、両端は幅が狭いためクッ
ションの広がりをおさえ、胸郭と
骨盤をしっかり支えます。




自重による広がりを抑える
スパイク構造



自重による広がりを抑える
オーバルスリット

Wタイプ 仰臥位でも側臥位でも、下肢を乗せるだけでフィット。

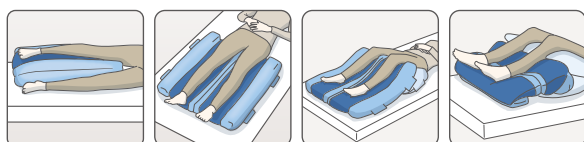


側臥位の
下肢のサポート

仰臥位の
下肢のサポート

仰臥位の
下肢のサポート

仰臥位の
下肢のサポート

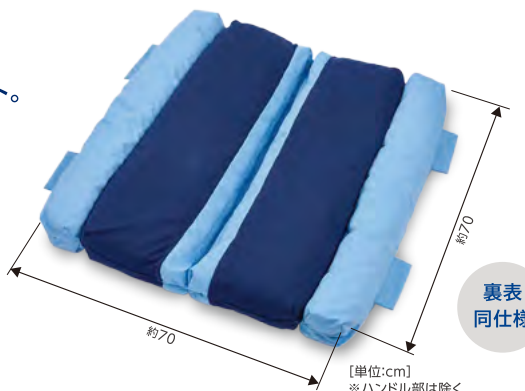

[単位:cm]
※ハンドル部は除く

裏表
同仕様

■ 伸縮生地で下肢を沈ませ優しくホールド。

POINT
乗せる
だけで
安定




伸縮生地(紺色:切替部)

下肢を乗せる位置に伸縮生地を採用。自重で適度に沈み
フィット。包み込むように下肢をホールドします。

非伸縮生地(水色)

中身のウレタンフォームのチップが大きく移動して姿勢が
崩れないよう非伸縮生地をエッジ部に使用しています。

伸縮生地の面積が広
いので、オプションカ
バー装着時も下肢を
乗せる位置を迷わず
簡単に使えます。

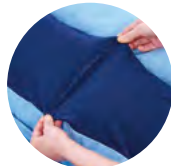

■ 滑り落ちを防止するエッジ構造。



POINT
滑り落ち
防止

さらに、外側のエッジ部が壁になり、下肢
が動いても滑り落ちを防止します。

踵を浮かせられる適度な厚み。




踵を浮かせられる、たっぷりのボリューム。

高齢者の30度側臥位に適した厚み。



二つ折りで簡単に厚みを調整。30度側臥位の
下肢の高さに合わせて厚みを設計しました。

Vタイプ 伸縮生地で上肢がしっかりフィットする Vタイプクッション。

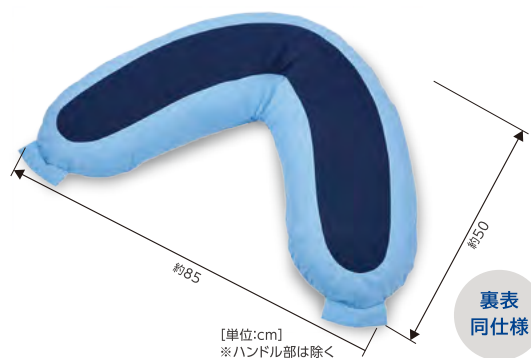


伸縮生地で上肢を沈ませ優しくホールド。

- 上肢を乗せれば自重で適度に沈み、フィットしてホールド。



POINT
肘から
指先まで

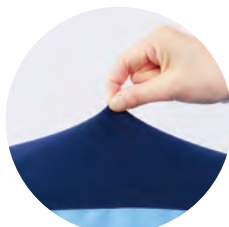

伸縮生地の面積が広いので、オプション
カバー装着時も上肢を乗せる位置を迷わ
ず簡単に使えます。

Bタイプと組み合わせて、姿勢崩れを防止。


- Vタイプの先端がBタイプのくぼみにぴったり差し込
める仕様です。





姿勢体位管理補助用具

エニモ Rモデル

姿勢が崩れにくい、きれいな30度側臥位をつくる
ためにデザインされたリバーシブル構造

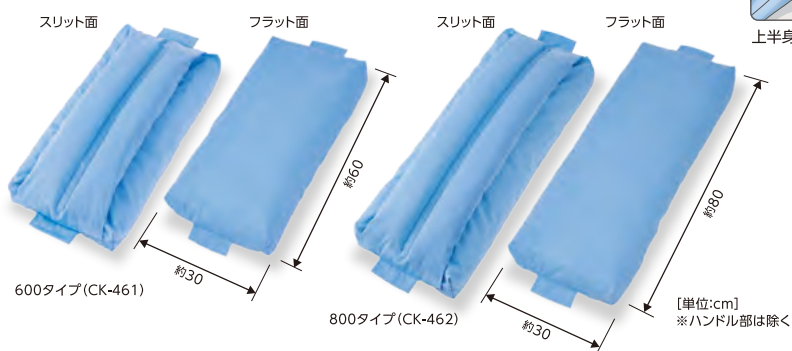

フラット面に背中を乗せれば、
クッションが傾き、きれいに角度がつきます

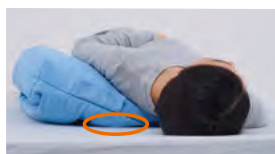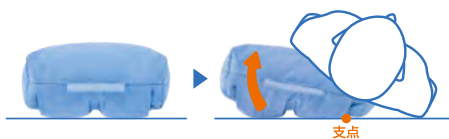

クッションが外れにくい
から時間が経っても姿勢
が崩れにくい。

スリット面に下肢を乗せれば、
下肢を包み込むようにホールドします



ポジショニング用具

姿勢体位管理補助用具

Anymo エニモ

本 体						
介護保険／福祉用具貸与対象品目 体位変換器						
モデル	タイプ	品 番	価 格 (+税)	サイズ(cm)	材 質	TAISコード
Mモデル	Bタイプ 	CK-463	18,800円	約73×64cm	表側地／ポリエステル80%、綿20% 切替部／ポリエステル100% (W・Vタイプのみ) 中身／ポリウレタンフォーム100%	00206-000170
	Wタイプ 	CK-464	14,000円	約70×70cm (ハンドル部4×12cm)		00206-000171
	Vタイプ 	CK-465	11,500円	約85×50cm (ハンドル部4×12cm)		00206-000172
Rモデル	600タイプ 	CK-461	9,800円	約30×60cm (ハンドル部4×12cm)	表側地／ポリエステル80%、綿20% 中身／ポリウレタンフォーム100%	00206-000146
	800タイプ 	CK-462	11,800円	約30×80cm (ハンドル部4×12cm)		00206-000147

オプションカバー

各本体用のオプションカバーを 3タイプご用意しています。 洗濯もできます。	通気タイプ		防水タイプ (ハンドル付き)		清拭防水タイプ (ハンドル付き)	
	ポリエステル100% (吸汗速乾・静電防止)		表地／ポリエステル100% (吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地／ポリウレタンフィルム (防水)		表地／ポリウレタンフィルム (防水) 裏地／ポリエステル100%	
タイプ	品 番	価 格 (+税)	品 番	価 格 (+税)	品 番	価 格 (+税)
Mモデル Bタイプ用	CH-173	7,800円	CH-183	9,300円	CH-193	9,900円
Mモデル Wタイプ用	CH-174	7,300円	CH-184	8,700円	CH-194	9,500円
Mモデル Vタイプ用	CH-175	5,900円	CH-185	6,800円	CH-195	7,600円
Rモデル 600タイプ用	CH-171	4,000円	CH-181	4,600円	CH-191	5,100円
Rモデル 800タイプ用	CH-172	4,700円	CH-182	5,400円	CH-192	6,000円

本体+オプションカバーセット

介護保険／福祉用具貸与対象品目 体位変換器					
タイプ	品 番	価 格 (+税)	タイプ	品 番	価 格 (+税)
エニモ Bタイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000173	MB-BCS	28,100円	エニモ Bタイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000176	MB-SBCS	28,700円
エニモ Wタイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000174	MW-BCS	22,700円	エニモ Wタイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000177	MW-SBCS	23,500円
エニモ Vタイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000175	MV-BCS	18,300円	エニモ Vタイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000178	MV-SBCS	19,100円
エニモ 600タイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000148	R600-BCS	14,400円	エニモ 600タイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000150	R600-SBCS	14,900円
エニモ 800タイプ 防水カバーセット TAISコード 00206-000149	R800-BCS	17,200円	エニモ 800タイプ 清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000151	R800-SBCS	17,800円

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション




ドイツのテクノロジーを凝縮した、
豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を保つ「ロンボメッド」。
2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL (ロンボフィル) スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面
をサポートして圧力を分散。通気性に優れた
ハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカット
することで、空気の流れをスムーズにし、ムレ
を軽減します。

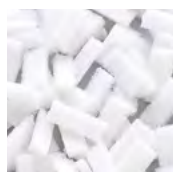

RHOMBO MED (ロンボメッド) スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特
殊な形の発泡チップが、スニペットとスニ
ペットの隙間を埋めることにより、身体を安
定させて保持。適度なしっとり感で、療養者
の緊張を最小限に抑えます。



さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ



下肢屈曲拘縮などにも、
クッションを組み合わせる
サポート。



素材が軽いので、
身体にクッションを乗せても
安心です。



車いす座位の
サポートにも対応。

洗濯可能でいつも清潔



素材の特性を活かした使用方法



[振る]

ピローを振ることで、中身の
厚みや形状が調整できます。



[引き出す]

ピローをつまんで引き出すこ
とで、身体への接触部分を微
調整できます。



[入れる]


大きなピロー (RF5) に小さな
ピロー (RF3) を入れることで
ボリュームがアップ。より安定
感を出すことができます。



[揺らす]

ピローにのせた身体を揺ら
すことで、より身体の形状に
フィットし、なじませることが
できます。

ポジショニング用具

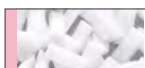

RHOMBO FILL ロンボフィル

RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm)

枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm)

沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



POINT!
中身を高密度に充填。感触の良さはそのままに、沈み込みを抑えてサポートできます。

RF5 (80×80cm)

サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。



POINT! RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。




RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H (クッション本体：65×75cm、ハンドル部：4×12cm)

平らなまま、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。



体位変換器

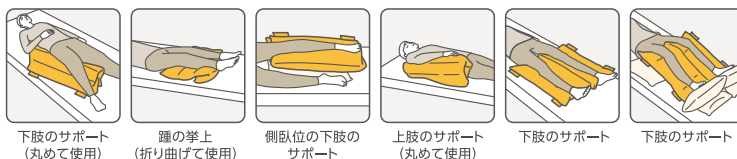


POINT! スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H (クッション本体：40×80cm、フラップ部：20×80cm、ハンドル部：4×12cm)

フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。



体位変換器

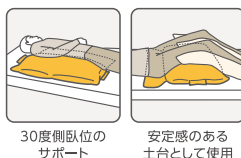

◀フラップ部を身体の下に敷きこんでご利用いただくとクッションがずれにくくなります。

RM3 (15×30cm)

小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ (小さな体位変換) にも使用できる小型クッション。



POINT!
小さな隙間にもスムーズに入れることができ、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

RM4-H(クッション本体:30×65cm、ハンドル部:4×12cm)

関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



体位変換器

仰臥位での
上肢のサポート仰臥位での胸部、
頭部のサポート座位での
上肢サポート背上げ時の
上肢サポート

RM5(Φ12×250cm)

1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。



体位変換器

下肢の拘縮予防の
サポート側臥位での
胸部・骨盤・下肢の
サポート外旋、内旋予防と
踵部の床ずれ対策端坐位での
骨盤サポート

スネーククッション(Φ20×220cm)

1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



体位変換器

仰臥位・背上げ時
の頭・肩・腕までの
サポート側臥位での
頭部・背部・下肢の
サポート半腹臥位の
サポート下肢の
サポート端坐位での
骨盤サポート

◀両端には持ち手がついています。ビローを振ることで、中身を均一に整えることができ、使用前の準備が簡単にできます。

POINT!

側臥位に使用すると、頭から胸部・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入れると、それがくさびとなり、背中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。

スネークミニクッション(Φ20×100cm)

さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。



体位変換器



側臥位のサポート

下肢のサポート

背上げ時の上肢の
サポート


上肢のサポート

RM6-H(クッション本体:62×65×15cm、ハンドル部:4×12cm)

高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。



体位変換器

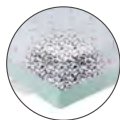
角度の低い背上げ
軽い円背の方の
仰臥位の背部サポート

腹臥位のサポート

下肢挙上のサポート

POINT!

中身のメッド素材が下肢の形状に沿い、優しく保持しながら、安定して下肢を支えることができます。

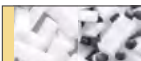

RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション(40×45cm)

背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。



車いす付属品

ベッドでの
背上げ姿勢を
サポート車いすでの
座位姿勢を
サポート

POINT!


両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体になじみ、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

QRコードからバックサポートクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。
<https://www.cape.co.jp/products/pdt019>



ポジショニング用具

本 体

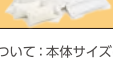タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材質
 RF1	00245-000193	5,500円	40×60	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボフィル(ポリウレタンスニペット)
 RF2	00245-000194	7,500円	40×80	
 RF3	00245-000195	6,500円	23×40	
 RF4	00245-000196	12,500円	40×60	
 RF5	00245-000197	15,000円	80×80	
 RM1-H	00245-000232	17,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%) ※RM6-Hのみ、ロンボメッドの下層に内部ウレタンフォーム(ウレタンフォーム)
 RM2-H	00245-000233	17,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	
 RM3	00245-000200	3,200円	15×30	
 RM4-H	00245-000234	9,000円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	
 RM5	00245-000154	18,000円	Φ12×250	
 RM6-H	00245-000245	22,000円	62×65×15 ハンドル部 4×12	
 スネーククッション	00245-000102	29,000円	Φ20×220	
 スネークミニクッション	00245-000152	19,000円	Φ20×100	
 バックサポートクッション	00245-000168	17,500円	40×45	表側地／綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)／ロンボフィル、ロンボメッド
 初期導入セット	00245-000103	63,000円	〔セット内容〕RF1、RF3(×2)、RF5、RM1-H、RM2-H 汎用性の高いクッション5種類(計6個)をセットにしました。	

※サイズについて：本体サイズは、製造元のドイツ・リューク社の基準に従って、中身を充填する前の生地寸法にて記載しています。そのため実商品で寸法計測した場合には、大きさが表記サイズと異なります。

●本体(クッション)と オプションカバーのセット

体位変換器 介護保険／福祉用具貸与対象品目



防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H防水カバーセット	RM1-BCS	23,800円	00206-000133
ロンボRM2-H防水カバーセット	RM2-BCS	23,800円	00206-000134
ロンボRM4-H防水カバーセット	RM4-BCS	14,700円	00206-000135
ロンボRM5防水カバーセット	RM5-BCS	24,300円	00206-000139
ロンボRM6-H防水カバーセット	RM6-BCS	29,300円	00206-000145
ロンボスネーククッション防水カバーセット	SN-BCS	36,600円	00206-000137
ロンボスネークミニクッション防水カバーセット	SN-BCS mini	24,000円	00206-000138

清拭防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H清拭防水カバーセット	RM1-SBCS	24,500円	00206-000152
ロンボRM2-H清拭防水カバーセット	RM2-SBCS	24,500円	00206-000153
ロンボRM4-H清拭防水カバーセット	RM4-SBCS	15,400円	00206-000154
ロンボRM5清拭防水カバーセット	RM5-SBCS	25,000円	00206-000157
ロンボRM6-H清拭防水カバーセット	RM6-SBCS	30,000円	00206-000155
ロンボスネーククッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS	37,500円	00206-000156
ロンボスネークミニクッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS mini	24,600円	00206-000158

オプションカバー	通気タイプ		防水タイプ		清拭防水タイプ	
各本体用のオプションカバーを3タイプご用意しています。洗濯もできます。	ポリエステル100% (吸汗速乾・静電防止)		表地／ポリエステル100% (吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地／ポリウレタンフィルム (防水)		表地／ポリウレタンフィルム (防水) 裏地／ポリエステル100%	
	品 番	価格 (+税)	品 番	価格 (+税)	品 番	価格 (+税)
RF1用	RF1／RF4C	4,400円	RF1／RF4CB	5,100円	RF1／RF4CS	5,700円
RF2用	RF2C	4,400円	RF2CB	5,100円	RF2CS	5,700円
RF3用	RF3C	2,200円	RF3CB	2,500円	RF3CS	2,800円
RF4用	RF1／RF4C	4,400円	RF1／RF4CB	5,100円	RF1／RF4CS	5,700円
RF5用	RF5C	6,000円	RF5CB	6,900円	RF5CS	7,600円
RM1-H用	RM1C	5,500円	RM1-HCB	6,300円	RM1-HCS	7,000円
RM2-H用	RM2C	5,500円	RM2-HCB	6,300円	RM2-HCS	7,000円
RM3用	RM3C	1,700円	RM3CB	1,900円	RM3CS	2,200円
RM4-H用	RM4C	5,000円	RM4-HCB	5,700円	RM4-HCS	6,400円
RM5用	RM5C	5,500円	RM5-HCB	6,300円	RM5-HCS	7,000円
RM6-H用	RM6C	6,400円	RM6-HCB	7,300円	RM6-HCS	8,000円
スネーククッション用	SNC	6,600円	SN-HCB	7,600円	SN-HCS	8,500円
スネークミニクッション用	SNC mini	4,300円	SN-HCB mini	5,000円	SN-HCS mini	5,600円
バックサポートクッション用	BSC	4,900円	BSCB	5,600円	BSCS	6,300円

フィットサポート


30度側臥位のポジショニングをサポートする

通気性に優れた特殊ウレタンフォーム

超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。丸洗いです。



400タイプ

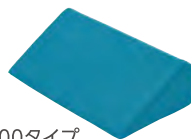

800タイプ



タイプ	400タイプ	800タイプ
品番	CK-396	CK-397
サイズ	幅40×奥行24×厚12cm	幅80×奥行24×厚12cm
価格	5,800円(+税)	9,500円(+税)
TAISコード	00206-000059	00206-000060
材質	カバー ポリエステル (ドライメッシュ) (吸湿速乾) 中身 超通気高弾性ウレタンフォーム	
専用カバーのみ購入価格	品番／CH-396 3,300円(+税)	品番／CH-397 4,300円(+税)

専用カバー

吸湿速乾のドライメッシュ生地
(洗濯できます)



ポジショニング用具

ケープ介助グローブ

背抜きやポジショニング時に。
滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にもやさしい介助を実現。

滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。
装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、
いつも清潔に使うことができます。



背上げ（頭側挙上）時のずれ解消ケアに



ベッド上のポジショニング時に

ケープ介助グローブ

サイズ／フリーサイズ（幅17×長53cm）
材質／ナイロン100%

1セット2枚入り
品番／CK-388 価格 2,200円（+税）

10セットパック
品番／CK-418 価格 20,900円（+税）

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

使いやすく衛生的な使い捨てタイプ


感染対策に

安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ




フラップ構造

身体の下に手を差し込む際、フラップが
折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

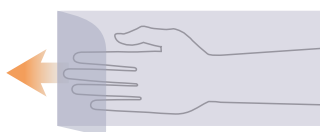

手が抜けにくいポケット構造

ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。
親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが
抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。

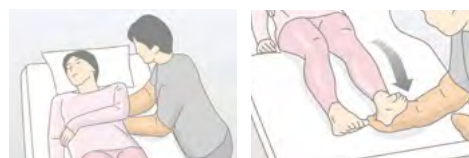

背上げ（頭側挙上）時や
ポジショニング時のずれ解消ケアに

ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

品番／CK-498
サイズ／フリーサイズ（幅18×長58cm）
材質／ポリエチレン

枚数／1箱50枚入り
価格 2,200円（+税）

二つ折りパッケージ

場所を取らないコンパクトな
パッケージ。片手で一枚ずつ
取り出せます。

