

【本カードは、付属のバンドにて送風チューブカバーの黒いベルトに取り付けてください。】

SMALL CHANGE
LAGUNA

スモールチェンジラグーナ 操作ガイド

電源

初期設定

- モード: かんたんモード
スモールチェンジモード
- 圧切替: ON
- 警告音: ON

体重設定

- 5kg刻みでデジタル表示します。
※体重が中間値の場合は低値に設定
例えば42.5kgの場合40kg設定に
します。エラー時にはエラーコード
を表示します。

キーロック

- 3秒長押しで全てのボタン操作
を無効にし、誤操作を防止しま
す。

警告音

- エラー時に警告音を発します。

設定リセット

- 3秒長押しでメモリした設定を初
期設定にリセットします。

圧切替

- OFFにすると圧切替動作を停止
します。

クイックハードモード

- 内圧を高め、圧切替が停止
動作介助、ポジショニング時など
の安定床面の確保ができるモー
ドです。
自動解除 約1時間
※クイックハードモードをONする
と安全のためスモールチェンジ
動作は自動で停止します。

かんたんモード

- 体重40～60kgの方に、ワンタ
チでご使用いただけるモードで
す。

スモールチェンジ

- スモールチェンジ動作時に点灯
しています。スモールチェンジ動
作のON/OFFを切り替える場合
はこのボタンを押してください。
※クイックハードモード、自動ヘッ
ドアップ対応機能(31°以上)との
併用はできません。

自動ヘッドアップ対応機能

- ヘッドアップ角度に応じた動作、
及び適正な内圧に自動調整しま
す。
※クイックハードモードとの併用は
できません。背上げ角度30°まで
はスモールチェンジと併用でき
ます。

停電対策機能付き

■ 停電時の対応方法

本商品は、停電対策機能付きです。停電の際には、特別な操作を行う必要はありません。カプラーを外さないように注意してください。

- 停電と同時に特殊なバルブが自動的にエア抜কেを防止し、マットレス全体の内圧を約14日間保持します。
- 電源復旧後、メモリ機能によって記憶された設定が復帰します。

【本カードは、付属のバンドにて送風チューブカバーの黒いベルトに取り付けてください。】

SMALL CHANGE
LAGUNA

点検ポイント

- ご使用中は、できるだけ日に1回は、エアマットレスの状態を確認することをお勧めします。エアセルへ適切に空気が入っているか、各モード設定の状態や下記項目をご確認ください。
- 光サインが赤く点灯した際は、ポンプ背面のエラーコードを確認するとともに、下記の項目もご確認ください。


点検ポイント 1

療養者の体重に合わせた設定になっていますか？
または、エラーコードが表示されていませんか？




点検ポイント 2

送風チューブが折れ曲がったりねじれたりしていませんか？

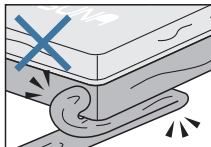


点検ポイント 3

カプラーはポンプに正しく差し込まれていますか？

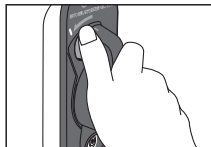


点検ポイント 4

ヘッドアップセンサの青いプラグが奥までしっかりと差し込まれていますか？

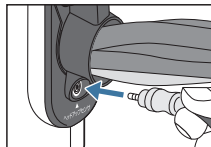


点検ポイント 5

送風チューブがカプラーから外れていませんか？

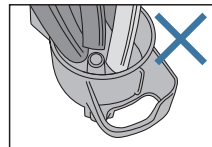


点検ポイント 6

カプラーが破損（割れ、カケ、ひび）していませんか？

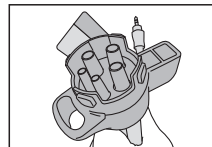


点検ポイント 7

全てのエアセルが送風チューブ（Tコネクタ）と繋がっていますか？

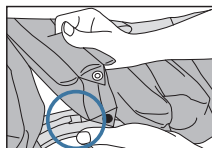


点検ポイント 8

エアセルが破損していませんか？

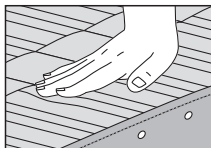


点検ポイント 9

エアフィルターに汚れが溜まりすぎていませんか？

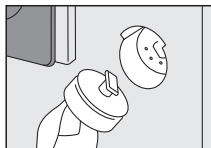

点検ポイント 10

電源コード・プラグが破損していませんか？

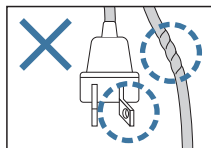

注意

CPR対応機能（緊急エア抜き機能）使用後などカプラーを一時的に外した際、マット内の空気が一度に流失することにより内圧異常のエラーコードが表示されます。電源プラグの抜き差しを一度行いリセットした上でご使用を続けてください。

上記の方法で
問題が解決しない場合

- ご使用中を中止し、他のマットレスへの交換を行ってください。
- 空気が入らない等の異常な状態で使用を継続すると事故に繋がる危険性があります。このような場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、レンタル事業者もしくは株式会社ケーブまでお問い合わせください。