

床ずれ防止用エアマットレス

エアマスタービッグセル インフィニティ

# 取扱説明書 (レンタル用)

この度はエアマスタービッグセル インフィニティをご使用いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用にあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

エアマスタービッグセル インフィニティは、  
専用マットレス(専用カバー付属)と  
専用ポンプがセットになっています。

## 停電時の対応方法


本製品は、停電対策機能付きです。

- 特殊なバルブが自動的にエア抜কে防止し、マットレス全体の内圧を約14日間保持します。
- 停電の際に、特別な操作を行う必要がありません。カバーを外さないように注意してください。
- 電源復旧後は、直前の設定が復帰します。




ポンプフック

### 専用ポンプ

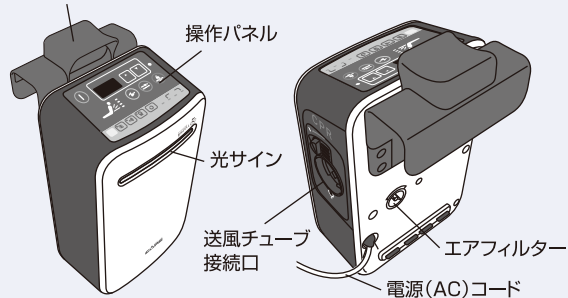




### 専用マットレス

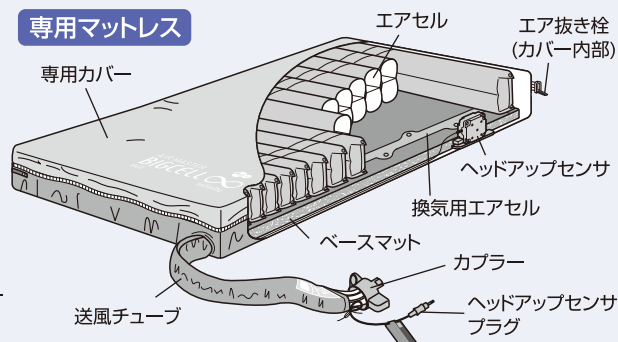

## 安全にお使いいただくために

エアマスタービッグセル インフィニティのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義し記載してあります。下記の内容に従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れがありますので、ご使用される前に必ずお読みください。

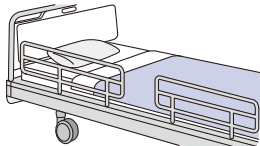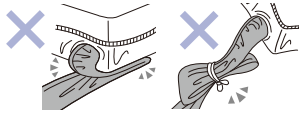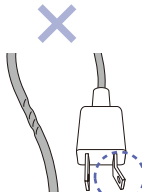


- 1** エアマスタービッグセル インフィニティのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上、ご使用ください。使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家へ相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。
- 2** 専用マットレスの送風チューブは必ず足側になるように設置してください。送風チューブが頭側になると首にからみ重大な事故を招く恐れがあります。
- 3** 本製品は、必ずベッドにサイドレールを取り付けた状態でご使用ください。サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- 4** 専用マットレスの上で、飛び跳ねたり、立ち上がったたりしないでください。
- 5** 端座位や移乗時は、必ず第三者の立ち会いのもと行ってください。ベッドからの落下・転落を招く危険があります。
- 6** 専用マットレスの上での喫煙はお止めください。
- 7** 送風チューブを束ねたり、専用マットレスの下に巻き込まないでください。送風チューブが折れ曲がったり圧迫されると、空気がエアマットレス内に送り込まれなくなり、期待した効果が得られない恐れがあります。
- 8** 本製品は、二人以上で使用しないでください。
- 9** 専用ポンプのポンプフックや操作パネルに足がかからないようにしてください。
- 10** 専用ポンプを湿気の多い場所で使用しないでください。また、水や尿などの液体をかけたり、こぼしたりしないでください。
- 11** 本製品を分解したり、修理・改造しないでください。
- 12** 本製品は必ず日本国内の家庭用コンセント(100V/50Hz/60Hz)でお使いください。
- 13** 本製品以外の組み合わせでは、絶対に使用しないでください。
- 14** お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから外してください。
- 15** 電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたりしないでください。破損している電源コードは感電や火災事故の危険がありますので、使用しないでください。

# 使用方法

- 1 専用マットレスをベッド上に設置します。  
●ベッドの上にそのまま敷いてください。
- 2 専用ポンプを正しく設置します。  
●フットボードのあるベッドをご使用の場合、ポンプフックを引っ掛けて設置してください。  
●フットボードがない場合は床などの水平な場所に縦置きしてください。

**注意** 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所を避け、湿気がこもらないように壁から5cm以上離して設置ください。


- 3 専用ポンプにカプラーを接続します。  
●専用マットレスのカプラーを送風チューブ接続口にしっかりと接続し、ヘッドアップセンサのプラグを差し込みます。

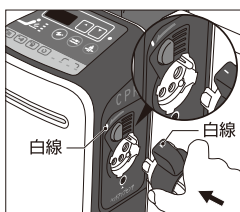

カプラーの●印と接続口の●印が合う位置で、カプラーをポンプ側にまっすぐに差し込みます。



奥まで差し込み、そのまま右(時計回り)に、“カチッ”と音がするまで回転させます。

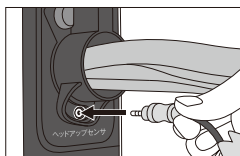

ヘッドアップセンサの青いプラグを所定の場所に差し込みます。

- 4 電源プラグをコンセントにつなぎます。  
●自動で電源が入ります。  
●電源ランプ、光サインの点灯をご確認ください。

**初期設定** 体重設定:50Kg モード:通常モード  
自動ヘッドアップ対応機能:ON  
換気モード:ON 警告音:ON

- 5 療養者の体重に設定します。  
●体重設定ボタンを押し、ご使用者の体重に合わせてます。  
●約30分で使用可能となります。

- 6 療養者に寝てもらいます。


- 7 療養者の状況に応じて各種モードを使用します。  
●通常は三連圧切替による膨張収縮を行います。  
●必要に応じて各種モードのボタンを押してください。

拘縮対応モード	関節拘縮のある方に
微波動モード	安静管理が必要な方、圧切替が気になる方に
クイックハードモード	清拭やおむつ交換などのベッド上でのケア時に

## コントロールパネルボタン説明

<b>電源</b> 初期設定 ■体重設定:50kg ■換気モード:ON ■警告音:ON ■モード:通常モード ■自動ヘッドアップ対応機能:ON	<b>体重設定</b> ●5kg刻みでデジタル表示 ※体重が中間値の場合は低値に設定 例:42.5kg→「40kg」設定	<b>通常モード</b> ●三連圧切替(膨張収縮) ●体圧分散性能を最大限に発揮	<b>拘縮対応モード</b> ●膨張収縮の内圧が上昇 ●関節拘縮の方の寝姿勢保持と体圧分散に
<b>自動ヘッドアップ対応機能</b> ●ヘッドアップ角度に応じた内圧に自動調整 ●頭側挙上時の底つき防止			<b>微波動モード</b> ●膨張収縮の動作が縮小 ●安静管理が必要な方、圧切替が気になる方に
<b>エコモード</b> コントロールパネルのランプ類を消灯し、消費電力を削減			<b>クイックハードモード</b> ●内圧を高め、膨張収縮が停止 ●清拭やおむつ交換時などの安定床面の確保に ●自動解除 約1時間
<b>換気モード</b> マット内の湿気や熱を排出し、ムレを軽減	<b>注意ランプ(赤ランプ点滅)</b> マット内圧やヘッドアップセンサなどの異常を警告		<b>点検ランプ</b> 製品メンテナンス用 お客様が使用するモードではありません

## CPR対応機能(緊急時エア排出機能)

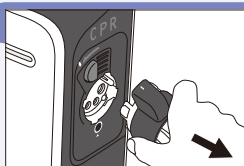

赤いボタンを押しながらカプラー部を左回り(反時計回り)に回して、手前に引き抜く。

CPR対応機能使用後のリセット方法(必須)  
電源プラグの抜き差しを一回行ってください。直前の設定が復帰します。

## 故障かな?と思ったら…

エアマスタービッグセル インフィニティに何らかの異常や変化があった場合は、症状別に下記のことを確認し、手順通りに対処してください。それでも問題が解決しない場合は、貸与(レンタル)事業者までお問い合わせください。



空気が入らない等の異常な状態で使用を継続しますと事故の危険があります。異常時には絶対に使用しないでください。

症状	考えられる原因	対処方法
光サインが赤く点灯している	いくつかの原因が考えられます (下記を参照してください)	
注意ランプ【内圧】赤く点滅	カブラーがしっかりとポンプに取り付けられていない	カブラーを専用ポンプの接続口にしっかりと接続してください
	カブラーから送風チューブが外れている	送風チューブ4本をカブラーの所定の場所にしっかりと差し込んでください
	カブラーが破損している	お買い上げの販売店もしくは株式会社ケーブまでお問い合わせください
	送風チューブが折れ曲がっている	送風チューブを伸ばし、空気の流れを遮断しないでください
	上記の対処後はコンセントから電源プラグの抜き差しを一回行ってください それでも赤く点滅している場合は、貸与(レンタル)事業者までお問い合わせください	
注意ランプ【ヘッドアップセンサ】赤く点滅	ヘッドアップセンサが正常に取り付けられていない	ヘッドアップセンサの青いプラグを所定の場所に差し込んでください
	ヘッドアップ角度が異常な角度になっている	ベッドを正常な角度に戻してください
	それでも赤く点滅している場合は、貸与(レンタル)事業者までお問い合わせください	
注意ランプ【その他】赤く点滅	貸与(レンタル)事業者までお問い合わせください	
マットレスが硬すぎる	体重設定が誤っている(重い設定になっている)	体重設定を適正に行ってください
	自動・手動ヘッドアップ対応機能、クイックハードモード、拘縮対応モードになっている	左記のモードが必要でない場合は、モードを解除してご使用ください
マットレスが柔らかすぎる	体重設定が誤っている(軽い設定になっている)	体重設定を適正に行ってください
コントロールパネルが操作できない	キーロック、エコモードになっている	左記のモードが必要でない場合は、モードを解除してご使用ください
光サインの明るさが変わる	居室の明るさに合わせた自動調光による適正な作動です	そのままご使用ください
エコモード中、エコボタンが点滅して各表示が点灯する	光やボタンに反応した一時表示機能です	そのままご使用ください
ポンプの音が異常に大きい	ポンプの上に物が乗っていたりポンプが他のものに接触している	乗っているもの、接触しているものを取り除いてください
	ポンプが振動しやすいものの上や斜めに置かれている	ポンプを水平で安定した場所に設置してください
停電が発生した	ベッドを水平に戻し、そのままご使用ください	

## お手入れ方法

### 専用カバーが汚れてしまったとき

- 1 表面に付着した汚れを予め取り除いた後、専用カバーをマットから取り外します。
- 2 洗濯機で弱い洗濯ができます。  
洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- 3 低い温度でのタンブル乾燥ができます。  
乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。

### 専用ポンプが汚れてしまったとき

- 1 専用ポンプの電源ボタンを「OFF」(電源ボタン、光サインのランプが消えた状態)にして、コンセントから電源プラグを抜きます。
- 2 布に薄めた中性洗剤かぬるま湯(50℃以下)を含ませ、固くしぼります。
- 3 2の布で、専用ポンプの表面の汚れをふき取ります。
- 4 専用ポンプ背面にあるエアフィルターが汚れている場合は、エアフィルターを交換してください。

お問い合わせは