

[本カードは、付属のバンドにて送風チューブカバーの黒いベルトに取り付けてください。]

AIR MASTER
NEXUS R

エアマスターネクサスR 操作ガイド

電源

初期設定

- モード:かんたんモード
- ムレ対策:ON(弱)
- 警告音:ON

かんたんモード

- 体重40~60kgの方に、ワンタッチでご使用いただけるモード

自動ヘッドアップ対応機能

- ヘッドアップ角度に応じた動作、及び適正な内圧に自動調整

設定リセット

- 3秒長押しでメモリした設定をリセット

体重設定


- 5kg刻みでデジタル表示
- ※ 体重が中間値の場合は低値に設定
例:42.5kg→「40kg」設定
- エラー時には、エラーコードを表示

警告音

- エラー時に警告音を発する

キーロック

- 3秒長押しで全てのボタン操作を無効にし、誤操作を防止

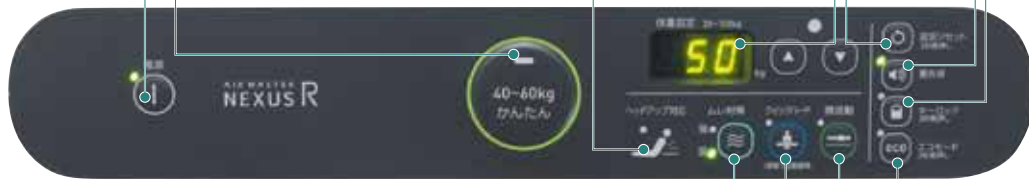

ムレ対策

- マット内の湿気や熱を排出し、ムレを軽減
- ボタンを押すごとに弱、強、切と切替え

クイックハードモード

- 内圧を高め、膨張収縮が停止
- 清拭やおむつ交換時、ポジションアップ時などの安定床面の確保に
- 自動解除 約1時間

微波動モード

- 膨張収縮の動作を小さくし、圧切換え時の違和感を軽減

エコモード

- 3秒長押しでコントロールパネルのランプ類を消灯し、消費電力を削減

※ 通常モード、微波動モード、クイックハードモードは併用できません。また、これらのモードと自動ヘッドアップ対応機能も併用できません。

※ 上記のモードやエコモード作動中にヘッドアップが検知された場合、自動ヘッドアップ対応機能が優先されます。

※ 通常モード、微波動モード中に自動ヘッドアップ対応機能やクイックハードモードを使用した場合、解除後は元のモードに復帰します。

※ エコモードは自動ヘッドアップ対応機能、クイックハードモード時は使用できません。



停電時の対応方法

本製品は、停電対策機能付きです。

- 停電の際は、特別な操作を行なう必要はありません。カブラーを外さないように注意してください。
- 特殊なバルブが自動的にエア抜けを防止し、マットレス全体の内圧を約14日間保持します。
- 電源復旧後は、直前の設定が復帰します。

[本カードは、付属のバンドにて送風チューブカバーの黒いベルトに取り付けてください。]

点検ポイント

AIR MASTER
NEXUS R

- ご使用中は、できるだけ1日に1回、エアマットレスの状態を確認することをお勧めします。エアセルが適切に膨らんでいること、モード設定の状態や下記項目もご確認ください。
- 光サインが赤く点灯した際は、ポンプ背面のエラーコードを確認するとともに、下記項目もご確認ください。


点検ポイント 1

療養者の体重に合わせた設定になっていますか？
または、エラーコードが表示されていませんか？



点検ポイント 2

送風チューブが折れ曲がったり、ヨジレたりしていませんか？

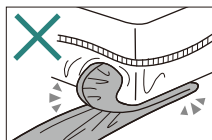


点検ポイント 3

カプラーはポンプに正しく差し込まれていますか？




点検ポイント 4

ヘッドアップセンサの青いプラグが奥までしっかりと差し込まれていますか？

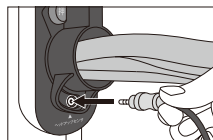


点検ポイント 5

送風チューブがカプラーから外れていませんか？

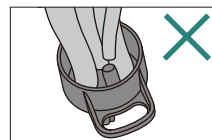


点検ポイント 6

カプラーが破損(割れ、カケ、ひび)していませんか？

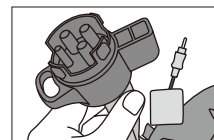


点検ポイント 7

頭側の送風チューブのエア抜き栓が外れていませんか？

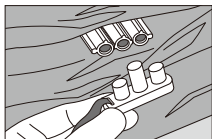


点検ポイント 8

全てのエアセルが送風チューブ(Tコネクター)と繋がっていますか？

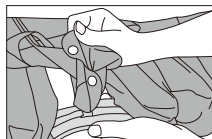


点検ポイント 9

エアセルが破損していませんか？

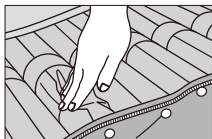


点検ポイント 10

エアフィルターに汚れが溜まりすぎていませんか？

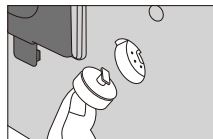

点検ポイント 11

電源コード・プラグは破損していませんか？

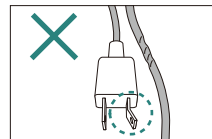

注意

CPR対応機能(緊急時エア抜き機能)使用後やカプラーを一時的に外した際、マット内の空気が一度に流失することにより内圧異常のエラーコードが表示される場合があります。電源プラグの抜き差しを一度行ないリセットした上でご使用を続けてください。

上記の方法で問題が解決しない場合

- ご使用中を中止し、他のマットレスへの交換を行なってください。
- 空気が入らない等の異常な状態で使用を継続すると、事故に繋がる危険性があります。このような場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店、レンタル事業者もしくは株式会社ケーブまでお問い合わせください。