

体圧分散式エアマットレス／床ずれ防止用具

上敷きタイプ **エアドクター**



# AIR DOCTOR

LONG SELLER & BASIC MODEL

AIR-DOCTOR  
CAPE

LOVING CARE  
**CAPE**

ゼロ褥瘡をめざして

# シンプルな操作で適正な圧力管理。 床ずれ防止エアマットレスの ベーシックモデル「エアドクター」。




※下のベッドマットレスは別売りです。

## 簡単操作で最適な床ずれ防止環境をつくる 圧力センサによる内圧自動制御システム



体重設定ダイヤルを療養者の体重に合わせるだけの簡単操作。エアセルの内圧をエアポンプ内蔵の圧力センサが圧力管理し、療養者の体重に合わせた理想的な体圧分散環境を作り出します。

## 身体を支えるポイントを変えながら圧を開放する 交互膨縮システム

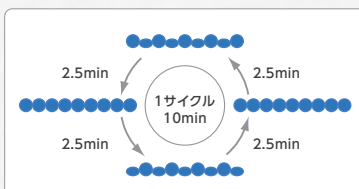


20本のエアセル(空気の筒)が交互に膨張・収縮を繰り返し、体圧が特定箇所に加わり続けることを防ぎます。

## いざという時の 安全対策



停電などの時、マットレス内の空気漏れを防ぐ「送風チューブ栓」を装備。

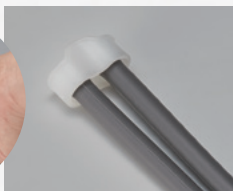

マットレスのパンクや内圧低下を電源ランプの点滅でお知らせする内圧警告機能を搭載。

## 省スペースデザイン 薄型ポンプ



居住空間を意識した薄型設計。フットボードにかけやすいポンプフック仕様。

## 万一の場合も安心、経済的な メンテナンス性



エアセルの素材は環境にやさしいポリウレタンフィルム。エアセル等、各部品のみの交換が可能。エアポンプは3年保証。

## 防水機能と優れた伸縮性 防水、抗菌防臭、伸縮カバー



カバーは、お手入れが簡単な清拭タイプ。体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。

### エアポンプは3年間の保証付き

\*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。  
\*エアドクターの取り扱いに当たっては、付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。  
\*印刷の関係で実物とは色が違うことがあります。\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

エアドクター		介護保険 福祉用具貸与対象品目 TAISコード 00206-000014		
セット価格	110,000円(+税)			
タイプ/品番	840/CR-238	900/CR-268		
専用 マットレス	単品価格	58,000円(+税)		
	品番	CR-279	CR-289	
	サイズ	幅84×長192×厚9cm	幅90×長192×厚9cm	
	重量	3.3kg	3.4kg	
	材質	エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工 <b>抗菌</b> ベースシート:ナイロンオックス		
	エアセル数	20本		
専用カバー (マットレス付属品)	単品価格	9,600円(+税) ※カバーのみ購入価格		
	品番	CH-279		
	材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 <b>防水・抗菌防臭・伸縮</b>		
	専用ポンプ	単品価格	52,000円(+税)	
	品番	CR-259		
	サイズ	幅24.4×高17.9×奥8.9cm (ポンプフック装着時/幅24.4×高18.2×奥14.5cm) ACコード:4m		
重量	1.8kg			
材質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂			
その他	定格:AC100V,5W,50/60Hz			

※マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。

## ■製造販売元 株式会社 ケープ

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522  
E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

商品に関する詳しい情報は、  
ケープのホームページをご覧ください。

<https://www.cape.co.jp/>

お問い合わせ先