

簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

エアドクター

操作方法

電源ON/OFFの方法

■電源ON

電源プラグをコンセントに差し込むだけで電源が入ります。

■電源OFF

電源プラグをコンセントから抜きます。

体重設定の方法

ご使用者の体重にツマミを回して合わせます。

設定範囲 30～90Kg



確認

■ポンプ音が異常に大きい

ポンプの上に物がないか確認
他の物との接触を確認

■ポンプが作動しない

コンセントの接続確認

■マットが膨らまない

空気もれの可能性があり
裏面「確認事項」を再確認

■上記の方法で問題が解決しない場合、
ご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

簡単ガイド

安心・安全にご利用いただくために

※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、このガイドをご利用ください

使用手順

エアドクター

- 1 専用マットをベッドマットレスに固定
- 2 専用ポンプに送風チューブを接続 …確認
- 3 専用カバーを専用マットに固定
- 4 専用ポンプをベッドの足元に設置
- 5 専用ポンプのプラグをコンセントに差し込む
- 6 ご使用者の体重に設定 ※約10分程度で使用可能
- 7 ご使用者をエアマットの上へ移動



確認

- 送風チューブを専用ポンプ差し込み口に奥までしっかり差し込む
- 送風チューブの折れ曲がり、ベッドへの挟み込みを確認
- エアセルどうしをつなぐ送風チューブがしっかりと接続されていることを確認

エアドクターに関して

「おかしいな?」「故障かな?」「困ったな?」と思った時はご購入先またはレンタル業者までお問い合わせください。

店名