

体圧分散式マットレス


キュオラ

取扱説明書

ご使用になる前に本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

交換タイプ

ベッドの上にそのまま敷いてご使用ください。

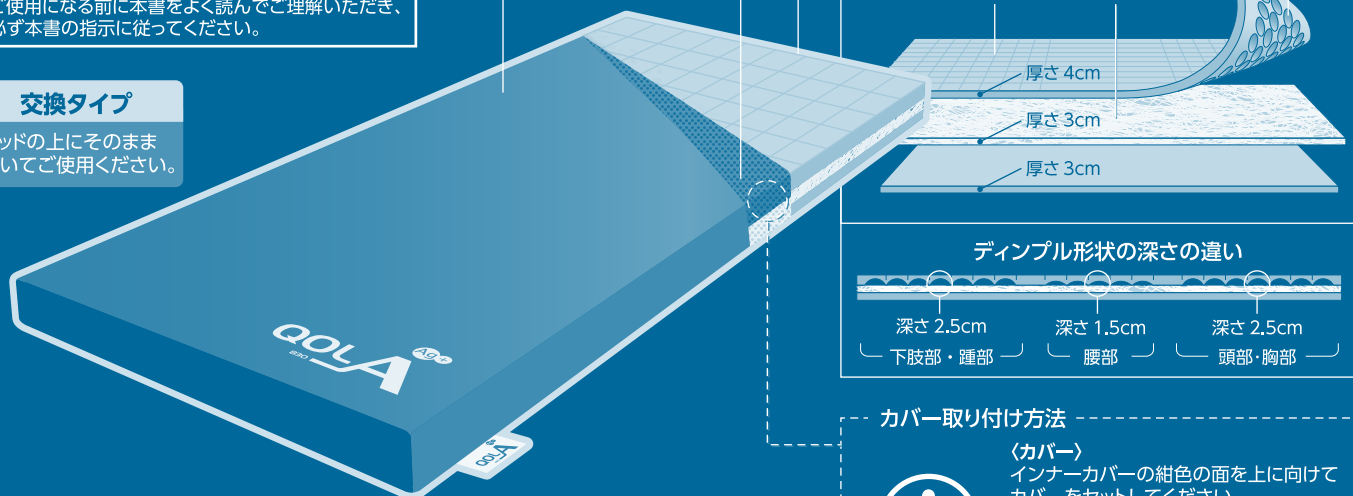

キュオラは、超通気・高弾性ウレタンフォームと三次元スプリング構造体「プレスエア®」を採用したムレ対策と安定感に優れたマットレスです。丸洗いができ、カバーには抗菌・消臭機能を備えているので、衛生かつ快適に使用できます。

カバー取り付け方法



〈カバー〉
インナーカバーの紺色の面を上に向けてカバーをセットしてください。

〈インナーカバー〉
ウレタンフォームのスリット面とインナーカバーの紺色の面が合うようにセットしてください。

重要安全情報



このマークに従わずに使用された場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告します。

- 1 ウレタンフォームマットレスは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。心臓マッサージ等、硬い床などの上ではないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。
- 2 ウレタンフォームマットレスのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。

使用上のご注意

- ご使用の際は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- ご使用になる前にマットレス上面に異物がないかご確認ください。異物があるまま使用するとケガや事故の原因になる場合があります。
- ロゴプリントがある面を上にして、ベッド上(床・畳)にそのまま敷いて使用してください。
- 突起物のある場所にマットレスを敷いて使用しないでください。
- 専用カバーを被せた状態で必ず使用してください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。体圧分散効果を妨げる場合があります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマットレス破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位で使用してください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- マットレスの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストーブなどの火に近づけないでください。
- 新品でウレタン臭がきつい場合は、カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、臭いが発散します。
- ウレタンフォームに「永久歪み(ヘタリ)」や「破損」が見られた場合は、交換をお願いいたします。

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥・消毒やその他ご不明な点については、株式会社ケーブまでお問い合わせください。

カバー

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

洗濯

通気タイプ／防水タイプ（カバーは取り外して洗濯してください）

- ・汚物（汚れ、便、血液等）を取り除いてください。
- ・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。

お願い

- ・カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ・素材の特性上、洗濯後ある程度の縮みが生じることがありますが、使用上の品質に問題はありません。（通気タイプ）
- ・ドライクリーニング（石油系は除く）、オートクレープは表面のポリウレタン樹脂を傷めますので使用しないでください。（防水タイプ）
- ・アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。（防水タイプ）



防水カバーを洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まることにより、洗濯機に負荷が掛かり故障や異常振動による転倒事故を招く危険があります。お客様の都合により洗濯機を使用される場合は、防水部分に溜まった水を大きめに洗い流すことで、脱水を行ってください。

清拭

防水タイプ

- ・汚物（汚れ、便、血液等）を取り除いて、水または、中性洗剤を水で薄めたものでマットレスの表面を拭いてください。
- ・消毒用エタノールを使用する場合は濃度70%以上83%以下、次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は濃度1,000ppm(0.1%)以下での清拭が可能です。



- 次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、使用する次亜塩素酸ナトリウム液の使用法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。
- 消毒液を利用した空間噴霧は、目や皮膚などへの刺激、および吸入により人体へ影響を及ぼす可能性があります。取扱いには十分ご注意ください。

ウレタンフォーム

（洗浄する際はインナーカバーを取り外さないでください）

- ・水温は30℃を限度とし中性洗剤を使用し手で押し洗いをしてください。
- ・フォームを上下に振って水抜きをしてください。手絞りは避けてください。
- ・日陰で平干ししてください。
- ・カビ等の発生を防ぐために十分に乾燥させてからご使用ください。

※ウレタンが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。
※本品は家庭用洗濯機に対して大きすぎるため、家庭用洗濯機は使用しないでください。

インナーカバー

（取り外してお手入れする場合）

- ・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・タンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。

お願い

- ・カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ・素材の特性上、洗濯後ある程度の縮みが生じることがありますが、使用上の品質に問題はありません。

※使用可能な消毒薬一覧（カバー）

- ・塩化ベンザルコニウム 0.5%以下
- ・塩化ベンゼトニウム 0.5%以下
- ・グルコン酸クロルヘキシジン 5%以下
- ・IGB液（イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒド、緩衝剤）
- ・MRガス
- ・オゾンガス 0.5ppm以下
- ・ホルムアルデヒドガス
- ・過酸化水素水 3%以下

使用不可

- ・クロロホルム
- ・クレゾール
- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・トルエン
- ・メチルエーテル

保管方法

- ・圧縮された状態や曲げた状態での保管は避けてください。「損傷」や「永久歪み（ヘタリ）」の原因となります。
- ・上に重いものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。
- ・高温・多湿の場所は避けてください。

マットサイズの識別方法
(通気タイプ・防水タイプ共通)

- ・カバー上面プリント・タグに表記しています。
- ・カバーのファスナー色でも確認できます。
- 830タイプ : 濃紺色
- 900タイプ : 灰色
- 830/SHORTタイプ : 赤色
- 900/SHORTタイプ : 水色

運搬方法

ベルトに腕を通し、ハンドル部を握ってください。



仕様

		通気タイプ				防水タイプ			
セット	タイプ品番	830 CR-590	900 CR-591	830/SHORT CR-592	900/SHORT CR-593	830 CR-594	900 CR-595	830/SHORT CR-596	900/SHORT CR-597
	サイズ(幅×長×厚cm)	83×191×10	90×191×10	83×180×10	90×180×10	83×191×10	90×191×10	83×180×10	90×180×10
	重量	6.5Kg	7.0Kg	6.1Kg	6.6Kg	6.5Kg	7.0Kg	6.1Kg	6.6Kg
	マットレス材質	<1層目>超通気高弾性ウレタンフォーム(特殊ディンプル加工+スリット複合形状) <2層目>三次元スプリング構造体プレスエア®(制御)<3層目>超通気高弾性ウレタンフォーム <インナーカバー>ポリエステルメッシュ							
専用カバー	品番	CH-590	CH-591	CH-592	CH-593	CH-594	CH-595	CH-596	CH-597
	カバー材質	<上面・側面> ポリエステルドライメッシュ(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)				<上面・側面> ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・消臭・伸縮)			
		<下面> ナイロンオックス				<下面> ナイロンオックス			