


特殊寝台付属品／ベッドマットレス

メリー&ハリー


取扱説明書

ご使用になる前に本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

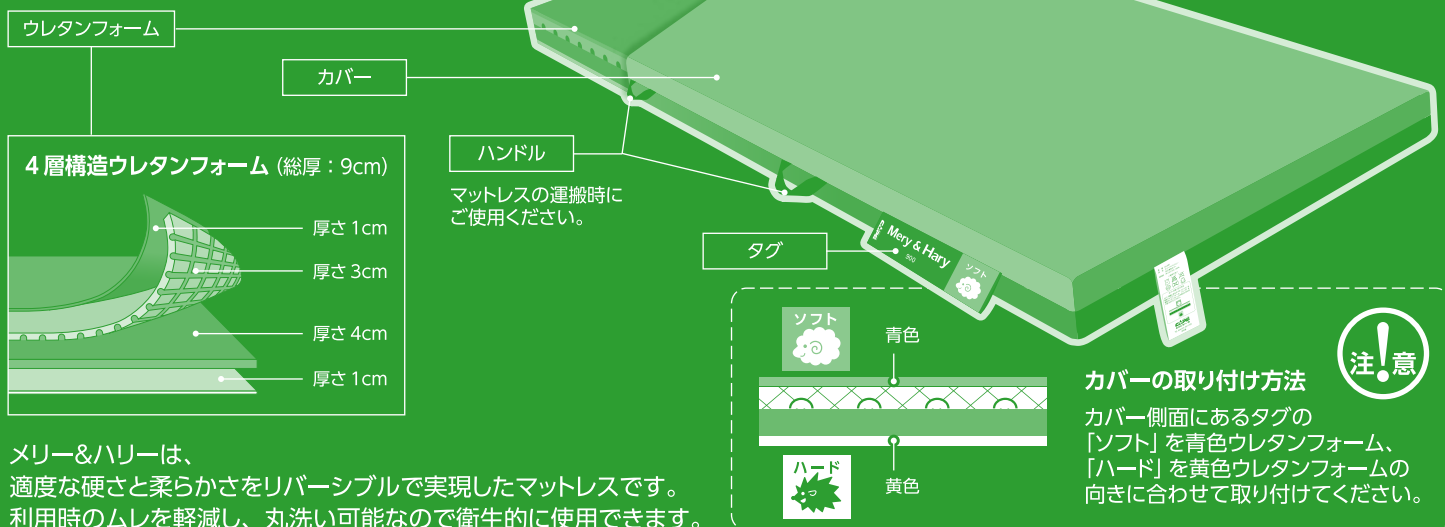


寝心地が選べる「リバーシブルタイプ」

タグの表示を目安にご使用面をお選びください。

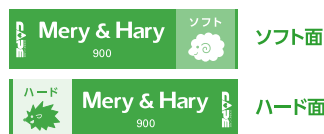

4層構造ウレタンフォーム (総厚: 9cm)

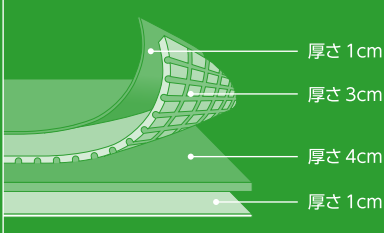

メリー&ハリーは、適度な硬さと柔らかさをリバーシブルで実現したマットレスです。利用時のムレを軽減し、丸洗い可能なので衛生的に使用できます。

カバーの取り付け方法

カバー側面にあるタグの「ソフト」を青色ウレタンフォーム、「ハード」を黄色ウレタンフォームの向きに合わせて取り付けてください。

注意

重要安全情報



このマークに従わずに使用された場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告します。

- 1 ウレタンフォームマットレスは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。心臓マッサージ等、硬い床などの上ではないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。
- 2 ウレタンフォームマットレスのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。

使用上のご注意

- ご使用の際は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- ご使用になる前にマットレス上面に異物がないかご確認ください。異物があるまま使用するとケガや事故の原因になる場合があります。
- お好みのかたさの面を選び、ベッド上(床・畳)にそのまま敷いて使用してください。
- 突起物のある場所にマットレスを敷いて使用しないでください。
- カバーを被せた状態で必ず使用してください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。本来の機能を発揮できない恐れがあります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマットレス破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位で使用してください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- マットレスの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストーブなどの火に近づけないでください。
- ベッドメイクの際には、ハンドルが露出しないよう必ずマットレス側面をシートで覆ってください。ハンドルが露出した状態で使用すると、手や足などを引っ掛けてケガをする恐れがあります。また、ベッドの背上げ時にサイドレールに引っ掛かり、マットレスがずれるなど思わぬ事故やマットレス破損の原因になります。
- 新品でウレタン臭がきつい場合は、カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、臭いが発散します。
- ウレタンフォームに「永久歪み(ヘタリ)」や「破損」が見られた場合は、交換をお願いいたします。

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥・消毒やその他ご不明な点については、株式会社ケーブまでお問い合わせください。

■カバー

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

- ・カバーは取り外して洗濯してください。
- ・汚物（汚れ、便、血液等）を取り除いてください。
- ・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・タンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰吊り干しをしてください。

※カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
 ※タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
 ※乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
 ※素材の特性上、洗濯後ある程度の縮みが生じることがありますが、使用上の品質に問題はありません。

■ウレタンフォーム（洗浄する際はカバーを取り外してください）

- ・40℃までの水温で水洗いが可能です。
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。
- ・軽く水を抜き、日陰で平干ししてください。
- ・カビ等の発生を防ぐために十分に乾燥させてからご使用ください。

※ウレタンが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。
 ※本品は家庭用洗濯機に対して大きすぎるため、家庭用洗濯機は使用しないでください。

※使用可能な消毒薬一覧（カバー）

- ・塩化ベンザルコニウム 0.5%以下
- ・IGB液（インプロピルアルコール、グルタルアルデヒド、緩衝剤）
- ・オゾンガス 0.5ppm以下
- ・ホルムアルデヒドガス
- ・グルコン酸クロルヘキシジン 5%以下
- ・MRガス
- ・過酸化水素水 3%以下

使用
不可

- ・クロロホルム
- ・クレゾール
- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・トルエン
- ・メチルエーテル

保管方法

- ・圧縮された状態や曲げた状態での保管は避けてください。「損傷」や「永久歪み（ヘタリ）」の原因となります。
- ・上に重いものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。
- ・高温・多湿の場所は避けてください。

マットサイズの識別方法

- ・タグに表記しています。
 - ・カバーのファスナー色でも確認できます。
- 830タイプ : ベージュ
 900タイプ : ダークグレー
 900/SHORTタイプ : 赤色
 900/LONGタイプ : 茶色

仕様

セット	タイプ 品番	830 CR-680	900 CR-681	900/SHORT CR-682	900/LONG CR-683
	サイズ (幅×長×厚cm)	83×191×9	90×191×9	90×180×9	90×205×9
	重量	6.5Kg	7.0Kg	6.6Kg	7.5Kg
	マットレス 材質	<1層目・2層目>超通気高弾性ウレタンフォーム <3層目・4層目>超通気ウレタンフォーム			
専用 カバー	品番	CH-680	CH-681	CH-682	CH-683
	カバー材質	ポリエステル100%(吸水速乾・制菌・消臭・伸縮)			