


体圧分散式ウレタンフォームマットレス

ソフトナースプラス

取扱説明書

上敷タイプ

必ずベッドマットレス
の上に敷いて
ご使用ください

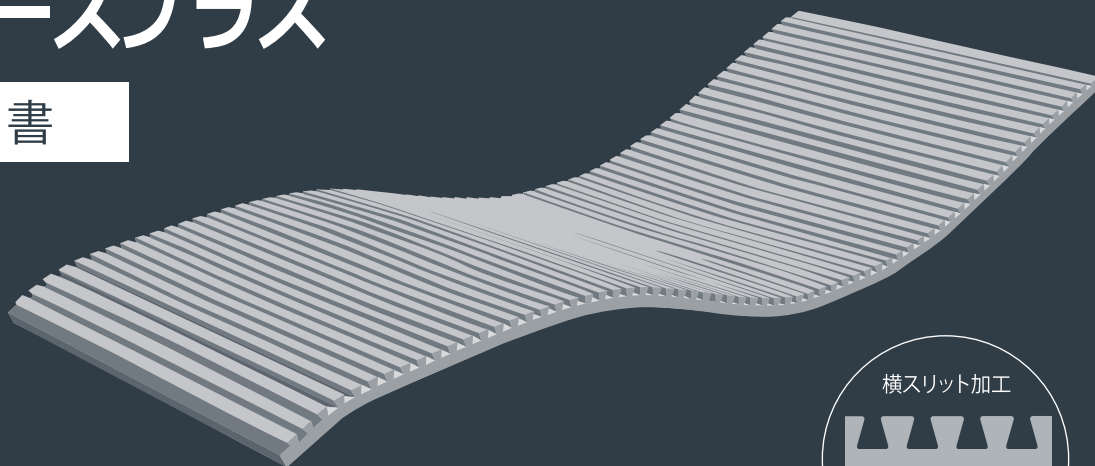

横スリット加工

凹凸面を上
に敷いてください

ソフトナースプラスは、
超通気・高密度低反発ウレタンフォーム素材を使用したオーバーレイタイプのマットレスです。
逆三角形の横スリットがずれに追従し、低反発素材でありながら洗浄が可能です。

安全にお使いいただくために

ウレタンフォームマットレスの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

ウレタンフォームマットレスのご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



警告：このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「警告1」、「警告2」にまとめて記載します。



1 ウレタンフォームマットレスは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。



2 ウレタンフォームマットレスのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上で使用ください。ご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家にご相談ください。病状悪化や事故の恐れがあります。

※ご使用者の身体に発赤（褥瘡）が見られる場合には、直ちに使用を中止してください。

※湿疹などのアレルギー症状が見られる場合には、直ちに使用を中止してください。

使用上のご注意

- ご使用の際は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- ご使用になる前に、マットレス上面に異物がないかご確認ください。異物があるまま使用するとケガや事故の原因になる場合があります。
- 凹凸がある面を上にして、必ずマットレス等を下に敷いてご使用ください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。体圧分散効果を妨げる場合があります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマットレス破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位でご使用ください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- マットレスの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストープなどの火に近づけないでください。
- ウレタンフォーム上に気泡上の穴が見られる場合がありますが、これは製造上生じるもので本品の特性を損なうものではありません。
- 新品でウレタン臭がきつい場合は、カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで臭いが発散します。
- ウレタンフォームに「永久歪み（へたり）」や「破れ」が見られた場合は、交換をお願いします。
- 一般的にウレタンフォームは人体に無害であると考えられておりますが、幼児や子どもが口に入れないようにご注意ください。

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥、その他ご不明な点については、株式会社ケーブまでお問い合わせください。

■ 洗浄方法

- ・ 洗濯機を使用する場合は、予めぬるま湯に浸すことをお勧めします。マット全体が柔らかくなります。適度に絞った後に洗濯機へ入れてください。
- ・ 本品を3分割に切ることで、洗濯時の取り扱いがさらに容易になります。
- ・ 水温95℃以下で洗濯してください。
- ・ 本品の損傷を軽減するため、洗濯ネットをご使用ください。
- ・ 洗剤は中性洗剤をご使用ください。
- ・ 塩素系漂白剤は使用できません。
- ・ 形を整え、日陰で平干しをしてください。
- ・ お客様のご都合により乾燥機を使用する場合は、100℃以下で乾燥してください。乾燥後は形を整え、日陰の風通しの良い場所で自然乾燥を行ってください。
- ・ カビ等の発生を防ぐために十分に乾燥させてからご使用ください。

※ウレタンが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。

※タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。

■ 消毒方法

アルコール系：消毒用エタノール、イソプロパノール

*必要に応じて、その他の消毒液を使用する際は、お問い合わせください。

- ・ 本品は汗などを吸収・拡散・蒸発させますが、その他の成分はフォーム内に残留します。
- ・ 1～3ヶ月毎の洗濯をお勧めいたします。また汚染した場合には、その都度洗濯を行ってください。
- ・ オートクレーブによる滅菌の場合、105℃まで可能です。(メーカー推奨)

保管方法について

- ・ 圧縮された状態での保管は避けてください。「亀裂」や「永久歪み(へたり)」の原因となります。
- ・ 上に重いものを置かないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所は避けてください。

仕様

品番	CR-299
サイズ	幅 83cm× 長 191cm× 厚 4cm ※一般ベッド、検査台、手術台などに対応
重量	2.7 kg
材質	高密度低反発ウレタンフォーム