


小児用体圧分散マットレス

# ペディケアマットレス

## 取扱説明書

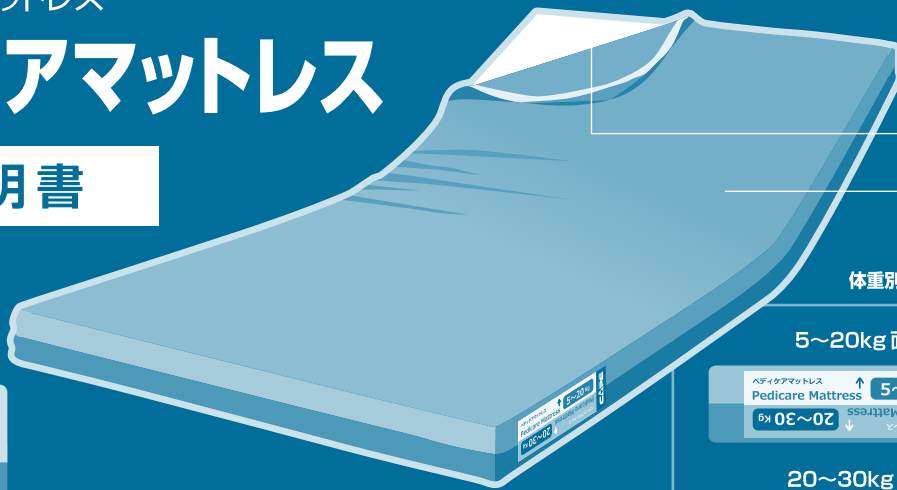

ウレタンフォーム

カバー

体重別にご選ぶ「リバーシブル構造」

5～20kg 面

低反発ウレタンフォーム



20～30kg 面

粘弾性ウレタンフォーム  
(特殊プロファイル加工)



低反発ウレタンフォーム

注意：カバーの取り付け時には、必ずウレタンフォームの材質とカバーのタグ表示が合うようにセットしてください。

頭側挙上45度以上→**上敷タイプ**  
頭側挙上しない→**交換タイプ**

カバー側面のタグ表示を目安にご使用面をお選びください。

ペディケアマットレスは、  
30kg 未満の患児に最適な「沈み込み」と「順応性」を両立した体圧分散マットレスです。  
体重別でご選ぶリバーシブル構造なので、幅広い患児に対応できます。

## 安全にお使いいただくために

ウレタンフォームマットレスの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

### 重要安全情報

ウレタンフォームマットレスのご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



**警告：** このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「警告1」、「警告2」にまとめて記載します。



**1** ウレタンフォームマットレスは身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。



**2** ウレタンフォームマットレスのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。

### 使用上のご注意

- ご使用になる前に、マットレス上面に異物がないか確認してください。異物があるままで使用するとケガや事故の原因になる場合があります。
- 頭側挙上45度以上が想定される場合は必ずマットレス等を下に敷いて使用してください。頭側挙上しない場合はベッドの上にそのまま敷いて使用してください。
- 突起物のある場所にマットレスを敷いて使用しないでください。
- 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。マットの効果が薄れる場合があります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れやマット破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位で使用してください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- マットレスの端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストープなどの火に近づけないでください。
- 新品でウレタン臭がきつい場合は、カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、臭いが発散します。
- ウレタンフォームに「永久歪み(へたり)」や「破れ」が見られた場合は、交換をお願いいたします。



## お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

### カバー

#### 洗濯 (カバーは取り外して洗濯してください)

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル (洗濯ラベル) をご参照ください。

- ・汚物 (汚れ、便、血液等) を取り除いてください。
- ・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。



防水カバーを洗濯機で脱水する場合、防水部分に水が溜まることにより、洗濯機に負荷が掛かり故障や異常振動による転倒事故を招く危険があります。お客様の都合により洗濯機を使用される場合は、防水部分に溜まった水を大まかに取り除いた上で、脱水を行ってください。



- ・カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ・ドライクリーニング (石油系は除く)、オートクレープは表面のポリウレタン樹脂を傷めますので使用しないでください。
- ・アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。

### 清拭

- ・汚物 (汚れ、便、血液等) を取り除いて、水または、中性洗剤を水で薄めたものでマットレスの表面を拭いてください。
- ・消毒用エタノールを使用する場合は濃度 70% 以上 83% 以下、次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は濃度 1,000ppm (0.1%) 以下での清拭が可能です。



●次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、使用する次亜塩素酸ナトリウム液の使用法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。

●消毒液を利用した空間噴霧は、目や皮膚などへの刺激、および吸入により人体へ影響を及ぼす可能性があります。取扱いには十分ご注意ください。

#### ※使用可能な消毒薬一覧 (カバー)

- ・塩化ベンザルコニウム 0.5%以下
- ・塩化ベンゼトニウム 0.5%以下
- ・グルコン酸クロルヘキシジン 5%以下
- ・IGB 液 (イソプロピルアルコール、グルタルアルデヒド、緩衝剤)
- ・MR ガス
- ・オゾンガス 0.5ppm 以下
- ・ホルムアルデヒドガス
- ・過酸化水素水 3% 以下

使用  
不可

- ・クロロホルム
- ・クレゾール
- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・トルエン
- ・メチルエーテル

### ウレタンフォーム

洗浄、消毒に対応しておりません。

療養者の発汗などにより、マットレス内部には徐々に湿気が溜まります。

カビ等の原因になるため、定期的にかバーを取り外して半日程度の日陰干しを推奨致します。

※ウレタンが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。

## 保管方法について

- ・圧縮された状態での保管は避けてください。「亀裂」や「永久歪み (ヘタリ)」の原因となります。
- ・上に重いものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。

### 仕様

品番	CR-229
サイズ	オーダーメイド 上限:幅 95cm×長 195cm (厚みは全て 7cm) ※小児・学童用ベッド・一般ベッド・開放型保育器などに対応
マットレス材質	5~20kg 面 / 低反発ウレタンフォーム、20~30kg 面 / 粘弾性ウレタンフォーム (特殊プロファイル加工)
専用カバー	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)