


# 取扱説明カード

携帯型接触圧力測定器

## パームQ

安心・安全にお使いいただくために  
※取扱説明書、注意事項を必ずご一読の上、  
このカードをご利用ください。

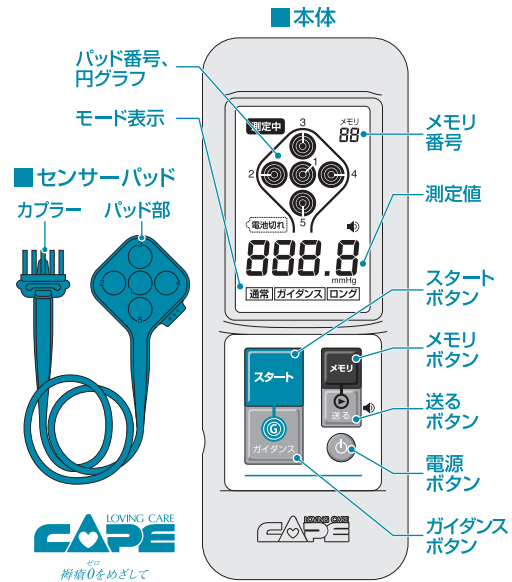

円グラフは以下の範囲で外側から順に表示されます。



- 1段階: 1.0~29.9mmHg以下
  - 2段階: 30.0~59.9mmHg以下
  - 3段階: 60.0~89.9mmHg以下
  - 4段階: 90.0mmHg以上
- 表示されている数値は  
最高値を表示しています。

### 測定手順 (ガイダンスモードから測定する)

- 1 本体とセンサーパッドを接続する  
※パッド部をデイスポーザブルの薄いビニール袋で覆う
- 2 電源 ボタンを押して電源を入れる
- 3 ガイダンス ボタンを押す ※[ガイダンス]マークが表示される
- 4 センサーパッドを測定部位に設置する  
※「おもて」や1~5の数字が刻印されている面を身体側に
- 5 液晶画面を見ながら、中央のパッド(番号1)の  
接触圧力が一番高くなるようにパッドの位置を調整する
- 6 スタート ボタンを押して測定開始
- 7 約12秒で最高値のパッド番号・グラフが点滅し、  
最高圧力値が測定表示部に表示

### ロングタームモードを使う (ガイダンスモードから測定する)

パッド1~5のポイントを任意に選択し、連続測定ができるモード

- 1 電源が入った状態で [ガイダンス] ボタンを押す
- 2 センサーパッドを測定部位に設置する
- 3 スタート ボタンを長押し(1秒以上)する
- 4 ロングタームモードに移行し、そのまま測定が開始  
パッド1の数値が表示され、[送る] ボタンでパッド1~5の  
確認したい数値を順次表示

### メモリ機能を使う

最大25件、最高圧力値だけでなく、  
5か所すべてのパッドの測定値を記憶  
※ロングタームモードでの測定値はメモリできません

■測定値をメモリする

- 1 通常モードの測定終了後に [メモリ] ボタンを押す
- 2 メモリ番号が2回点滅してデータがメモリされる

■メモリを呼び出す

- 1 通常モード時に [メモリ] ボタンを長押し(1秒以上)
- 2 メモリ番号が点滅し、メモリ01の最高圧力値を表示
- 3 [送る] ボタンを押すごとに次のメモリ番号の  
最高圧力値を表示
- 4 再度 [メモリ] ボタンを押すと、最高圧力ポイントの  
パッド番号と円グラフが点滅
- 5 [送る] ボタンを押すと順に1~5の  
パッド毎の測定値を表示
- 6 スタート ボタンを押すと通常モードに戻る

■メモリを消去する(全消去のみ)

- 1 電源が入っていない状態で、[メモリ] ボタンを押したまま  
電源 ボタンを押して電源を入れる  
メモリが全消去される