

# ポジショニングクッション サポタイト

## 取扱説明書



標準枕



三角枕



ブーメラン

ポジショニングクッション サポタイトは、  
体位変換や姿勢保持に活用できるシンプルな形とサイズのクッションです。  
使用部位や用途に合わせてお選びいただけます。

## 安全にお使いいただくために

ポジショニングクッション サポタイトの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

### 重要安全情報

ポジショニングクッション サポタイトのご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「警告 1」、「警告 2」にまとめて記載します。



**1** ポジショニングクッション サポタイトをご使用の際は、必ず専門家とご相談の上で使用ください。使用中、身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止めてください。



**2** ベッド上でポジショニングクッション サポタイトをお使いの場合は、ベッドからの落下、転落を防ぐために必ずサイドレールを取り付けてご使用ください。

### 使用上のご注意

- 体格や目的に合わせてクッションを適切に選択してください。  
ふさわしくない選択をすると十分な効果が得られないことがあります。
- クッションの中身が偏っている場合は、必ず形を整えてからご使用ください。
- 呼吸を妨げないよう配慮して設置してください。特に、うつ伏せや横向きの場合の顔付近の設置には注意してください。
- 鋭利なものでキズや穴を開けないでください。  
万が一内容物が飛び出した場合はすぐに使用を中止し、内容物が口や鼻などに入らないよう注意してください。
- 火、または高熱になるものを製品の近くで使用しないでください。製品を破損させたり、火災の原因になる恐れがあります。
- 洗浄や保管をする場合は、本書や品質表示タグの説明に従ってください。  
不適切な管理をすると、破損やカビの発生原因になるほか、耐久性が落ちることがあります。

## お手入れ方法

### 洗濯方法

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

- ・温水での洗濯は 80℃まで対応可能です。
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。
- ・本品の損傷を軽減するため、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤、漂白剤は使用できません。
- ・生地の特性上、洗濯によりシワや多少の縮みが生じる場合がありますが使用上問題はありません。
- ・洗濯槽にクッションが入らない場合は、やさしく手押し洗いを行ってください。
- ・洗濯後十分に水気を取り除いてから形を整え、風通しの良い場所で陰平干しをしてください。
- ・乾燥機を使用する場合は、80℃以下に設定してください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機使用による乾燥後すぐに、袋詰め等での密封は控えてください。
- ・乾燥機による乾燥後は形を整え、日陰の風通しの良い場所で自然乾燥を行ってください。
- ・ダニやカビ発生を防ぐために十分に乾燥させてからご使用ください。

### 保管方法

- ・圧縮された状態での保管は避けてください。破損やへたりの原因となります。
- ・湿気の多い場所での保管は避けてください。カビ発生の原因となります。
- ・上に重い物を乗せないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。

## 仕様

品名	標準枕
品番	CK-430
JAN	4939810007687
寸法 (cm)	約 23×34
材質	カバー：ポリエステル 65%、綿 35% 中身：ウレタンフォーム（ランダムカット、マイクロキューブカット）

品名	三角枕
品番	CK-431
JAN	4939810007694
寸法 (cm)	約 60×24
材質	カバー：ポリエステル 65%、綿 35% 中身：ウレタンフォーム（ランダムカット、マイクロキューブカット）

品名	ブーメラン
品番	CK-432
JAN	4939810007700
寸法 (cm)	約 54×83
材質	カバー：ポリエステル 65%、綿 35% 中身：ウレタンフォーム（ランダムカット、マイクロキューブカット）

1611-C