


RM6-H



下肢挙上のサポート



背部のサポート

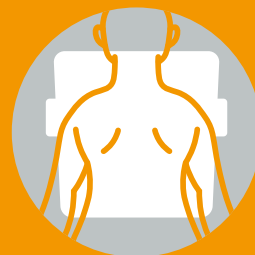

腹臥位のサポート

下肢の挙上にも最適。
高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。


※内部ウレタンフォームは洗えません。



ロンボメッド+ウレタンフォームの構造と、独自の形状が、体圧分散性と安定感を両立しました。

● 2層構造で、優しくフィット+しっかり保持。

● 広い面を持った台形形状と傾斜面がポイント。

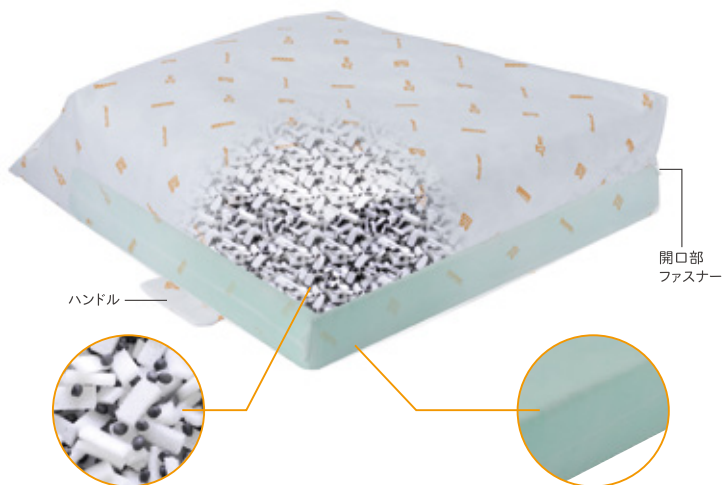

ロンボメッド(スニベット+チップ)

広い面で優しく保持
身体の形状にフィットするスニベットと、へたりにくい特殊な形状の発泡チップが、身体を優しく保持。

内部ウレタンフォーム

内部に固形のウレタンフォームを入れることで、沈み込みを抑え、安定して身体を保持します。

洗濯について


内部ウレタンフォームは洗えませんので、洗浄時にはファスナーを開けて取り外してください。

下肢の挙上に適した傾斜構造


RM6-Hは傾斜をつけ、大腿部からふくらはぎまで広くサポートでき、仙骨部への重さの集中を軽減します。




足先に向かって幅が広く、下肢が外旋するご利用者にも使いやすい形状です。

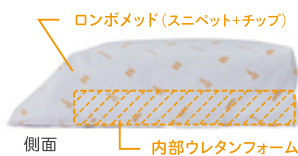


〈RM6-Hの使用例〉

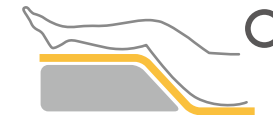


下肢全体を支えて、体圧を分散します。

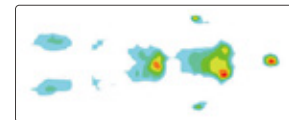

〈ふとんなどを使った場合〉

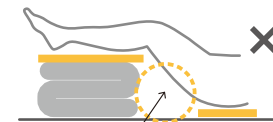

隙間があると姿勢も崩れやすく、仙骨部周辺に体圧が集中しやすくなります。

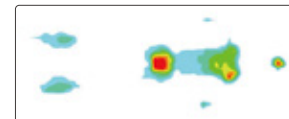


低 ← → 高


クッションひとつで高さを保持し、安定感よく、体位をサポートできます。



下肢挙上のサポート

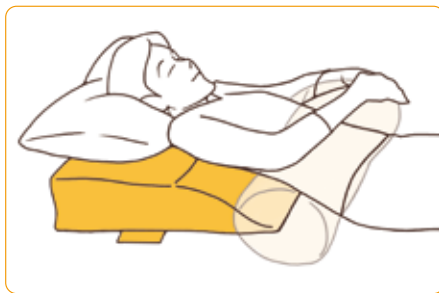

角度の低い背上げ/
軽い円背の方の仰臥位の背部サポート

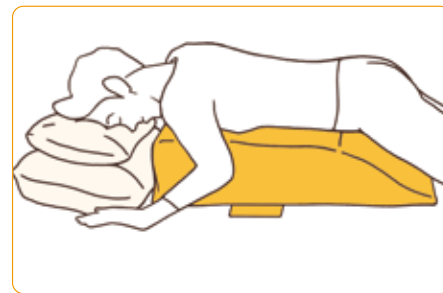

腹臥位のサポート

POINT!

中身のメッド素材が下肢の形状に沿い、優しく保持しながら、安定して下肢を支えることができます。

オプションカバー(別売)

洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。

- 通気タイプ RM6C
- 防水タイプ RM6-HCB(ハンドル付き)
- 清拭防水タイプ RM6-HCS(ハンドル付き)

[防水タイプ]



[清拭防水タイプ]



体位変換器 介護保険/福祉用具貸与対象品目
ロンボRM6-H防水カバーセット TAISコード 00206-000145
ロンボRM6-H清拭防水カバーセット TAISコード 00206-000155

*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。
*商品の取扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

輸入元 ラックヘルスケア株式会社

本 社 / 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番2号
TEL.06-6244-0636 FAX.06-6244-0836
<https://www.ing-professional.com/>

販売元 株式会社 ケープ

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

タイプ	RM6-H	価 格	22,000円(+税)	TAIS コード	00245-000245
サイズ	幅62cm×長65cm×高15cm(ハンドル部は除く)				
材 質	●表側地 綿50%、ポリエステル50% ●中身 (充填物)ロンボメッド(ポリウレタンスニベット50%、ポリプロピレンビーズ50%) (内部ウレタンフォーム)ポリウレタンフォーム				
専用カバーのみ購入価格	通気タイプ RM6C / 6,400円(+税) 防水タイプ RM6-HCB / 7,300円(+税) 清拭防水タイプ RM6-HCS / 8,000円(+税)				

お問い合わせ先

商品に関する詳しい情報は
ケープのホームページをご覧ください

<https://www.cape.co.jp/>