

# Cuburena<sup>®</sup> Cushion

キューブレナ<sup>®</sup> クッション

介護保険 福祉用具貸与対象品目 / 車いす付属品 貸与マーク取得済み




エアセルと高硬度ウレタンフォームを組み合わせた新発想の高機能エア式ハイブリッドクッション。調圧バルブを開けてわずか10秒で、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。

## クッションの構造・特長



### 高硬度ウレタンベース層により姿勢保持をアシスト

3層目の高硬度ウレタンベースにより車いすのスリングシートのたわみを補正。スラントサポートとフロントサポートにより、正しい座位姿勢をアシストします。

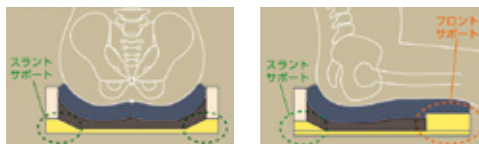

#### ■スラントサポート

骨盤の後傾や左右の傾きを抑制します。

#### ■フロントサポート

前方への体のずれと骨盤の後傾を抑制します。

### オリジナル構造のバルブで内圧を自動調整

調圧バルブを開けて「わずか10秒」待つだけ。調圧バルブがエアセル内の内圧を自動で調圧し、療養者の体重や体型に応じた最適な座面を簡単に作ります。



#### ■調圧バルブ

バルブをあけるだけでエアセル内の圧力を最適に調整。

#### ■吸気バルブ


立ち上がると自動的に空気を吸い込み、座る前の状態に復帰。

### 専用カバー

専用カバーは伸縮性のある素材を使用。表地は爽やかな風合いの生地、裏地は汚れの浸入を防ぐ防水加工。さらにインナーカバー（中袋）が、中身のウレタンへの臭いや汚れの浸透を防ぎます。



### 特殊構造のエアセルが高い安定性と座り心地を実現

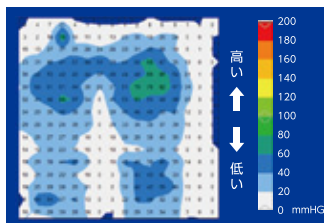


エアセル内を分割し、部位に適した保持力を持たせることで、前ずれ防止と横方向の安定により、座り心地の良さを実現しました。優れた体圧分散性能で、臀部にかかる圧力を広範囲に分散。

### 商品仕様

品番	CK-400
価格	39,800円(税抜)
	※専用カバーのみ購入価格 (品番 CH-400) : 6,200円(税抜)
サイズ	幅40 × 奥行40 × 厚10cm
重量	1.1kg
TAISコード	00206-000081

材質	●専用カバー 上面 / 表地 ポリエステル100% (伸縮) 裏地 ポリウレタンフィルム (防水・抗菌) 下面 / ターポリン布 (防水・すべり止め加工)	●中袋 ウレタンフィルム
	●中身 ウレタンフレーム ウレタンフォーム ウレタンベース ウレタンフォーム エアセル ウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)、ウレタンフォーム 調圧バルブ ABS、POM、SUS、シリコーンゴム 吸気バルブ ポリプロピレン、シリコーンゴム、ナイロン	

### サイズ

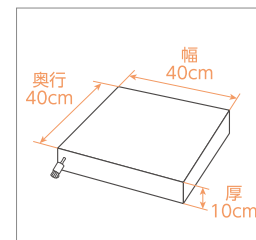



#### 安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<http://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

#### 介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。

\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

#### ■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511(代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先