


# ベスポ ジェルクッション

ヘキサジェル + ウレタンスラッシュニ層構造

## 取扱説明書

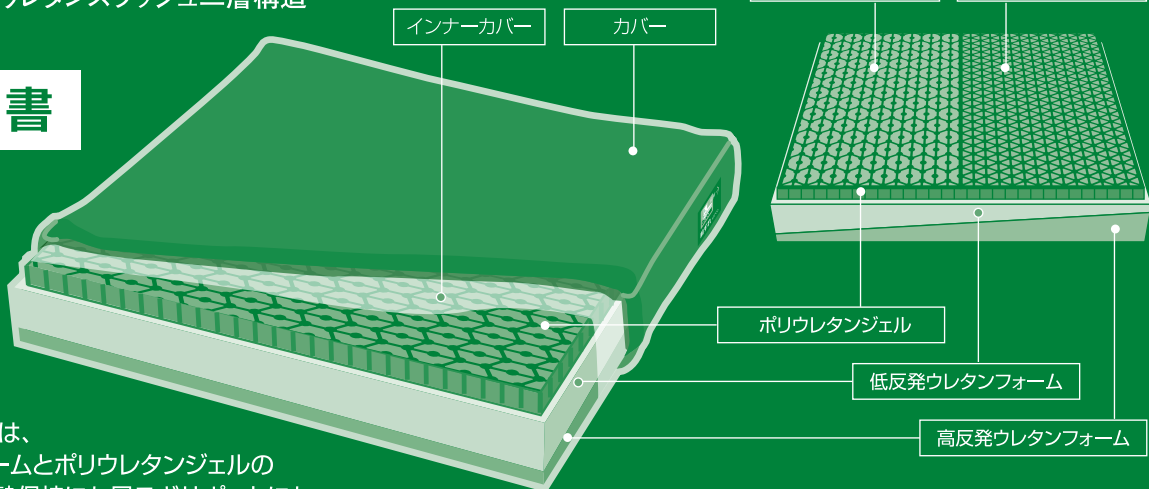

ベスポジェルクッションは、2種類のウレタンフォームとポリウレタンジェルの組み合わせにより、姿勢保持にも足こぎサポートにも対応する一枚二役（2WAYタイプ）の体圧分散クッションです。

## 安全にお使いいただくために

ベスポジェルクッションの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。



### 重要安全情報

体圧分散クッションのご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



**警告**：このマークに従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「警告1」、「警告2」にまとめて記載します。





**1** 体圧分散クッションは身体を柔らかく支え、保持するのが特徴です。ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち会いのもとご使用ください。クッションからの落下、転落を招く恐れがあります。



**2** 体圧分散クッションのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。

### ご使用方法

● 用途に合わせてクッションを車いすの上に設置してください。

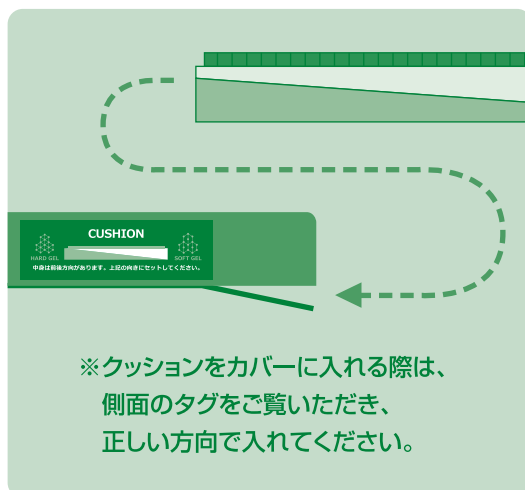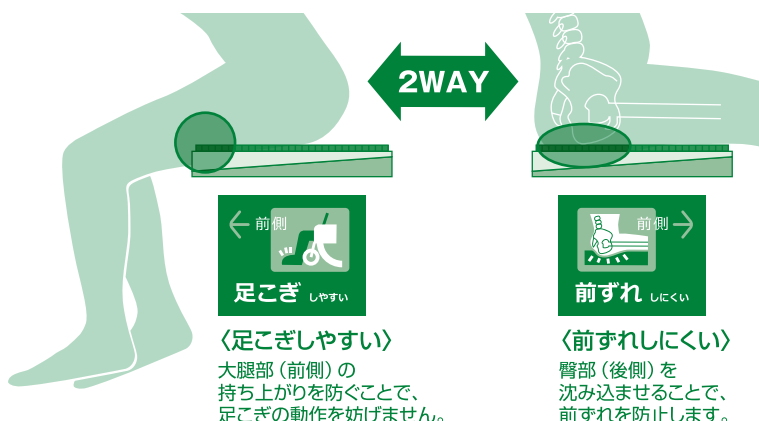

## ご使用上の注意

- カバーに付いている「前ずれしにくい」タグを前（膝側）にして使用すると前ずれを防止します。「足こぎしやすい」タグを前（膝側）にして使用すると足こぎの動作を妨げません。用途に応じてご使用側を選んでください。
- 「足こぎしやすい」側は活動補助のため構造上、前側が沈み込みます。身体をしっかり支え落下・転落に気を付けてご使用ください。ご自身で身体を支えられない方のご使用は避けてください。
- 表示以外の向き（横向き）で使用すると身体が左右に傾く恐れがありますのでご注意ください。
- クッションの端に座るときは滑り落ちないように身体を支えてください。クッションからの落下・転落を招く恐れがあります。
- クッションに飛び乗ったり過度の荷重を掛けたりしないでください。落下・転落を招く恐れや製品の破損につながる可能性があります。
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。ウレタンが破損したり、ジェルが漏れ出してしまふ可能性があります。
- ジェルは人体に無害ですが万一漏れ出して床等に付着した場合は、油污れ用の洗剤を使用して落としてください。ジェルの成分が残っていると滑りやすくなりますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や常温範囲外での使用は避けてください。クッション及びジェルが劣化する恐れがあります。

## カバーのお手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

- 専用カバー（グレー）は取り外して洗濯することができます。

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル（洗濯ラベル）をご参照ください。

- |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。</li> <li>・低い温度でのタンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰干しをしてください。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・アイロンは使用しないでください。</li> <li>・脱水時は、洗濯機の異常振動に十分注意してください。予め防水部に溜まった水をよく取り除き、軽く脱水を行ってください。</li> <li>・洗濯ネットをご使用ください。</li> <li>・タンブル乾燥機を使用する場合、タンブル内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。</li> <li>・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。</li> <li>・柔軟剤、漂白剤の使用はできません。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- インナーカバー（半透明の中袋）は本体のウレタンとジェルを保護するために入っています。絶対に取り外さないでください。
- 連続使用によりインナーカバーとジェルシートが貼り付くことがあります。性能上問題ありません。
- インナーカバーについた汚れは水または中性洗剤を水で薄めたもので拭き取ってください。消毒用アルコールによる清拭も可能です。
- 本体のウレタンとジェルは洗浄することができません。

## 保管方法について

- ジェルの面を上にならに置いて保管してください。
- 圧縮された状態での保管は避けてください。亀裂やヘタリの原因となります。
- 上に重いものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所は避けてください。

## 仕様

品番	CK-375
サイズ／重量	幅 40cm×長 40cm×厚み 6.5cm / 1.9kg
材質	専用カバー：上面／表地 ポリエステル 100%（吸水速乾・制菌・伸縮）、裏地 ポリウレタンフィルム（防水） 下面／ターポリン布（防水・すべり止め加工） 中袋：ウレタンフィルム 中身：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム（上／低反発ウレタンフォーム、下／高反発ウレタンフォーム）

専用カバーのみの販売もご用意しております。