



# MY Cushion

マイクッション

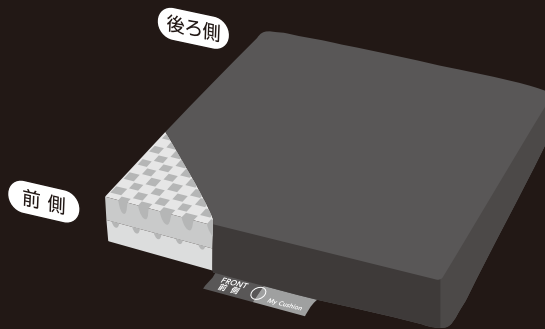

## 取扱説明書

マイクッションは、3種類のポリウレタンフォームを組合せたバックアップ構造により、車いすをご使用になる方の体圧分散性能と座位安定を実現したクッションです。

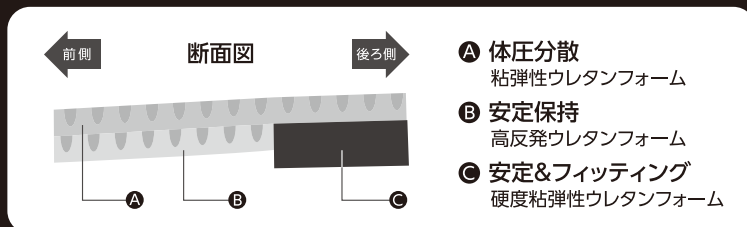

## 安全にお使いいただくために

マイクッションの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。



### 重要安全情報

体圧分散式クッションのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予測することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を記載してあります。

なお、下記の警告に従わなかった場合には、物的損害や負傷、死亡につながる危険性があります。



1

体圧分散式クッションは身体を柔らかく支え、保持するのが特徴です。ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち合いのもとご使用ください。車いすからの落下、転落を招く恐れがあります。



2

体圧分散式クッションのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。



3

クッションに着座する際、または移乗する際は、クッションから滑り落ちないように身体を支えてください。転倒・転落など思わぬ事故の恐れがあります。



4

クッションの端には座らないようにしてください。転倒・転落など思わぬ事故の恐れがあります。



5

クッションに飛び乗ったり過度の荷重を掛けたりしないでください。転倒・転落を招く恐れや商品の破損につながる可能性があります。

### ご使用上の注意

- 専用カバーの"FRONT"マークを前方(膝側)にしてご使用ください。
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。商品が破損する可能性があります。
- 専用カバーを取り外した際は、クッション本体の底側に出張りがある方が後ろ側となるように専用カバーを装着してください。
- ご使用の車いすによっては、ネームタグがサイドガードの隙間から出る場合があります。タイヤのスポークにネームタグが当たらないよう、ご注意ください。


前側



## ご使用方法

- ・ご使用の際は、FRONT(前側)タグがある方を座面前方(膝側)にしてご使用ください。誤った向きで使用しますと、商品本来の性能を発揮しないばかりか、思わぬ事故の原因になる場合があります。

タグの位置が前側(膝側)になるように、車いすの座面にセットします。

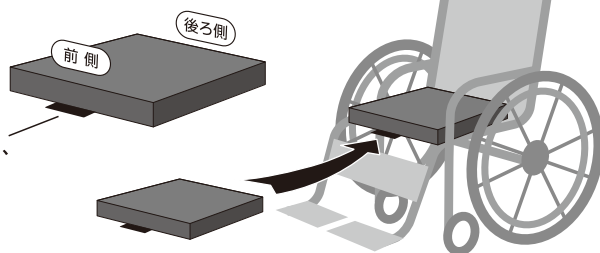

- ・商品へお名前等を記入する場合は、ネームタグに記入することができます。



## お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

### ■本体

本体のウレタンは洗浄することが出来ません。

- ・本体に付いたシミ等の汚れは、水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布を硬く絞り、繰り返し軽く叩くように拭き取ってください。
- ・最後に硬く絞った濡れタオルおよび乾いたタオルで押し当てながら水分を拭き取り、平らな場所で陰平干しを行ってください。(時間が経ったシミ等の汚れは完全に落とすきれない場合があります)

### ■専用カバー

洗濯を行う場合は、商品に取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。

- ・水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布を硬く絞り、洗濯する前に表面の汚れを予め取り除いてください。
- ・洗濯ネットに入れ、洗濯機で弱い洗いが出来ます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・十分にすすぎを行い軽く脱水後、陰吊り干しを行ってください。乾燥機による乾燥は出来ません。

### ◎注意

- ・漂白剤、柔軟剤の使用不可、アイロン、ドライクリーニング不可。
- ・洗濯機使用時は洗濯ネットを使用してください。
- ・乾燥機使用不可。

## 保管方法について

- クッションの上に重いものを置いたり、圧縮された状態で保管しないでください。ヘタリや破損の原因になります。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所は避けてください。熱や紫外線で製品の劣化を早めます。

## 仕様

品番	CK-398	
サイズ/重量	幅39 × 奥行39 × 厚8(前側5)cm / 0.5kg	
材質	専用カバー	上面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水、抗菌、伸縮) 下面/ナイロン(すべり止め加工)
	中身	ウレタンフォーム

※専用カバーのみの販売もご用意しております。