

背抜きやポジショニング時に。滑りやすいグローブで、療養者にも介護者にも負担の少ない介護を実現。



ケープ介護グローブ

滑りやすいグローブでストレス無く、ずれを解消。




滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介護しやすいスリムフィットサイズ。装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

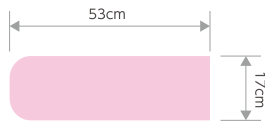

品番	CK-388 (1セット2枚入り)
価格	2,000円(+税)
サイズ (cm)	フリーサイズ (幅17×長53)
材質	ナイロン100%
10セットパック	19,000円(+税)

丸洗い可能でいつも清潔

丸洗いできる素材なので、汚れても洗濯でき、いつも清潔に使うことができます。家庭用洗濯機(弱洗いモード)による丸洗いが可能です。※詳しくは取扱説明書をご覧ください。


使用例



やさしい、ずれ介助のポイント

背抜き


真横から手を入れ、身体をなぞると緊張が助長しますので注意してください。

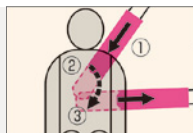

- ① 首筋から手を入れる
- ② 背部の重さのかかっている部位を確認
- ③ 手を旋回させ、腰の上から横に抜く

腰抜き


重い部分にもスムーズにアプローチできます。

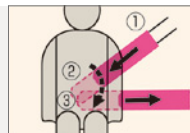

- ① ウエストのくびれから斜めに手を入れる
- ② 臀部の重さのかかっている部位を確認
- ③ 手を旋回させ、横に抜く

足抜き

足を持ち上げられる不快感がありません。

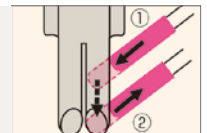

- ① 体側に沿って膝下から手を入れる
- ② ふくらはぎから踵までなぞり、横に抜く





安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * メディ・ウォッシュは、一般医療機器の「特定保守管理医療器」に属します。
お取り扱いいただく場合には、高度管理医療器販売業・貸与業許可が必要です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL : 046-821-5511(代) FAX : 046-821-5522
E-mail : lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL : 092-431-0885 FAX : 092-431-0889

お問い合わせ先