急速ポンプ 人は尺 の



エアマットレス専用急速ポンプ

小型·軽量

簡単操作

効率アップ



KŰRO,小さいけれど大きな働き!

エアマットレスを今すぐセットアップ!

エアマットレス 納品作業の 時間短縮に!

メンテナンス 作業の効率 アップに!



送風・吸引が1台で行える!

ハンドルを握るだけの簡単操作! 小型・軽量・ハイコストパフォーマンス!







KUROにアタッチメントを取り付けます

エアマットレスのカプラーと接続します

*トライヤルFは シリコンキャップ を外してください。

お問い合わせ先


ハンドルを握ると作動*します

※空気を充填する際、大きめの動作音がしますので、周囲の状況にご配慮頂きながらご使用ください。 ※作動中に専用アタッチメントからカプラーが抜けないように、カプラーを手で押さえながらご使用ください。

アタッチメント・専用フィルター(同梱品)



アタッチメント丸型 (ビッグセルアイズ/ ビッグセルインフィニティ/ ネクサスアイビー/ ネクサスR/ラグーナ用) 単品価格 610円(+税)

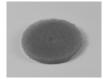

KURO専用フィルター 単品価格 130円(+税)



アタッチメント(別売)

アタッチメント3連型 (トライセルE/エアドクター用) 単品価格 610円(+税)

■商品の主な仕様

急速ポンプKURO			
品番	CH-320	価格	オープン価格
サイズ	幅22.0×高18.1×奥行9.6cm (アタッチメント装着時/ 幅25.7×高18.1×奥行9.6cm)		
重 量	1kg		
材 質	本体ケース/ABS樹脂、アタッチメント/PP樹脂		
定格	定格/AC100V、300W、50/60Hz ACコード4m		
対応機種	ビッグセルアイズ・ビッグセルインフィニティ・ ネクサスアイビー・ネクサスR・ラグーナ・ トライセルE・エアドクター *トライセルE、エアドクターは別売りの アタッチメントが必要です。		
同梱品	アタッチメント丸型、専用フィルター(2枚)		

- *急速ポンプKUROの取り扱いにあたっては、付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- *商品の仕様·価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- *印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。*本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

株式会社 ケープの 販 売 元

社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7

TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522 E-mail:lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1 TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

商品に関する詳しい情報は ケーブのホームページをご覧ください https://www.cape.co.jp/