



Air Master

エアマスター トライセルE
体圧分散式エアマットレス/床ずれ防止用具

TRICELLE.E

看護現場の負担を軽減するディテール設計。
スタイリッシュなデザインになって生まれ変わったトライセルE

LOVING CARE
CAPE

ゼロ
褥瘡0をめざして

ベッド背上げ時のエアマットレスのずり落ちを防止する『アジャスト付き固定フード』

エアマットレスがずり落ちないから、療養者も快適、シーツの掛け直しの手間も削減できます。



アジャスト付き固定フード
ベッドマットレスにかぶせるだけの簡単設計

1 厚さ3~10cmのベッドマットレスに対応



ファスナー閉じ時
厚さ3cm~5.9cmのベッドマットレスに対応

ファスナー開き時
厚さ6cm~10cmのベッドマットレスに対応

簡単に開閉調整
できます

2 シーツがずれにくくなりました



従来商品
当商品
エアマットレスがずり落ちないため、シーツもずれにくくなりました。療養者にとって快適で、介護者の手間も軽減できます。


3 コンパクト収納



空気を抜けばコンパクトに折り畳むことができ、収納場所をとりません。

快適性がさらにアップしたエアマットレス

凸凹感の少ないエアマットレス/ヒートビルドアップ現象を抑える換気機能

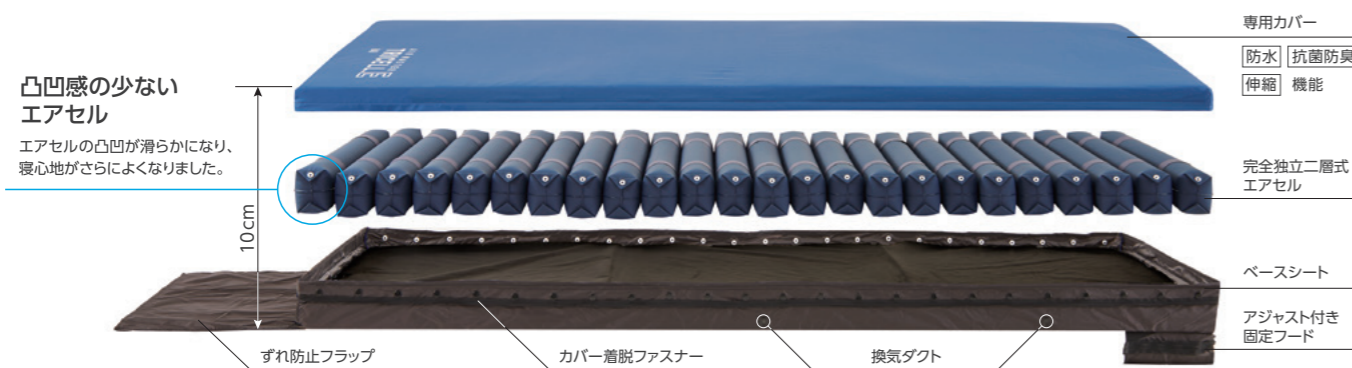

凸凹感の少ないエアセル
エアセルの凸凹が滑らかになり、寝心地がさらによくなりました。


専用カバー
防水 抗菌防臭
伸縮 機能

完全独立二層式エアセル

ベースシート

アジャスト付き固定フード

体圧分散

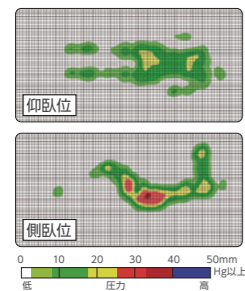

伸縮性のある防水、抗菌カバー。



防水性
清拭ができて、お手入れも簡単です。
消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。

マット内にこもった熱や湿気を外に逃がします。



マット内空気循環
エアセルが5分毎に膨張収縮を繰り返し、適度に行き渡る隙間からエアマットレス内部にこもった熱や湿気を逃がします。

換気ダクト
ベースシート側面、左右4箇所の換気ダクトから内部にこもった熱・湿気を逃がします。

非通電時も空気が抜けない「特殊バルブ」、再通電時には再設定不要の「メモリ機能」

電源プラグを抜いてベッドを移動する際に、空気が漏れない『特殊バルブ』を搭載。再度電源を入れた際には、体重の再設定操作が不要になった『メモリ機能』を搭載。

電源をOFFで、ベッドごと病室から移動



ベッド移動時に電源プラグを抜いても、エアセル内の空気漏れを自動で遮断する特殊なバルブを搭載。約14日間エアマットレスの内圧を保持。

停電対策機能付き

部屋に戻ってきて、再度電源をON



コンセントを差し戻した時に、直前の体重設定に自動復帰するメモリ機能を搭載。体重の再設定操作の手間がなくなりました。

衝撃に強くなった筐体

専用ポンプのケースは、エレベータへの搬入時など万一障害物に接触しても壊れにくい構造です。




従来品と比べ、ポンプケースが割れにくい構造設計になっています。

カバーがない装着方式
カバーフリーなので、落下などで壊す心配がなく、より扱いやすくなりました。

さらにコンパクトになったデザイン

厚さはスリムな8.8cmになって、ベッドの足元を省スペース化。

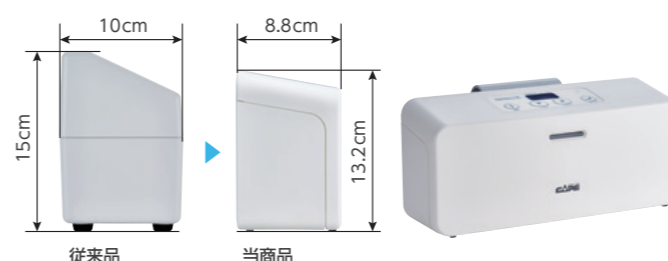


従来品

当商品

簡単操作の高性能小型ポンプ

幅広い体重設定が可能。様々な体重の療養者にも安心です。

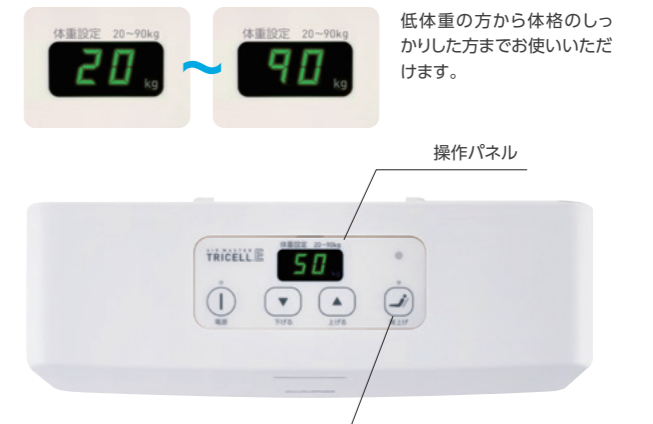

低体重の方から体格のしっかりした方までお使いいただけます。

呼吸管理、経管栄養やお食事などで、長時間背上げをしてご使用される方に。


背上げモードのボタンを押すと設定した体重に応じてエアマットレスのやわらかさを自動調整。背上げ時の底つきも防止。

使用開始目安
約1分30秒

背上げモード
オートオフ
2時間


背上げボタンを押して、約1分30秒で空気を充填完了。

背上げモードの解除を忘れても安心なオートオフ機能付き。

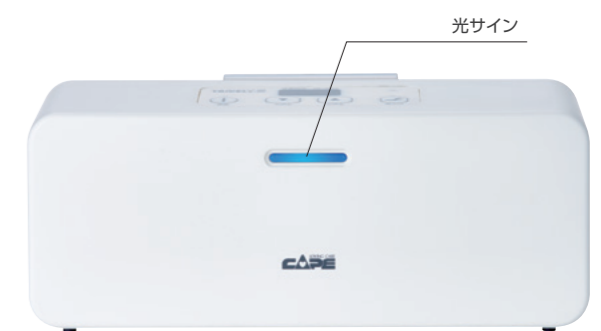

光サイン

光って知らせる安全対策機能

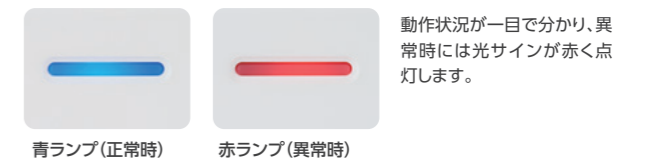

青ランプ(正常時)

赤ランプ(異常時)

動作状況が一目で分かり、異常時には光サインが赤く点灯します。

周りの明るさに応じて光サインの照度が自動で変化



ベッドを設置した場所の明るさに応じて、光サインの照度が3段階に自動で変化します。

■ エアマスター トライセルE 仕様・価格表



		タイプ	上敷 840 タイプ	上敷 900 タイプ
セット	品番		CR-330	CR-333
	TAISコード 介護保険福祉用具貸与対象品目		00206-000129	00206-000130
	JAN コード		4939810008318	4939810008325
	セット価格		140,000円 (+税)	
セット内容	専用マットレス	品番	CR-332	CR-334
		サイズ*1	幅84×長192×厚10cm	幅90×長192×厚10cm
		重量	4.2kg	4.6kg
		材質	エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/ナイロンオックス	
		エアセル数	24本	
		価格 (専用カバー付属)	95,000円 (+税)	
	マットレス付属品 専用カバー	品番	CH-351	CH-352
		材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌防臭・伸縮)	
		価格 (専用カバーのみ購入価格)	9,600円 (+税)	
	専用ポンプ	品番	CR-331	
		サイズ	幅30.0×高13.2×奥行8.8cm (ポンプフック装着時/幅30.0×高13.7×奥行14.4cm)、ACコード:4m	
		重量	2.5kg	
		材質	ケース/ABS樹脂、フック/POM樹脂	
定格		AC100V、12W、50/60Hz		
価格		45,000円 (+税)		

*1 マットレスのサイズ表示は基本寸法であるため、マット内圧の状態や使用状況により多少異なる場合があります。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

万一、エアセルが破損した場合は、
1本ずつ交換できます。



- *介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。
- *エアマスター トライセルEの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- *商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- *印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- *記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- *本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

専用マットレス、専用ポンプ：3年間保証

■ 製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL : 046-821-5511 (代) FAX : 046-821-5522
E-mail : lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL : 092-431-0885 FAX : 092-431-0889

お問い合わせ先