

FOLIO

LOVING CARE
CAPE

ゼロ
褥瘡0をめざして

体圧分散式クッション／車いす付属品



ムレ対策




丸洗い

OK

車いす用クッション フォリオ

〈ウォッシュアブルタイプ〉

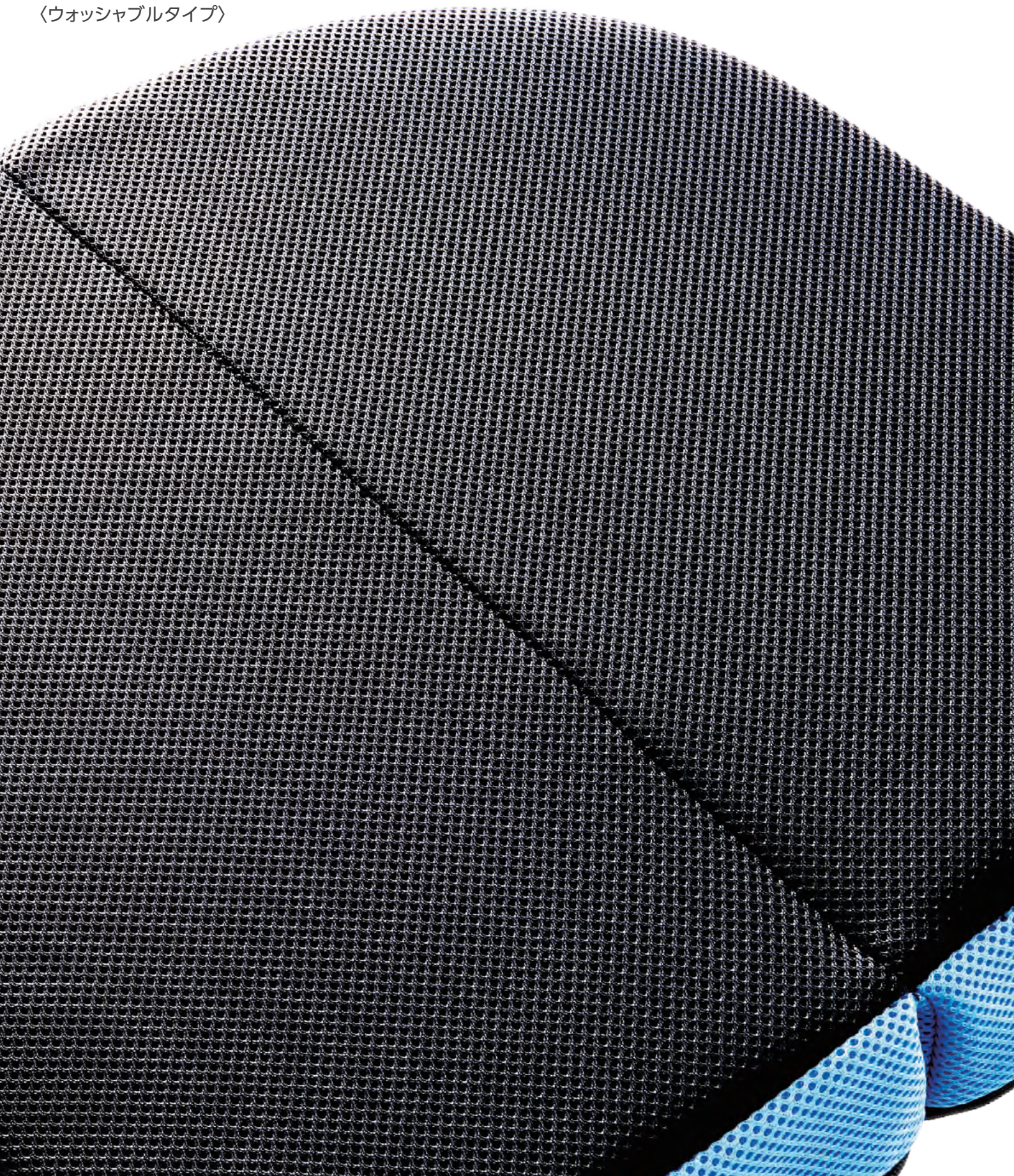


お手入れ簡単。クッションを洗濯機で丸洗いしたら、自然乾燥でOK。

家庭用洗濯機で丸洗いできます

簡単、自然乾燥

軽量・コンパクト

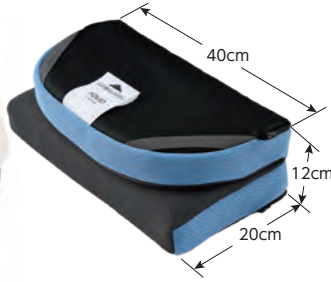

洗濯槽に入るか、事前にサイズをご確認ください。

フォリオの OUTERカバー をつけたまま、2つ折りにして洗濯ネットに入れ、洗濯機で洗ってください。
※素材の特性上、洗濯によって色合いの変化(変退色)が起こる場合がありますが、品質上問題はありません。



洗濯後は、ハンガーを底面のハンガー掛け用ベルトに掛けて風通しの良い場所で日陰干ししてください。





重さはたったの600g。軽くて折りたためるから収納や持ち運びにも便利です。

デイサービスなど外出時にも安心な、前ずれ防止構造と優れた体圧分散性能。


前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化

特殊スリット構造が安定感よく、圧力を分散します

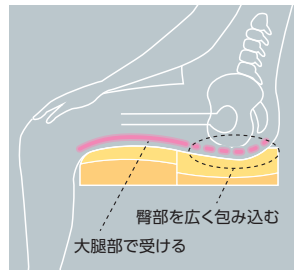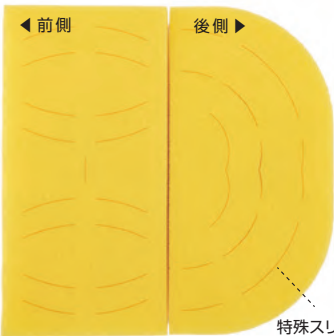

特殊スリット

独立構造にすることで、前後に異なる硬さのウレタンを配置。前側が大腿部をしっかり支え、後側が臀部を優しく包み込み、前ずれを防止します。

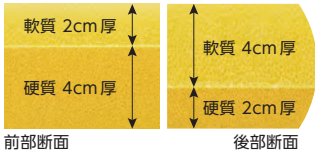


前部断面 後部断面

厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。





特殊スリット構造が、体格に応じて適度に沈み込み、安定感よく圧力を分散します。

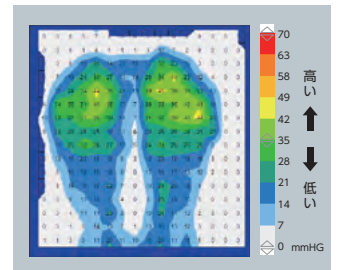


薄型で優れた体圧分散性能

標準車いすにも合わせやすい薄型設計。

通気性の良い OUTERカバー + 無膜ウレタンフォームでさらっと快適

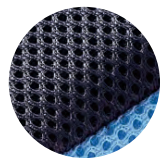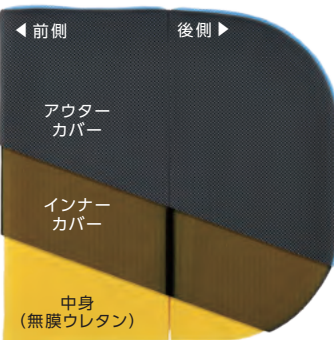

◀座面
座面カバーには、さらっと爽やかな感触のWRラッセル生地を採用。通気性が高く、ムレを軽減します。

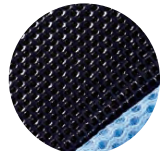

◀底面
底面には滑り止めの素材を使用。



通気性が高く、ムレを軽減する無膜ウレタンを採用。長時間でも快適に使用できます。



*写真は使用例です。

フォリオ	品番	CK-405	価格	27,000円(+税)	TAISコード	00206-000132
サイズ	幅40cm × 奥行40cm × 厚6cm		重量	0.6kg		
材質	● OUTERカバー : [上面] ポリエステル100%、[下面] ターポリン布(すべり止め加工) ● INNERカバー : ポリエステル100% ● 中身 : ウレタンフォーム					

*専用カバーのみ購入価格 CH-405 8,400円(+税)

お問い合わせ先

販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

商品に関する詳しい情報は
ケープのホームページをご覧ください <https://www.cape.co.jp/>