


FOLIO (フォリオ)

取扱説明書

体圧分散式クッションFOLIO(フォリオ)は、中身に、無膜ウレタンフォームを使用し、カバーには高通気素材を使用しています。洗濯機での丸洗いが可能な商品です。

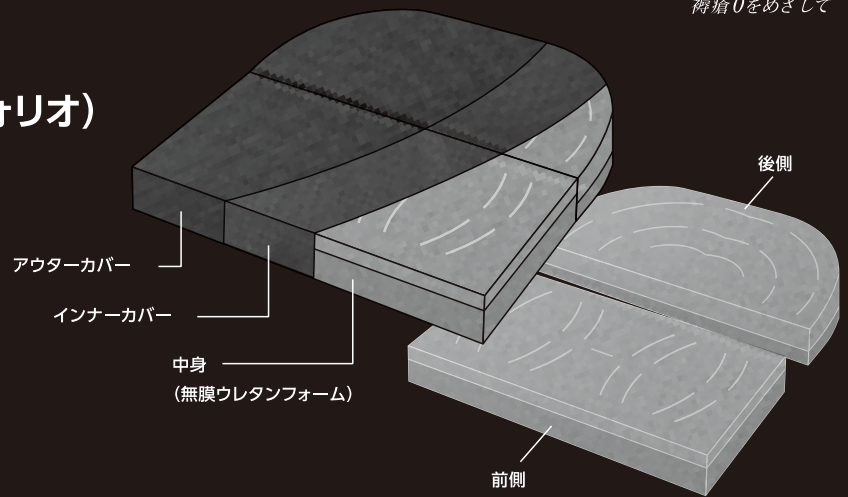

安全にお使いいただくために

FOLIO(フォリオ)の取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。



重要安全情報

体圧分散式クッションのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予測することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を記載してあります。

なお、下記の警告に従わなかった場合には、物的損害や負傷、死亡につながる危険性があります。



1


体圧分散式クッションは身体を柔らかく支え、保持するのが特徴です。ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち合いのもとご使用ください。車いすからの落下、転落を招く恐れがあります。



2

体圧分散式クッションのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。

ご使用方法

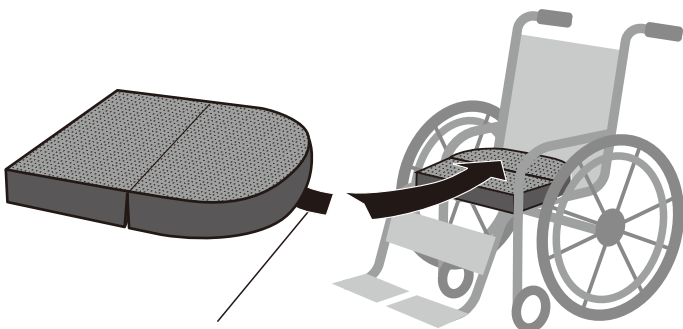

タグの位置が下奥になるように、車いすの座面にセット

FOLIO(フォリオ)を車いすの上に設置する際は、アウターカバー後方のタグが、車いすの奥に来る向きで設置し、上下の向き(上図参照)にもご注意ください。誤った向きで使用しますと、商品本来の性能を発揮しないばかりか、思わぬ事故の原因になる場合があります。

ご使用上の注意

- クッションの端に座らないようにしてください。転倒・転落を招く恐れがあります。
- クッションに飛び乗ったり過度の荷重を掛けたりしないでください。転倒・転落を招く恐れや商品の破損につながる可能性があります。
- 無理な方向に力を加えないでください。破損の原因になります。
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。
- 高温多湿や長時間直射日光が当たる場所でのご使用は避けてください。商品の劣化につながる恐れがあります。
- ストーブなどの火に近づけたり、高温のものに近づけないでください。
- お手入れの際、アウターカバーを取り外す事は可能ですが、インナーカバーから中身を取り外さないでください。
- カバーおよび中身が汚れた場合には、裏面のお手入れ方法に従い、洗浄を行ってください。
- 本商品に異常や疑問を感じた場合は、お買い上げの販売店、もしくは(株)ケーブまでお問い合わせください。


お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。


■本体の丸洗い

- 本商品は、インナーカバーや中身を取り出すことなく、丸ごと洗濯機で、弱い洗濯ができます。
※必ず洗濯ネットをご使用ください。
※素材の特性上、洗濯を繰り返すことで色合いの変化(変退色)が起こる場合がありますが、品質上問題はありません。
- 本商品は、底面のベルトをハンガーに掛けて、つり干しすることができます。

洗濯ネット使用

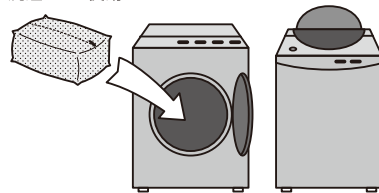

日陰つり干し

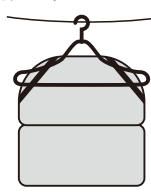

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。

- 水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませたやわらかい布等で、洗浄する前に表面の汚れを取り除いてください。
- 洗濯ネットに入れ、洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。洗濯後は十分にすすぎを行ってください。
- 乾燥機でのタンブル乾燥はできません。
- 洗濯後十分に水気を取り除いてから形を整え、風通しの良い場所で日陰つり干しをしてください。(底面にハンガー掛け用のベルトがございます。)
- 脱水時は、洗濯機の異常振動に十分注意してください。
- 必ず洗濯ネットをご使用ください。
- カビ等の発生を防ぐ為、十分な乾燥を行ってください。
- 柔軟剤、漂白剤の使用はできません。

■アウターカバーのみ

- アウターカバーのみでも洗濯することができます。
※アウターカバーを装着する際は、アウターカバーとインナーカバーのタグが合う向きに装着してください。
(詳細は、タグのイラスト、または別紙『カバーの装着方法』をご確認ください。)
- ※中身をインナーカバーから取り外さないでください。万が一、取り外された場合は、別紙『カバーの装着方法』をご参照ください。
- ※素材の特性上、洗濯を繰り返すことで色合いの変化(変退色)が多少起こる場合がありますが、品質上問題はありません。

洗濯の際は、商品に取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。

- 洗濯ネットに入れ、洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- 脱水時は、洗濯機の異常振動に十分注意してください。
- 風通しの良い場所で日陰つり干しをしてください。
- アイロンは使用しないでください。
- 柔軟剤、漂白剤の使用はできません。

消毒について

- 以下の消毒薬品はご使用できません。
オゾンガス、メチルエーテル、クロロホルム、クレゾール、ベンジン、トルエン

保管方法

- 圧縮された状態での保管は避けてください。ヘタリや破損の原因となります。
- 上に重いものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所は避けてください。
- 高温・多湿の場所は避けてください。

仕様

品番	CK-405
サイズ	幅40cm × 奥行40cm × 厚6cm
重量	0.6kg
材質	アウターカバー： 【上面】ポリエステル100%、 【下面】ターポリン布(すべり止め加工) インナーカバー：ポリエステル100% 中身：ウレタンフォーム

アウターカバーのみの販売もご用意しております。