


# ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ

〈50枚入り〉 CK-498

CAPE




# 医療現場のための、使いやすく衛生的な、 ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ。

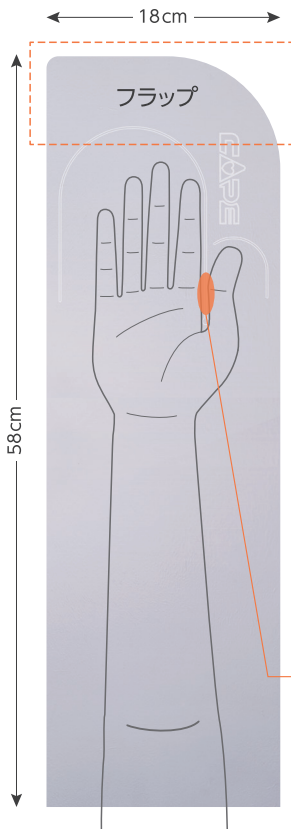

## □ フラップ構造

身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

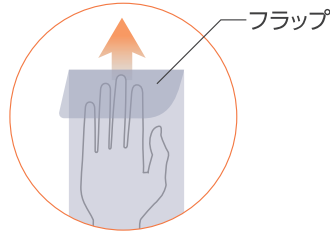

## □ 手が抜けにくいポケット構造

手が抜けにくい内ポケット構造。ポケットに沿って片手を肘付近まで挿入します。

親指で仕切りを挟んでご使用いただくとグローブが抜けにくく、よりスムーズにご使用いただけます。

## □ 二つ折りパッケージ

場所を取らないコンパクトなパッケージ。片手で一枚ずつ取り出せます。



## □ 感染対策に

安心してご使用いただける、衛生的な使い捨てタイプ。



本商品は左右兼用です。

品名	ケープ介助グローブ 使い捨てタイプ		
品番	CK-498		
サイズ	フリーサイズ(幅18cm×長58cm)		
入数	50枚/箱	価格	2,000円(+税)
材質	ポリエチレン		

## 介助グローブの用途

### 背抜き

ヘッドアップ後のずれ解消ケアに




### 踵の圧抜き

ヘッドアップ・ダウン、ポジショニング後のずれ解消ケアに



### 傾き・ねじれの調整

体位変換後の傾き・ねじれの調整に

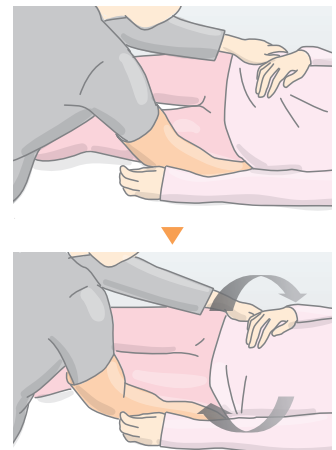

QRコードから用途ごとの使い方を動画でご覧いただけます。  
<https://www.cape.co.jp/products/pdt030>

\*ケープ介助グローブの取り扱いにあたっては、商品/パッケージに表示されている説明内容をよく読んでからご使用ください。\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。  
\*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。\*記載の価格はメーカー希望小売価格です。\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

製造販売元 **株式会社 ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL:046-821-5511(代) FAX:046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL:092-431-0885 FAX:092-431-0889

お問い合わせ先

商品に関する詳しい情報は  
ケープのホームページをご覧ください <https://www.cape.co.jp/>