

姿勢が崩れにくい、美しい30度側臥位をつくるためにデザインされた
リバーシブル構造のポジショニングクッション

2022
NEW

●Rモデル 600タイプ
(CK-461)



スリット面

フラット面

●Rモデル 800タイプ
(CK-462)



下肢を支える
スリット面

背中を支える
フラット面



高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄 の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

乾燥
100℃


高温乾燥と水抜けの良い構造で中
までしっかり乾きやすい。

2時間
早い

従来品より約2時間早く乾燥。
スピーディーに現場に戻ってきます。



極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。

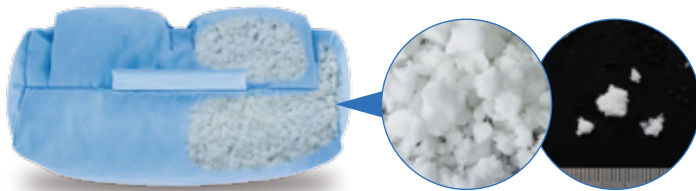

■ 大小のウレタンフォームを混合
極小のウレタンフォームは体積が小さく、
水分の含有量が少なくなるため、乾きが
早くなります。

いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります。

次亜塩素酸
ナトリウム
500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸
ナトリウム水溶液に30分
間浸漬することができます。




熱水
80℃

本体を80℃の熱水に10分
間浸漬することができます。



美しい30度側臥位をつくるためにデザインされたエニモRモデル600/800タイプ


■ 背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく『スリット構造』。
スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。

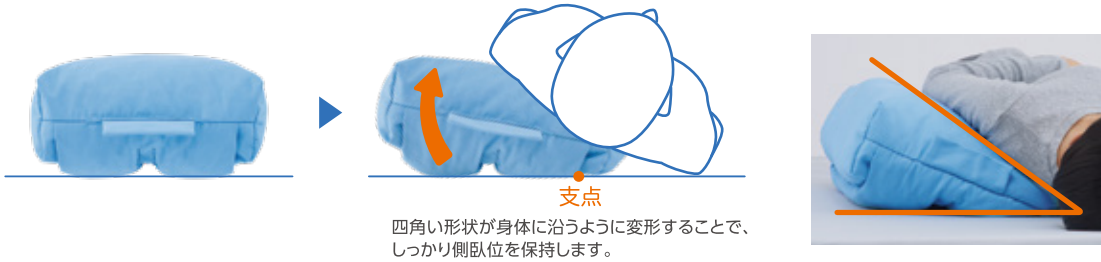

四角い形状が身体に沿うように変形することで、しっかり側臥位を保持します。

■ クッションが外れにくいから
時間が経っても姿勢が崩れにくい。

荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。

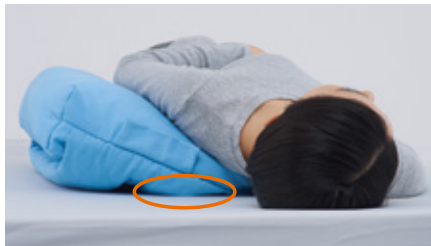

■ 肩から臀部までこの1本で
支えるからキレイにキマる。
従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。



■ 下肢をのせる位置をガイドする『スリット構造』で誰でも正しくポジショニングづくり。

下肢をのせる位置をガイドするスリット構造。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。



スリットの凹凸はオプションカバーを装着しても視認できます。

高齢者のふくらはぎ幅の平均値10.8cmから割り出したスリット設計。

クッションを重ねて使わないから簡単。



高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計しました。

QRコードからエニモの紹介動画をご覧ください。 <https://www.cape.co.jp/mov>



エニモ本体 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード
Rモデル 600タイプ	CK-461	9,800円(+税)	00206-000146
サイズ: 約30×60cm(ハンドル部は除く) 材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%			
Rモデル 800タイプ	CK-462	11,800円(+税)	00206-000147
サイズ: 約30×80cm(ハンドル部は除く) 材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%			

エニモ防水/清拭防水カバーセット(本体クッションとオプションカバーのセット) 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード
エニモR600タイプ 防水カバーセット	R600-BCS	14,400円(+税)	00206-000148
エニモR800タイプ 防水カバーセット	R800-BCS	17,200円(+税)	00206-000149
エニモR600タイプ 清拭防水カバーセット	R600-SBCS	14,900円(+税)	00206-000150
エニモR800タイプ 清拭防水カバーセット	R800-SBCS	17,800円(+税)	00206-000151

オプションカバー(別売)

通気タイプ	モデルタイプ	品番	価格
	Rモデル 600タイプ通気カバー	CH-171	4,000円(+税)
	Rモデル 800タイプ通気カバー	CH-172	4,700円(+税)
材質: ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)			
防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ防水カバー	CH-181	4,600円(+税)
	Rモデル 800タイプ防水カバー	CH-182	5,400円(+税)
材質: 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)			
清拭防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ清拭防水カバー	CH-191	5,100円(+税)
	Rモデル 800タイプ清拭防水カバー	CH-192	6,000円(+税)
表地/ポリウレタンフィルム(防水) 裏地/ポリエステル100%			





安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、 居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

- * 商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- * 印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- * 記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。
- * 本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■ 製造販売元 **株式会社 ケープ**

本 社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先