

ポジショニングクッション エニモ

# AnyMo



少ない数のクッションでポジショニングができる  
姿勢が崩れにくいユニークな構造設計  
熱水洗浄・高温乾燥・消毒ができる



## Mモデル



Bタイプ



Wタイプ



Vタイプ

## Rモデル



600タイプ



800タイプ



一日に何度も行う側臥位と仰臥位のポジションニングが、エニモならたった2つだけで簡単に。

# Bタイプ と Wタイプ を組み合わせた実用例

## 側臥位



**Bタイプを山折り**  
山折りの頂点が平らになるから、上肢をのせられ、より心地よい姿勢がとれます。



**Wタイプを二つ折り**  
広範囲の伸縮生地のにせるだけで下肢がクッションにフィットして姿勢崩れを軽減。

二つ折りにすると高齢者の30度側臥位に適した厚みに変化。



## 仰臥位



くぼみがあるから大腿部の付け根まで差し込めます。



**広げたBタイプの上にWタイプを重ねて**  
十分なボリュームと伸縮生地で下肢をやさしく、しっかり支えます。



Rモデル

と



Wタイプ

を組み合わせせた実用例

### 側臥位



#### Rモデルのフラット面を背中に

自然に傾く構造でしっかり角度がつかます。




スリット部分がクッションの抜け防止になり、姿勢崩れの原因を和らげます。



#### Wタイプを二つ折り

広範囲の伸縮生地のにせるだけで下肢がクッションにフィットして姿勢崩れを軽減。

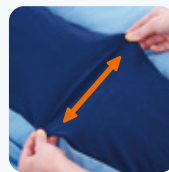

二つ折りにすると高齢者の30度側臥位に適した厚みに変化。



### 仰臥位



スリット構造がストッパーになりクッションのズレを軽減。



#### Rモデルの上に広げたWタイプを重ねて

大腿部をしっかり持ち上げ、伸縮生地ですなで下肢をやさしく、しっかり支えます。





Bタイプ

と



Rモデル

を組み合わせた実用例

## 側臥位



Rモデル

Bタイプ



高齢者の30度側臥位に  
合った厚みに設計。



Bタイプ

### Bタイプを山折り

山折りの頂点が平らになるから、上肢を  
のせられ、より心地よい姿勢がとれます。



Rモデル

### Rモデルのスリット面

- 高齢者のふくらはぎ幅の平均値  
から割り出したスリット設計。
- 下肢をスリットにのせるだけで  
フィット&ホールド。



## 仰臥位



Bタイプ

Rモデル

スリット構造がストッパーになり  
クッションのズレを軽減。



Bタイプ

Rモデル

### Rモデルの上に広げたBタイプを重ねて

十分なボリュームで重たい下肢もしっかり支えます。



## Bタイプ



拘縮・円背の方にも

## 広げて、畳んで、用途が広がるマルチタイプのクッション

構造



裏表同仕様

用途イメージ



側臥位の  
背部のサポート



側臥位の  
下肢のサポート




仰臥位の  
背部のサポート



背上げ時の  
背部のサポート

荷重による広がりを抑えるオーバルスリット  
荷重による広がりを抑えるスパイク構造

## Wタイプ

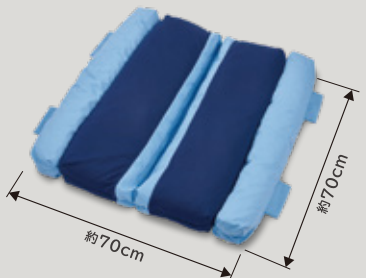


## 広げて、畳んで、用途が広がるマルチタイプのクッション

構造



裏表同仕様

用途イメージ

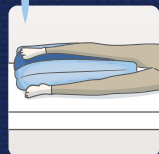

側臥位の  
下肢のサポート



側臥位の  
下肢のサポート




側臥位の  
下肢のサポート



仰臥位の  
下肢のサポート

伸縮生地が下肢を優しく包み込むようにフィット  
下肢の滑り落ちを防止するエッジ構造  
踵を浮かせられる高さ

## Vタイプ

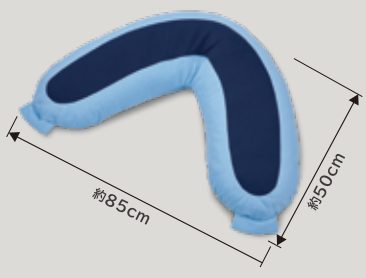

片麻痺の方にも

## 伸縮生地で上肢がフィットするクッション

構造



裏表同仕様

用途イメージ



座位の  
上肢のサポート



背上げ時の  
上肢のサポート



仰臥位の  
上肢のサポート



仰臥位の  
上肢(上腕)のサポート

肘から指先まで支える広い面積の伸縮生地  
中身の過度な広がりを抑える非伸縮生地

## Rモデル



## 用途が変わるリバーシブルタイプのクッション

構造



リバーシブル仕様

用途イメージ



側臥位の  
背部のサポート



側臥位の  
下肢のサポート



側臥位の  
下肢のサポート



仰臥位の  
下肢のサポート

きれいな角度が付き、クッションが外れにくいユニークな構造  
スリットに下肢をのせるだけでフィットするスリット構造



**高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄** の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

**乾燥 100℃**


高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。



**2時間 早い**

従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。

※乾燥環境によって乾燥時間は異なる場合があります。

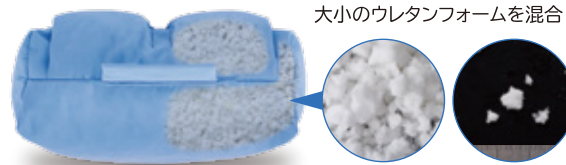

大小のウレタンフォームを混合

極小のウレタンフォームは体積が小さく、水分の含有量が少なくなるため、洗濯後の水分が抜けやすく乾きが早くなります。

**いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります。**


**次亜塩素酸 ナトリウム 500ppm**

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム液に30分間浸漬することができます。



**熱水 80℃**

本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。

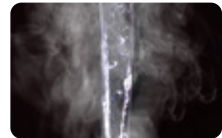


**用途に合わせた3種類のオプションカバー（別売）**

洗濯可能で、機能性の異なる3タイプのオプションカバーをご用意しています。

● 通気タイプ



● 防水タイプ（ハンドル付き）

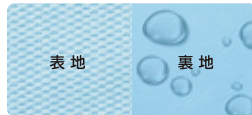

● 清拭防水タイプ（ハンドル付き）



● エニモ本体 介護保険/福祉用具貸与対象品目 **体位変換器**

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード	サイズ	材質	
Mモデル	Bタイプ	CK-463	18,800円(+税)	00206-000170	約73×64cm	表側地/ポリエステル80%、綿20% 切替部/ポリエステル100% (W・Vタイプのみ) 中身/ポリウレタンフォーム100%
	Wタイプ	CK-464	14,000円(+税)	00206-000171	約70×70cm (ハンドル部4×12cm)	
	Vタイプ	CK-465	11,500円(+税)	00206-000172	約85×50cm (ハンドル部4×12cm)	
Rモデル	600タイプ	CK-461	9,800円(+税)	00206-000146	約30×60cm (ハンドル部4×12cm)	表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%
	800タイプ	CK-462	11,800円(+税)	00206-000147	約30×80cm (ハンドル部4×12cm)	

● 防水カバーセット (エニモ本体+防水カバー) 介護保険/福祉用具貸与対象品目 **体位変換器**

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード	
Mモデル 防水カバーセット	Bタイプ	MB-BCS	28,100円(+税)	00206-000173
	Wタイプ	MW-BCS	22,700円(+税)	00206-000174
	Vタイプ	MV-BCS	18,300円(+税)	00206-000175
Rモデル 防水カバーセット	600タイプ	R600-BCS	14,400円(+税)	00206-000148
	800タイプ	R800-BCS	17,200円(+税)	00206-000149

● 清拭防水カバーセット (エニモ本体+清拭防水カバー) 介護保険/福祉用具貸与対象品目 **体位変換器**

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード	
Mモデル 清拭防水カバーセット	Bタイプ	MB-SBCS	28,700円(+税)	00206-000176
	Wタイプ	MW-SBCS	23,500円(+税)	00206-000177
	Vタイプ	MV-SBCS	19,100円(+税)	00206-000178
Rモデル 清拭防水カバーセット	600タイプ	R600-SBCS	14,900円(+税)	00206-000150
	800タイプ	R800-SBCS	17,800円(+税)	00206-000151

● オプションカバー（別売）

通気タイプ		品番	価格	防水タイプ（ハンドル付き）		品番	価格	清拭防水タイプ（ハンドル付き）		品番	価格
Mモデル用	Bタイプ	CH-173	7,800円(+税)	Mモデル用	Bタイプ	CH-183	9,300円(+税)	Mモデル用	Bタイプ	CH-193	9,900円(+税)
	Wタイプ	CH-174	7,300円(+税)		Wタイプ	CH-184	8,700円(+税)		Wタイプ	CH-194	9,500円(+税)
	Vタイプ	CH-175	5,900円(+税)		Vタイプ	CH-185	6,800円(+税)		Vタイプ	CH-195	7,600円(+税)
Rモデル用	600タイプ	CH-171	4,000円(+税)	Rモデル用	600タイプ	CH-181	4,600円(+税)	Rモデル用	600タイプ	CH-191	5,100円(+税)
	800タイプ	CH-172	4,700円(+税)		800タイプ	CH-182	5,400円(+税)		800タイプ	CH-192	6,000円(+税)
材質：ポリエステル100% (吸汗速乾・静電防止)				材質：表地/ポリエステル100% (吸汗速乾・制菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム (防水)				材質：表地/ポリウレタンフィルム (防水) 裏地/ポリエステル100%			

\*介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。\*商品の取扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。\*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。  
\*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。\*印刷の誤差で実物とは色が異なることがあります。\*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

**CAPE** <https://www.cape.co.jp/>  
ホームページ

■ 製造販売元 **株式会社 ケーブ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7  
TEL: 046-821-5511 (代) FAX: 046-821-5522  
E-mail: lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1  
TEL: 092-431-0885 FAX: 092-431-0889

お問い合わせ先