


ラシム LaSYM

どの向きに設置しても同じ寝心地。こだわりの「シンメトリー設計」

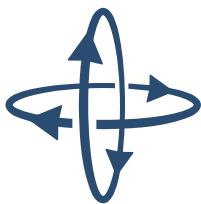

「表」 「頭足側」
「裏」 「裏」

方向自由

設置の向きに、もう迷わない



頭側と足側、表面と裏面のどちらも同じ構造だから設置方向が自由。
様々な姿勢の動きを支援する2つのスリット構造。
カバー表面は清拭消毒しやすい、両面仕様のマットレスです。



グラデーションスリット

寝る位置を選ばず、快適な寝姿勢を保つ

寝姿勢サポート構造 (同心円状のグラデーションスリット)




様々な姿勢の動きを支援する、
2種類のスリット(グラデーション、ウェーブ)を
中間層に配置。凸凹感のないフラットな表面は、
動きの妨げになりません。

① グラデーションスリット構造

中央部から頭側にかけて、段階的に約12%柔らかく身体を保持します。体重が集中する腰部はしっかり支え、過度な沈み込みを抑えます。これにより、背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。

② 同心円状のスリット構造

同心円状に配置されたスリット構造により、仰臥位・側臥位を問わず心地よい寝姿勢を提供します。円状のスリットのため、斜めに寝ても同じ性能が維持されます。

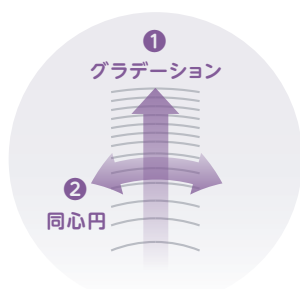

①
自然な背骨のSラインを保持



②
斜めに寝ても同じ寝心地




設置に迷わない両面仕様

設置フリー

「表と裏」・「頭側と足側」同じ構造だから設置に迷わない。

長持ちの秘訣

ラシムは、「表と裏」・「頭側と足側」が同仕様の設置フリーデザイン。敷き替えるたびに、表裏・頭足側がローテーションされ、自然にマットレスへの荷重負荷が分散されます。

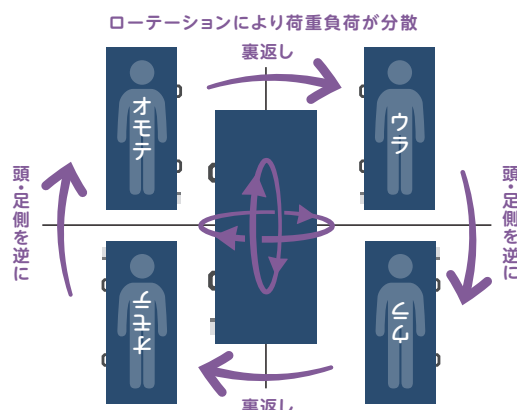

LaSYM お手入れ、



ウェーブスリット

動作を支援する寝返りサポート構造 (ウェーブスリット)

独自のスリット構造が、仰臥位から側臥位への肩の圧迫感を和らげ、スムーズな寝返りを促します。さらに、両端に配置された端座位フレームにより、起き上がりから端座位、立ち上がりまでの一連の動作をサポートします。

③ウェーブスリット構造

側臥位時の肩への負担を考え、ウェーブ状のスリットを高齢者の平均肩幅にあわせて配列。スリット部が柔らかく肩を支えるため、側臥位や寝返りで、下になった肩関節の圧迫や窮屈さを軽減します。寝返りがうちやすく、側臥位をとっても、快適な寝姿勢で過ごせます。


④寝る場所を選ばない安心設計

マットレスの中間層に硬めの端座位フレームを配置。寝返りをうったり、斜めに寝たとしても、身体との接触部は柔らかいソフト層で支えるため、硬めの端座位フレームが手足に直接触れる心配がありません。

⑤安定した端座位とスムーズな立ち上がりをサポート

両端は座位をしっかり支える安定構造。さらに、座ったときの臀部と大腿部の段差を最小限に抑え、次の立ち上がり動作へスムーズに移行できます。

⑤ 安定した端座位時姿勢

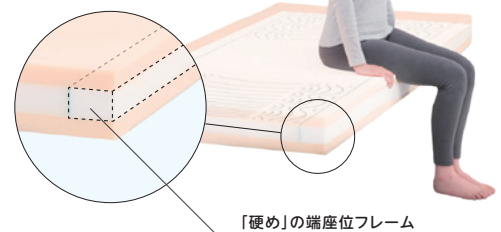

「硬め」の端座位フレーム

③ 肩を自然に沈み込ませ圧迫を軽減 ④ 何処に寝ても身体をやさくささえる



運搬がしやすい専用カバー

防水 制菌 伸縮

Ag+

銀複合系抗菌剤も使用しています。


制菌加工※・清拭消毒に対応
濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムや消毒用エタノールによる清拭消毒にも対応。

※対応菌種:MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌



液体が侵入しにくい
防水仕様

止水ファスナーをマットレス側面の中央部に配置。液体がカバー内へ侵入しにくい構造。

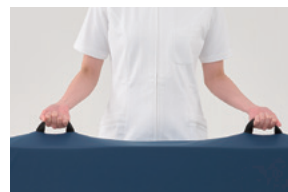



持ち運びに便利な
ハンドル付き

軽量設計でひとりでも簡単に持ち運べます。

LaSYM



CR-810

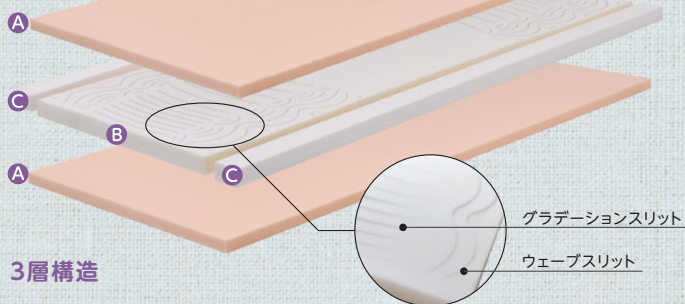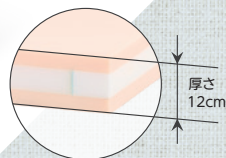

3層構造

- A [ソフト層] 柔らかく身体を支えます
- B [中間層] グラデーションスリットとウェーブスリットで寝姿勢を整えます
- C [端座位フレーム] 端座位時の安定姿勢を保ちます

ラシム 介護保険福祉用具貸与対象品目(特殊寝台付属品)

セット	タイプ	830	900
	品 番	CR-810	CR-811
	TAISコード	00206-000181	00206-000182
	価 格	オープン価格	
	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm
	重 量	5.7kg	6.2kg
	マットレス材質	1層目：ウレタンフォーム 2層目：ウレタンフォーム(スリット加工) 3層目：ウレタンフォーム	
専用カバー	品 番	CH-810	CH-811
	カバー材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布 防水 制菌 伸縮	
	単品価格	オープン価格	



<https://www.cape.co.jp/>

- *介護保険における福祉用具の貸与に関しては、居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。
- *ラシムの取り扱いにあたっては付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
- *商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- *印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。
- *本カタログ掲載内容及び写真・イラストの無断転載を固くお断りします。

■ 製造販売元 **株式会社 ケーブ**

本 社／〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL：046-821-5511(代) FAX：046-821-5522
E-mail：lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所／〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL：092-431-0885 FAX：092-431-0889

お問い合わせ先