

体圧分散式ベッドマットレス/特殊寝台付属品

ラ シ ム
LaSYM


取扱説明書

設置方向フリーデザイン

頭側・足側・表裏の区別は無く
ご使用いただけます。定期的に
裏返したり、頭側・足側の向き
を変えてご使用ください。

交換タイプ

ベッドの上に
そのまま敷いて
ご使用ください。

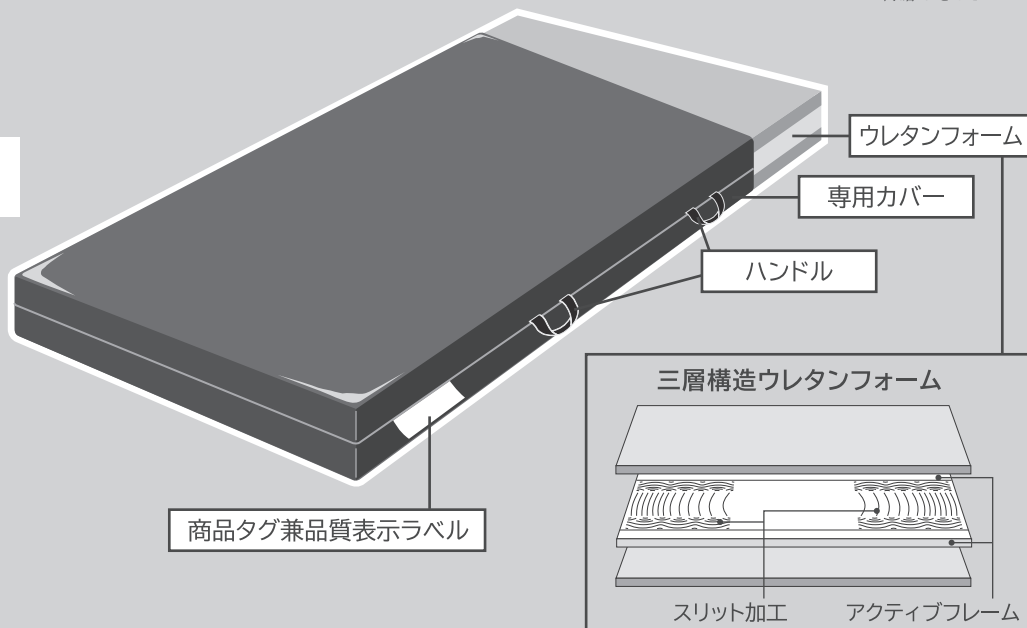

830/CR-810



900/CR-811



安全にお使いいただくために

本品の取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

本品のご使用中に生じる可能性のある事故を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。
従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



従わなかった場合、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。
特に重要なため、下記にまとめて記載します。

- 本品は身体を広く、柔らかく支え、保持するのが特徴です。
心臓マッサージ等、硬い床などの上でないと効果がでない処置にすぐ対応できるよう備えてください。
- 本品のご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。
またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。
病状悪化や事故の恐れがあります。

使用上のご注意

- ご使用の際は必ずベッドにサイドレールを取り付けてください。
サイドレールを使用しない場合には、ベッドからの落下・転落を招く恐れがあり、事故の原因にもなります。
- ご使用になる前に本品上面に異物がないかご確認ください。
異物があるままでご使用になるとケガをしたり、事故の原因になる場合があります。
- 突起物のある場所に本品を敷いて使用しないでください。
- 専用カバーを被せた状態で必ずご使用ください。
- 上に厚手のパッド等を敷かないでください。体圧分散効果を妨げる場合があります。
- 二人以上で使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れや本品破損の原因になります。
- 呼吸を妨げないような体位でご使用ください。うつぶせ寝などの場合、窒息する恐れがあります。
- 本品の端に座るときは、滑り落ちないように身体を支えてください。
- ストーブなどの火に近づけたり、本品の上での喫煙はお止めください。火災の原因になります。
- 新品でにおいがする場合、構成している材料のにおいであり異常ではありませんが、気になる場合は、専用カバーを取り外して風通しの良い日陰に半日ほど置くことで、においが軽減します。
- ウレタンフォームに「永久歪み(ヘタリ)」や「破れ」が見られた場合は、交換をお願いいたします。
- 療養者の発汗などにより、マットレス内部には徐々に湿気が溜まります。
カビ等の原因になるため、定期的に専用カバーを取り外して半日程度の日陰干しを推奨いたします。

お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥・消毒・その他ご不明な点については、株式会社ケープにお問い合わせください。

■専用カバー

洗濯 (専用カバーは取り外して洗濯してください)

洗濯の際は、専用カバーに取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。

- ・汚物(汚れ、便、血液等)を取り除いてください。
- ・洗濯機で弱い洗濯ができます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・低い温度でのタンブル乾燥ができます。乾燥機による乾燥、または陰吊り干しをしてください。



専用カバーを洗濯機で脱水する場合、生地が水が溜まることにより、洗濯機に負荷が掛かり故障や異常振動による転倒事故を招く危険があります。お客様の都合により洗濯機を使用される場合は、生地に溜まった水を大まかに取り除いた上で、軽く脱水を行ってください。



- ・専用カバー損傷防止のため洗濯ネットを使用してください。
- ・タンブル乾燥機を使用する場合、槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。
- ・乾燥機による乾燥後は自然乾燥を行ってください。
- ・ドライクリーニング(石油系は除く)、オートクレーブは表面のポリウレタン樹脂を傷めますので、使用しないでください。
- ・アイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。

清拭

- ・汚物(汚れ、便、血液等)を取り除いて、水または、中性洗剤を水で薄めたもので表面を拭いてください。
- ・消毒用エタノールを使用する場合は濃度70%以上83%以下、次亜塩素酸ナトリウム液を使用する場合は濃度 1,000ppm(0.1%)以下の清拭が可能です。



- 次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合、使用する次亜塩素酸ナトリウム液の使用方法、注意書きをよく確認したうえで行ってください。
- 消毒液を利用した空間噴霧は、目や皮膚などへの刺激、および吸入により人体へ影響を及ぼす可能性があるとしてされています。取扱いには十分ご注意ください。

※使用可能な消毒薬一覧(カバー)

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|
| ・塩化ベンザルコニウム 0.5%以下 | ・MRガス | ・過酸化水素水 3%以下 |
| ・塩化ベンゼトニウム 0.5%以下 | ・オゾンガス 0.5ppm以下 | |
| ・グルコン酸クロルヘキシジン 5%以下 | ・ホルムアルデヒドガス | |



- | | |
|----------|-------|
| ・クロロホルム | ・シンナー |
| ・クレゾール | ・ベンジン |
| ・メチルエーテル | ・トルエン |

■ウレタンフォーム

洗浄、消毒に対応しておりません。

※ウレタンフォームが変色する場合がありますが、品質上の問題はありません。

保管方法について

- ・圧縮された状態や曲げた状態での保管は避けてください。「亀裂」や「永久歪み(ヘタリ)」の原因となります。
- ・上に重いものを置かないでください。
- ・直射日光の当たる場所は避けてください。
- ・高温・多湿の場所は避けてください。

仕様

セット	タイプ/品番	830/CR-810	900/CR-811
	サイズ	幅83×長191×厚12cm	幅90×長191×厚12cm
	重量	5.7kg	6.2kg
	マットレス材質	1層目:ウレタンフォーム 2層目:ウレタンフォーム(スリット加工) 3層目:ウレタンフォーム	
専用カバー	品番	CH-810	CH-811
	カバー材質	ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)	

2605-A