

ケープ ポジショニング用具カタログ

#06



安全に関する注意事項

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



<https://www.cape.co.jp/>

商品に関する詳しい情報は、ケープのホームページをご覧ください。

介護保険における福祉用具の貸与に関しては、
居宅介護支援事業者等までお問い合わせください。

*商品の仕様・価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

*印刷の関係で実物とは色が異なることがあります。

*記載の価格は全て、メーカー希望小売価格です。


*本カタログの掲載内容及び写真・イラストの無断転載は固くお断りします。

■製造販売元 株式会社 **ケープ**

本社 / 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL : 046-821-5511(代) FAX : 046-821-5522
E-mail : lovingcare@cape.co.jp

福岡営業所 / 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1
TEL : 092-431-0885 FAX : 092-431-0889

お問い合わせ先

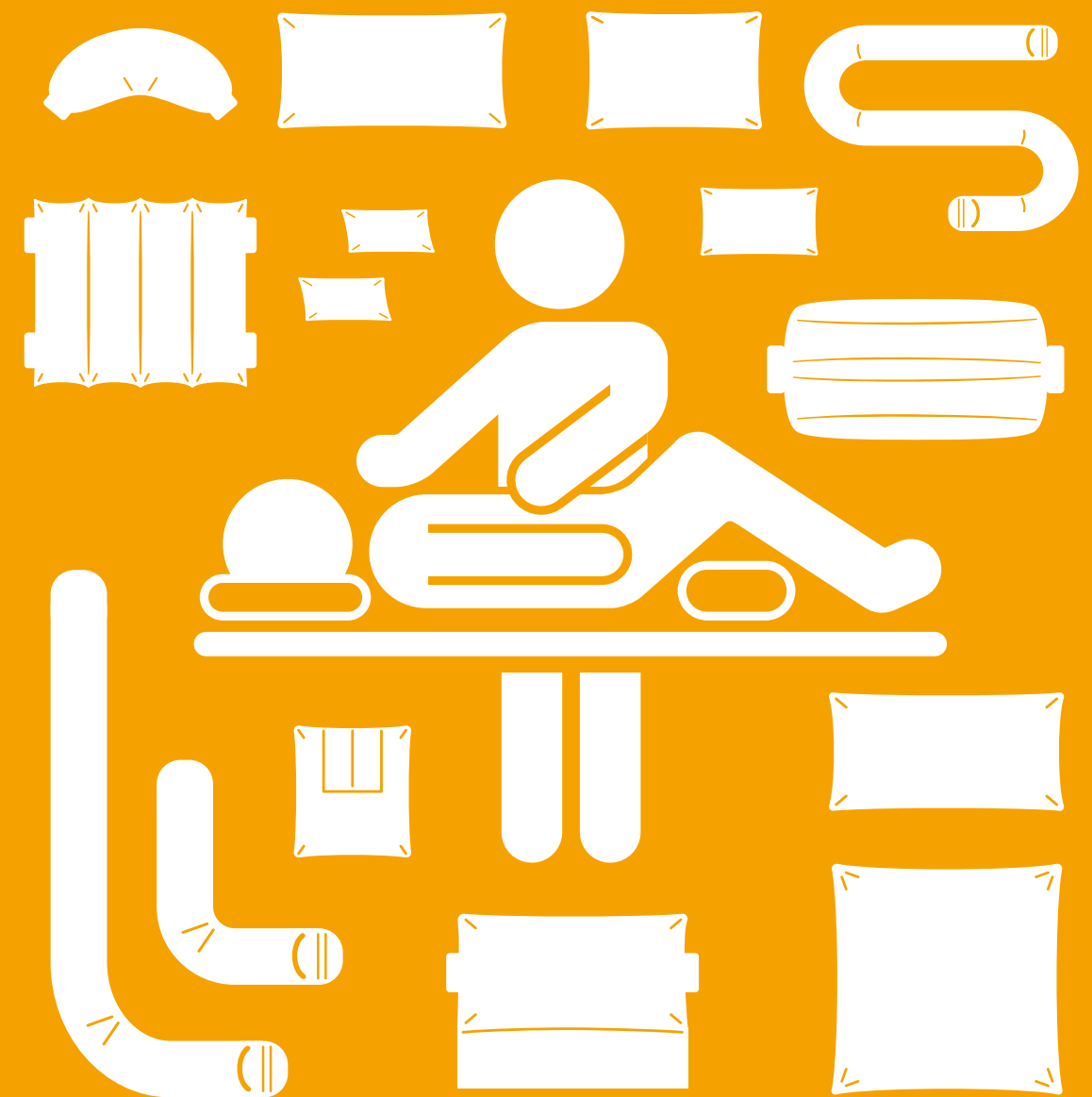

姿勢が崩れにくい、美しい30度側臥位をつくるためにデザインされた
リバーシブル構造のポジショニングクッション

2022
NEW

●Rモデル 600タイプ
(CK-461)

●Rモデル 800タイプ
(CK-462)



高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材

乾燥
100℃


高温乾燥と水抜けの良い構造で中
までしっかり乾きやすい。

2時間
早い

従来品より約2時間早く乾燥。
スピーディーに現場に戻ってきます。



極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。

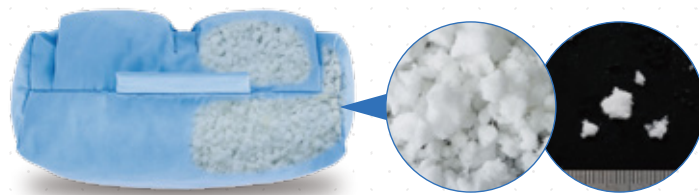

■大小のウレタンフォームを混合
極小のウレタンフォームは体積が小さく、
水分の含有量が少なくなるため、乾きが
早くなります。

いつも清潔に、エニモなら消毒方法の選択肢が広がります。

次亜塩素酸
ナトリウム
500ppm

本体を濃度500ppmの次亜塩素酸
ナトリウム水溶液に30分
間浸漬することができます。




熱水
80℃

本体を80℃の熱水に10分
間浸漬することができます。




美しい30度側臥位をつくるためにデザインされたエニモRモデル600/800タイプ

■背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく「スリット構造」。
スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。

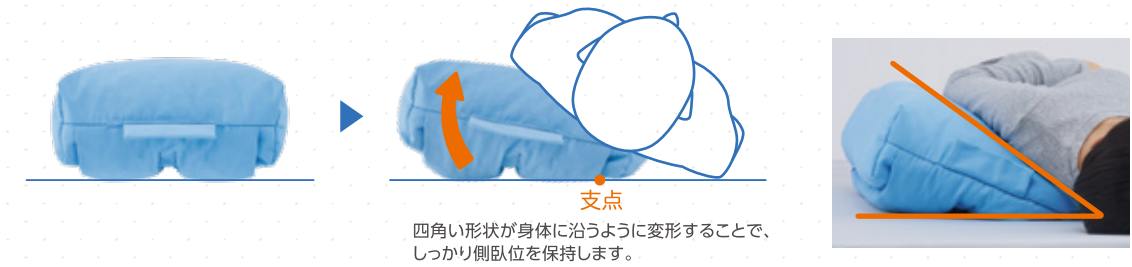


■クッションが外れにくいから
時間が経っても姿勢が崩れにくい。

荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、
クッションの抜けを防止します。

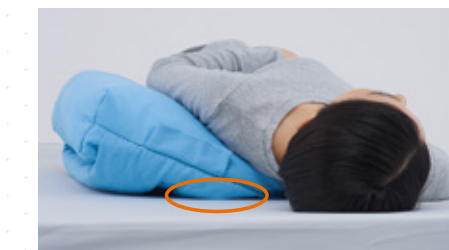

■肩から臀部までこの1本で
支えるからキレイにキマる。
従来の枕型クッションの2倍分の長
さで、男女問わず高齢者の肩から
臀部まで1本でしっかり支えます。

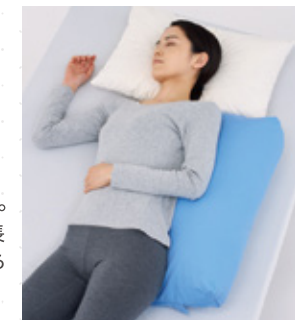


■下肢をのせる位置をガイドする「スリット構造」で誰でも正しくポジショニングづくり。

下肢をのせる位置をガイドするスリット構造。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。
下肢の安定感が増します。



クッションを重ねて使わないから簡単。

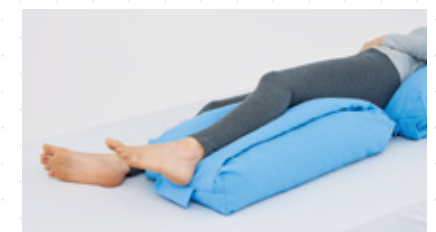

高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の
高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計し
ました。

QRコードからエニモの紹介動画をご覧ください。 <https://www.cape.co.jp/mov>



エニモ本体 介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード
Rモデル 600タイプ	CK-461	9,800円(+税)	00206-000146
サイズ: 約30×60cm(ハンドル部は除く) 材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%			
Rモデル 800タイプ	CK-462	11,800円(+税)	00206-000147
サイズ: 約30×80cm(ハンドル部は除く) 材質: 表側地/ポリエステル80%、綿20% 中身/ポリウレタンフォーム100%			

エニモ防水/清拭防水カバーセット(本体クッションとオプションカバーのセット)
介護保険/福祉用具貸与対象品目 体位変換器

モデルタイプ	品番	価格	TAISコード
エニモR600タイプ 防水カバーセット	R600-BCS	14,400円(+税)	00206-000148
エニモR800タイプ 防水カバーセット	R800-BCS	17,200円(+税)	00206-000149
エニモR600タイプ 清拭防水カバーセット	R600-SBCS	14,900円(+税)	00206-000150
エニモR800タイプ 清拭防水カバーセット	R800-SBCS	17,800円(+税)	00206-000151

オプションカバー(別売)

通気タイプ	モデルタイプ	品番	価格
	Rモデル 600タイプ通気カバー	CH-171	4,000円(+税)
	Rモデル 800タイプ通気カバー	CH-172	4,700円(+税)
材質: ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)			
防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ防水カバー	CH-181	4,600円(+税)
	Rモデル 800タイプ防水カバー	CH-182	5,400円(+税)
材質: 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・抗菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)			
清拭防水タイプ	モデルタイプ(ハンドル付き)	品番	価格
	Rモデル 600タイプ清拭防水カバー	CH-191	5,100円(+税)
	Rモデル 800タイプ清拭防水カバー	CH-192	6,000円(+税)
表地/ポリウレタンフィルム(防水) 裏地/ポリエステル100%			

2022
NEW

ポジショニング
クッション

サポタイト®

姿勢体位管理補助用具

大小種類の違うウレタンフォームチップで固形のウレタンフォームよりやわらかく、滑らかに身体の形に沿ってサポートします。



カバー/ポリエステル65%、綿35%
中身/ウレタンフォーム(ランダムカット、
マイクロキューブカット)

洗濯での丸洗い(80℃まで)、乾燥機の使用(80℃まで)、が可能なので、いつも清潔に使用できます。



洗濯方法: 家庭用洗濯機、乾燥機○
※漂白剤、柔軟剤はご使用
いただけません。

肌触りのよいオプションカバー(別売)

洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。



	枕として、局所のサポートに	側臥位のサポートに	上肢のサポートに	側臥位の背部・下肢のサポートに
タイプ	標準枕	三角枕	ブーメラン	側臥位セット (セット内容) 三角枕×1、 標準枕×2
品番	CK-430	CK-431	CK-432	CK-433
TAISコード	00206-000098	00206-000099	00206-000100	00206-000101
価格	6,000円(+税)	10,500円(+税)	14,000円(+税)	22,500円(+税)
サイズ(cm)	約23×34	約60×24	約54×83	三角枕:約60×24、標準枕:約23×34
材質(カバー)	ポリエステル65%、綿35%			
材質(中身)	ウレタンフォーム(ランダムカット、マイクロキューブカット)			


オプションカバー 通気タイプ ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止) 防水タイプ 表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・抗菌・消臭)、裏地/ポリウレタンフィルム(防水)

通気	品番	CH-440	CH-441	CH-442
	価格	2,500円(+税)	4,600円(+税)	5,000円(+税)
防水	品番	CH-450	CH-451	CH-452
	価格	2,900円(+税)	5,200円(+税)	5,700円(+税)

ポジショニング
補助パッド

フィットサポート

30度側臥位のポジショニングをサポートする補助パッド。
超通気ウレタンフォームでムレを解消。

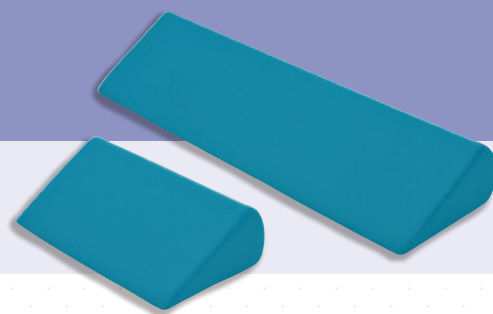


超通気ウレタンフォーム
超通気ウレタンで、いつも爽やかムレ対策。3次元網目構造で、従来品に比べて30%湿度を減少。



専用カバー

吸汗速乾のドライメッシュ生地(洗濯できます)

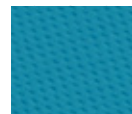

	400タイプ	800タイプ
タイプ		
品番	CK-396	CK-397
TAISコード	00206-000059	00206-000060
価格	5,800円(+税)	9,500円(+税)
サイズ(cm)	幅40×奥行24×厚12	幅80×奥行24×厚12
材質(カバー)	ポリエステル(ドライメッシュ)(吸湿速乾)	
材質(中身)	超通気高弾性ポリウレタンフォーム	
専用カバー		
タイプ	400タイプ	800タイプ
価格	3,300円(+税)	4,300円(+税)

姿勢体位管理
補助用具

ロンボ ポジショニング ピロー&クッション

ドイツのテクノロジーを凝縮した、豊富な形とサイズのピロー&クッション。
洗濯可能な素材で、快適・安全なベッド環境を創造します。



RHOMBO positioning pillows & cushions

輸入元 ラックヘルスケア株式会社 URL <https://www.ing-professional.com/>



身体の形状にフィットする「ロンボフィル」と安定性を持つ「ロンボメッド」。
2種類の素材が、ポジショニングのバリエーションを広げます。

RHOMBO FILL(ロンボフィル)
スニペット

身体の形状にぴったりとフィットして、広い面をサポートして圧力を分散。通気性に優れたハニカム構造の特殊ウレタンを菱形にカットすることで、空気の流れをスムーズにし、ムレを軽減します。



RHOMBO MED(ロンボメッド)
スニペット+チップ

ウレタンよりも少し硬めで、へたりにくい特殊な形の発泡チップが、スニペットとスニペットの隙間を埋めることにより、身体を安定させて保持。適度なしっとり感で、療養者の緊張を最小限に抑えます。



さまざまなケースに対応できる、豊富なラインナップ



下肢屈曲拘縮などにも、クッションを組み合わせてサポート。



素材が軽いので、身体にクッションを乗せても安心です。




車いす座位のサポートにも対応。

洗濯可能でいつも清潔

洗濯での丸洗い、乾燥機の使用が可能なので、いつも清潔に使用できます。本体は通気性の高い素材を使用し、ムレを軽減します。



素材の特性を活かした使用方法

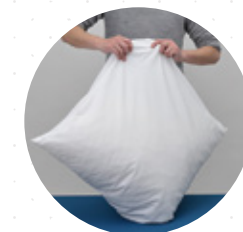


【振る】

ピローを振ることで、中身の厚みや形状が調整できます。



【引き出す】

ピローをつまんで引き出すことで、身体への接触部分を微調整できます。

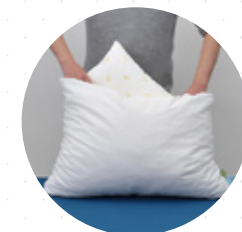

【入れる】

大きなピロー(RF5)に小さなピロー(RF3)を入れることでボリュームがアップ。より安定感を出すことができます。



【揺らす】

ピローにのせた身体を揺らすことで、より身体の形状にフィットし、なじませることができます。

用途に合わせた3種類のオプションカバー(別売)


洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでタイプ別にご用意しています。



汗をかきやすい方に。吸汗速乾性生地です。



表面防水で、汚れの侵入を防ぎます。表面は吸汗速乾性生地です。

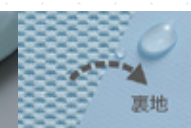

表面は防水生地、消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで拭拭可能です。

Starter Set 初期導入セット

VALUE SET

セットでお得なプライス

汎用性の高いクッション5種類(計6個)のセット。
初めて導入をご検討の方にお勧めです。

- RF1
- RF3(×2)
- RF5
- RM1-H
- RM2-H



RHOMBO FILL ロンボフィル

RF1 (40×60cm) RF2 (40×80cm)



枕にも、さまざまな部位のサポートにも使用できるソフトタイプのマルチクッション。



RF3 (23×40cm) RF4 (40×60cm)



沈み込みを抑え、安定感よくさまざまな部位を支えることができるクッション。



POINT! 中身を高密度に充填。感触の良さはそのままに、沈み込みを抑えてサポートできます。

高密度仕様

RF5 (80×80cm)



サポートの難しい円背と拘縮にも対応する、広く身体を支えられる大型クッション。



POINT! RF5は振ったりすることで、中身を移動させ、厚みを変えることができます。例えば頭部側を厚く、背部側を薄くすることができます。


RHOMBO MED ロンボメッド

RM1-H (クッション本体:65×75cm、ハンドル部:4×12cm)



体位変換器

平らなままで、丸めて、折り曲げて、目的に応じて自在に使えるクッション。

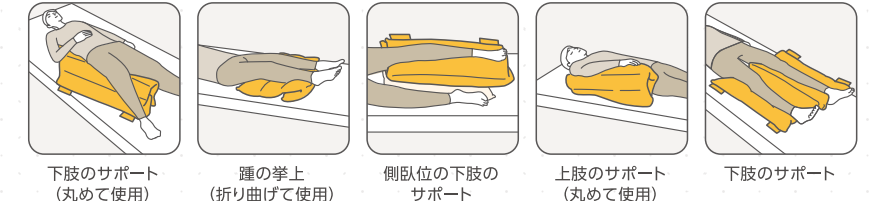


POINT! スリットに沿わせて下肢を支えることで、下肢を安定して支えることができます。

RM2-H (クッション本体:40×80cm、フラップ部:20×80cm、ハンドル部:4×12cm)



体位変換器

フラップ付きでより安定感よく、快適に30度側臥位をサポートするクッション。

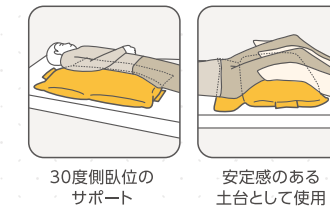

◀フラップ部を身体の下に敷きこんでご使用ください。

RM3 (15×30cm)



小さな支持面を提供し、高さの微調整やスモールチェンジ(小さな体位変換)にも使用できる小型クッション。



POINT! 小さな隙間にもスムーズに入れることができ、細かい部位をサポートするのに最適なサイズです。

RM4-H (クッション本体:30×65cm、ハンドル部:4×12cm)



体位変換器

関節部の曲がりに沿い、上肢のサポート等に使えるクッション。



QRコードからロンボクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。 <https://www.cape.co.jp/mov>




RM5 (Φ12×250cm)



体位変換器

1本で体位変換、側臥位、下肢のサポートなど自在に使えるクッション。

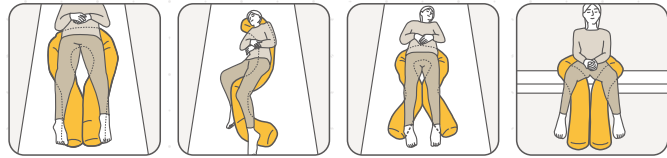

下肢の拘縮予防のサポート

側臥位での胸郭・骨盤・下肢のサポート

外旋、内旋予防と踵部の床ずれ対策

端坐位での骨盤サポート

RM6-H (クッション本体:62×65×15cm、ハンドル部:4×12cm)



体位変換器

高さを保持し、安定感よく姿勢をサポートする台形型クッション。

POINT!
中身のメッド素材が下肢の形状に沿い、優しく保持しながら、安定して下肢を支えることができます。



下肢挙上のサポート

角度の低い背上げ/軽い円背の方の仰臥位の背部サポート

スネーククッション (Φ20×220cm)



体位変換器

1本で体位変換、側臥位等、さまざまな部位を全身的・部分的にサポートできるクッション。



仰臥位・背上げ時の頭・肩・腕までのサポート

側臥位の頭部・背部・下肢のサポート

半腹臥位のサポート

下肢のサポート

端坐位での骨盤サポート

POINT! 側臥位に使用すると、頭から胸郭・骨盤・上側になる下肢まで一本でサポートできます。頭側まで入ると、それがさびとなり、背中のスネークが抜けずらく、姿勢が崩れにくくなります。


両端には持ち手がついています。ピローを振ることで、中身を均一に整えることができ、使用前の準備が簡単にできます。

スネークミニクッション (Φ20×100cm)



体位変換器

さまざまな部位のサポートに使いやすい、ハーフサイズのスネーククッション。

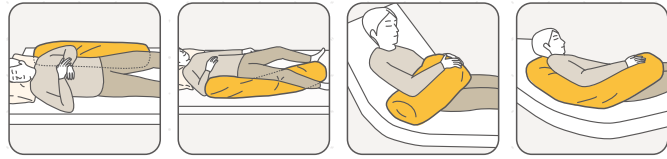

側臥位のサポート

下肢のサポート

背上げ時の上肢のサポート

上肢のサポート


RHOMBO FILL & RHOMBO MED ロンボフィル・ロンボメッド

バックサポートクッション (40×45cm)



車いす付属品

背中に置くだけで心地よくフィットする座位姿勢サポートクッション。

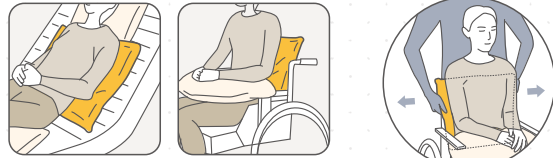

ベッドでの背上げ姿勢をサポート

車いすでの座位姿勢をサポート

POINT! 両サイドを軽く引っ張ることで、さらに身体なじみ、よりしっかりと座位姿勢をサポートすることができます。

CASE STUDY

実践的なポジショニング例をご紹介します。



側臥位

- 1 胸郭・骨盤を同時に支えます (RM2-H)。
- 2 左足を支えます (RM1-H + RF1)。
- 3 右足の膝が浮いている場合に支えます (RM3)。
- 4 左腕の重さが胸郭や腹部にかかりすぎないように上肢をサポートします (RM4-H)。

POINT!

最後に身体が捻じれていないかなど、身体全体の位置関係を確認しましょう。



下肢屈曲拘縮

- 1 土台のクッション (RM2-H) を置きます。
- 2 土台のクッション (RM2-H) の上に下肢を全体で支えるためのクッション (RM1-H) を重ねます。そしてスリットに合わせて脚をサポートします。
- 3 足底にもクッションでサポートします (RF3)。
- 4 足底を支えるクッションがズレないように、ストッパーのクッションを置きます (RM3)。



円背のサポート

- 1 頭部の位置に土台のクッション (RM4-H) を置きます。
- 2 土台のクッション (RM4-H) の上に、大きな柔らかいクッション (RF5) を重ね、背中全体をサポートします。
- 3 前腕を置く場所 (RM1-H) を提供することで、手をお腹の上に置くよりも肘を伸ばしやすくします。



スモールチェンジ



- 1 頭以外、肩の位置からスネーククッションの下にRM5を入れて、より深い側臥位にします。膝の高さを提供するため、RF3やRM3の小枕で調整します。
- 2 次に間われるタイミングで肩、骨盤、下肢の下とRM5を抜いていきます。
- 3 スネーククッションのみの側臥位になります。この後ももう一度RM5を入れたり、スネーククッションを少しずつ抜いていくなど、バリエーションを増やすことができます。

POINT! スモールチェンジとは、少しずつクッションを引いていくことで、重さのかかる場所を移動させていきます。夜間の体位変換、筋緊張の強い方にも受け入れやすく、負担の少ないポジショニング方法です。

QRコードからロンボクッションのご使用方法が動画でご覧いただけます。 <https://www.cape.co.jp/mov>



コンパクトガイドのご案内

より詳しいポジショニングの実践方法を解説したガイドブックをご用意しています。右記URLよりダウンロードできます。 <https://www.cape.co.jp/basics/guide>



ロンボ ポジショニング ピロー&クッション 〈仕様・価格表〉

本 体				
タイプ	TAISコード	価格(+税)	サイズ(cm)	材質
 RF1	00245-000193	5,500円	40×60	表側地/綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)/ロンボフィル(ポリウレタンスニペット)
 RF2	00245-000194	7,500円	40×80	
 RF3	00245-000195	6,500円	23×40	
 RF4	00245-000196	12,500円	40×60	
 RF5	00245-000197	15,000円	80×80	
 RM1-H	00245-000232	17,500円	本体 65×75 ハンドル部 4×12	表側地/綿50%、ポリエステル50% 中身(充填物)/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、ポリプロピレンビーズ50%) ※RM6-Hのみ、ロンボメッドの下層に内部ウレタンフォーム(ウレタンフォーム)
 RM2-H	00245-000233	17,500円	本体 40×80 フラップ部 20×80 ハンドル部 4×12	
 RM3	00245-000200	3,200円	15×30	
 RM4-H	00245-000234	9,000円	本体 30×65 ハンドル部 4×12	
 RM5	00245-000154	18,000円	Φ12×250	
 RM6-H	00245-000245	22,000円	62×65×15 ハンドル部 4×12	
 スネーククッション	00245-000102	29,000円	Φ20×220	
 スネークミニクッション	00245-000152	19,000円	Φ20×100	
 バックサポートクッション	00245-000168	17,500円	40×45	
 初期導入セット	00245-000103	63,000円	(セット内容) RF1, RF3(×2), RF5, RM1-H, RM2-H 汎用性の高いクッション5種類(計6個)をセットにしました。	

※サイズについて: 本体サイズは、製造元のドイツ・リューク社の基準に従って、中身を充填する前の生地寸法にて記載しています。そのため実商品で寸法計測した場合には、大きさが表記サイズと異なります。

●本体(クッション)とオプションカバーのセット 体位変換器 介護保険/福祉用具貸与対象品目



防水カバーセット



清拭防水カバーセット

防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード	清拭防水カバーセット	品番	価格(+税)	TAISコード
ロンボRM1-H防水カバーセット	RM1-BCS	23,800円	00206-000133	ロンボRM1-H清拭防水カバーセット	RM1-SBCS	24,500円	00206-000152
ロンボRM2-H防水カバーセット	RM2-BCS	23,800円	00206-000134	ロンボRM2-H清拭防水カバーセット	RM2-SBCS	24,500円	00206-000153
ロンボRM4-H防水カバーセット	RM4-BCS	14,700円	00206-000135	ロンボRM4-H清拭防水カバーセット	RM4-SBCS	15,400円	00206-000154
ロンボRM5防水カバーセット	RM5-BCS	24,300円	00206-000139	ロンボRM5清拭防水カバーセット	RM5-SBCS	25,000円	00206-000157
ロンボRM6-H防水カバーセット	RM6-BCS	29,300円	00206-000145	ロンボRM6-H清拭防水カバーセット	RM6-SBCS	30,000円	00206-000155
ロンボスネーククッション防水カバーセット	SN-BCS	36,600円	00206-000137	ロンボスネーククッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS	37,500円	00206-000156
ロンボスネークミニクッション防水カバーセット	SN-BCS mini	24,000円	00206-000138	ロンボスネークミニクッション清拭防水カバーセット	SN-SBCS mini	24,600円	00206-000158

オプションカバー	通気タイプ		防水タイプ		清拭防水タイプ	
	品番	価格(+税)	品番	価格(+税)	品番	価格(+税)
各本体用のオプションカバーを3タイプをご用意しています。洗濯もできます。	ポリエステル100%(吸汗速乾・静電防止)		表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・抗菌・消臭) 裏地/ポリウレタンフィルム(防水)		表地/ポリウレタンフィルム(防水) 裏地/ポリエステル100%	
RF1用	RF1/RF4C	4,400円	RF1/RF4CB	5,100円	RF1/RF4CS	5,700円
RF2用	RF2C	4,400円	RF2CB	5,100円	RF2CS	5,700円
RF3用	RF3C	2,200円	RF3CB	2,500円	RF3CS	2,800円
RF4用	RF1/RF4C	4,400円	RF1/RF4CB	5,100円	RF1/RF4CS	5,700円
RF5用	RF5C	6,000円	RF5CB	6,900円	RF5CS	7,600円
RM1-H用	RM1C	5,500円	RM1-HCB	6,300円	RM1-HCS	7,000円
RM2-H用	RM2C	5,500円	RM2-HCB	6,300円	RM2-HCS	7,000円
RM3用	RM3C	1,700円	RM3CB	1,900円	RM3CS	2,200円
RM4-H用	RM4C	5,000円	RM4-HCB	5,700円	RM4-HCS	6,400円
RM5用	RM5C	5,500円	RM5-HCB	6,300円	RM5-HCS	7,000円
RM6-H用	RM6C	6,400円	RM6-HCB	7,300円	RM6-HCS	8,000円
スネーククッション用	SNC	6,600円	SN-HCB	7,600円	SN-HCS	8,500円
スネークミニクッション用	SNC mini	4,300円	SN-HCB mini	5,000円	SN-HCS mini	5,600円
バックサポートクッション用	BSC	4,900円	BSCB	5,600円	BSCS	6,300円

介護グローブ ケープ介護グローブ

ケープ介護グローブ

滑りやすいグローブでストレス無く、
ずれを解消。




丸洗い
OK

滑りやすい素材を使用

滑りやすい素材のため、臀部などの重い箇所にも簡単に手を差し込むことができます。

使いやすいサイズ・形状

介助しやすいスリムフィットサイズ。装着後に指を開くと落ちない幅で、裏返ししやすい筒型タイプ。

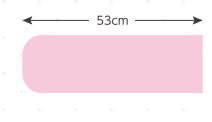

品番	CK-388 (1セット2枚入り)
価格	2,200円(+税)
サイズ(cm)	フリーサイズ(幅17×長53)
材質	ナイロン100%
10セットパック	20,900円(+税)

ケープ介護グローブ 使い捨てタイプ

医療現場のための、使いやすく衛生的な、
ケープ介護グローブ 使い捨てタイプ。



感染対策に

安心してご使用いただける、衛生的な
使い捨てタイプ。

フラップ構造

身体の下に手を差し込む際、フラップが折れ曲がり、スベリやすさが向上します。

手が抜けにくいポケット構造



品番	CK-498 (1箱50枚入り)
価格	2,200円(+税)
サイズ(cm)	フリーサイズ(幅18×長58)
材質	ポリエチレン