

正常運転点検ポイント

製品の効果を維持し、末永くご利用いただくための点検ポイントです。

エアマスター トライセル®

CR-280 / CR-320共通



* 詳しくは、本品の取り扱い説明書をご参照ください。

✓ チェック!

❑ 1. 電源ランプが点滅していませんか?

エアマットレスの内圧が異常な場合に、ポンプの電源ランプが点滅します。点滅している場合は、下記手順2~8を行って下さい。

※点滅を消すには、点検後、電源ボタンを「切」にし、再度「入」にして下さい。約60分後に再度点滅する場合は、メーカーでの点検を推奨します。

🔄 メーカーの点検・交換推奨マークです。



❑ 2. 送風チューブが折れ曲っていませんか?

ベッドシーツ等と一緒に送風チューブがベッドマットレスの下に巻き込まれて折れ曲がっていないかお確かめ下さい。

✗の場合は、送風チューブのヨジレや折れ曲りを直して下さい。



❑ 3. 送風チューブがカプラーから外れていませんか? カプラーのツマミが破損していませんか?

①送風チューブ3本がカプラーに入っているかお確かめ下さい。✗の場合、送風チューブをカプラーにしっかり差し込んで下さい。

②カプラーのツマミの破損もお確かめ下さい。破損の場合は、メーカーでのお取替えを推奨します。なお、正常な状態を確認された後は、カプラーを所定のポンプ差込口に差し込んで下さい。



❑ 4. オリングが外れていませんか?


カプラーのオリングが外れていないかお確かめ下さい。オリングが外れていると空気漏れの原因となります。オリングを紛失された場合は、新たにオリングを装着して下さい。

なお、正常な状態を確認された後またはオリング装着後は、カプラーを所定のポンプ差込口に差し込んで下さい。



❑ 5. エア抜き栓が外れていませんか?

エアマットレス頭側の送風チューブに、エア抜き栓がきちんと差し込まれた状態にあるかお確かめ下さい。✗の場合は、エア抜き栓をしっかりと差し込んで下さい。

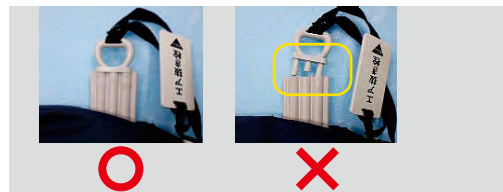


❑ 6. 24本のエアセルが送風チューブとつながっていますか?

エアマットレスの専用カバーを開き、各エアセルの下側に付いているTコネクタが送風チューブに差し込まれているかお確かめ下さい。✗の場合は、Tコネクタを送風チューブにしっかり差し込んで下さい。



❑ 7. エアセルが破損していませんか?

エアマットレスの専用カバーを開き、24本のエアセルを手で触ってお確かめ下さい。右図のように24本のエアセルが約5分間隔で、3連順次に膨張と収縮を繰り返していますが、時間が経っても膨らまないエアセルがある場合は、破損の可能性があります。破損の場合、メーカーでのお取替えを推奨します。

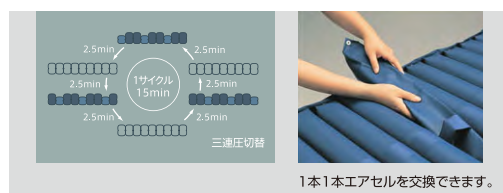

❑ 8. エアフィルターに汚れがたまりすぎていませんか?

エアフィルターに汚れがたまりすぎると、エアマットレスが正常に膨らまない場合があります。エアフィルターはポンプの底にあるフタを開けると中に入っています。汚れがたまりすぎている場合は、新しいエアフィルターにお取替え下さい。



✓ チェック!

□ 9. 操作パネルは破損していませんか?

磨耗などによって操作パネルに穴が開いた状態でご使用になりますと、水がかかったりした場合、中にある基板がショートする可能性があります。✕の場合は、メーカーでの操作パネルのお取替えを推奨します。

⇄ メーカーの点検・交換推奨マークです。




□ 10. ポンプケースは破損していませんか?
ポンプの中から異音はしませんか?

落下や強い衝撃を受けるなどしてポンプケースが破損している場合は、ポンプケースだけでなく内部の部品も破損している可能性があります。ポンプのボタンを押してもランプが点かない場合は、メーカーでの点検を推奨します。また、購入時には無かった異音(「ブーン」「カタカタ」)がポンプの中からする場合は、モーターの部品などが消耗している可能性があります。メーカーでの点検を推奨します。




□ 11. 電源コード・プラグは破損していませんか?

電源コード・プラグが破損していると、漏電・ショートなどの危険性があります。
①の場合は、メーカーでの電源コードのお取替えを推奨します。
②のように顕著に折れ曲がっている場合は、中の配線が断線している可能性があります。メーカーでの点検・お取替えを推奨します。
なお、正常な場合は、電源プラグを差し込み、ポンプの体重設定を点検前の設定にお戻しください。

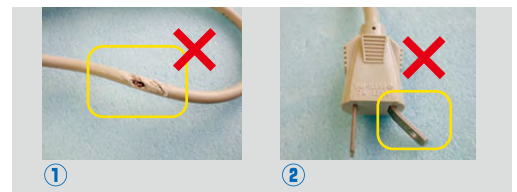


□ 12. ポンプフックは付いていますか?

ポンプの裏側にポンプフックが付いているかお確かめ下さい。✕の場合は、ベッドのフットボードなどにポンプフックが残っていないかお確かめ下さい。ポンプフックのみのご購入もできます。

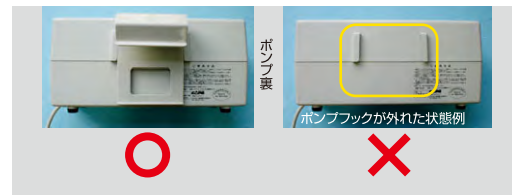

□ 13. 専用カバーはお使いですか?

シーツをご使用の場合でも、専用カバー(防水、抗菌加工)はお使い下さい。専用カバーは、衛生面の視点からもご使用いただくことを推奨しております。

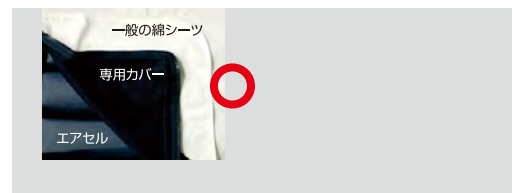

□ 製品情報1 ご利用者さまの体重に合わせた設定をされていますか?

- トライセルをご使用になる方の体重をボタンで調整・設定するだけで、ポンプの圧力センサーが働き、その方に合わせた最適な内圧管理を自動的に行います。最適な除圧環境を作るためにも、ご利用者の体重に合わせた体重設定を行ってください。
- 体重設定ボタンは30~80kgまで5kgきざみで調整できます。
- 電源プラグを抜かれると、体重設定が自動的に初期設定の50kgに戻りますので、ご注意ください。電源プラグを抜かずに電源ボタンを「切」「入」にした場合は、初期設定の50kgには戻りません。



□ 製品情報2 トライセルの「背上げモード」をご存知ですか?

- 経管栄養など長時間の背上げ体位による「底つき回避」「姿勢保持」「ずれ軽減」を目的にトライセルには「背上げモード」が搭載されています。
- 「背上げ」ボタンを押すだけで、全てのエアセルの内圧が高まり(静止状態)、身体をやさしくホールドしながら底つきを防ぎます。※「背上げ」ボタンを押して15分以内に背上げモードへの移行が完了します。その後、背上げを行ってください。
- 安全対策の2時間オートオフ機能付きです。※背上げモードは2時間で自動的に切れます。



メンテナンス情報


- お見積りは無料です。*修理部品は有料です。
- お見積りご回答後3営業日以内に修理されたお品物をご発送します。
- 送料は、発送元払いでお願い致します。

株式会社 ケーブ® メンテナンスグループ

〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7
TEL.046-821-5517 受付時間:平日9:00~17:00
URL <http://www.cape.co.jp>

各部の名称

専用マットレス

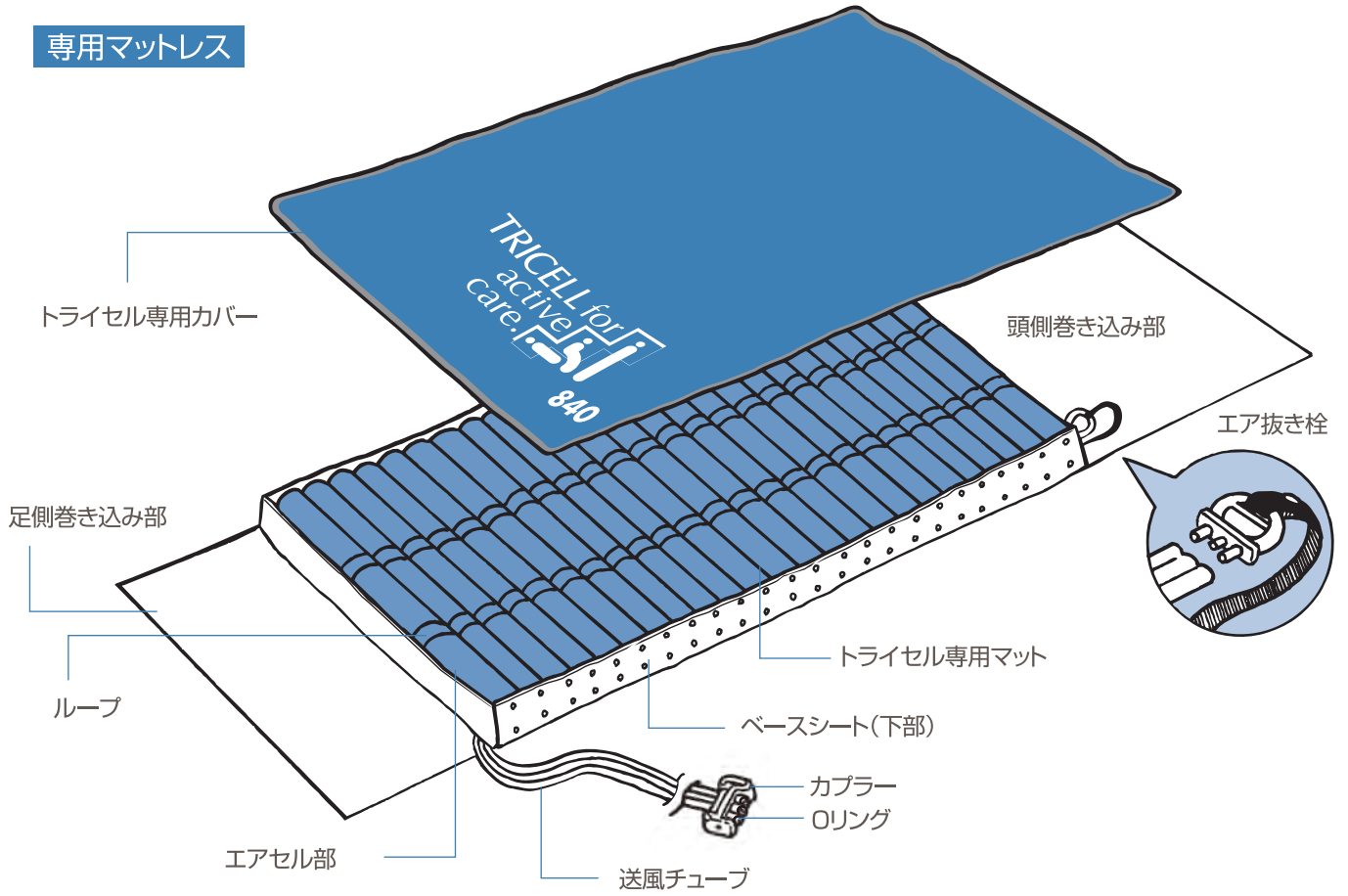

専用ポンプ

